

C P R 蘇生マスク



取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

- 1) 本品は1回限りの使用で、再使用しないでください。
- 2) 使用目的以外に使用しないでください。
- 3) 発火のおそれのある場所で酸素吸入はしないでください。
- 4) 救急蘇生に習熟した方以外は使用しないでください。
- 5) 材質に過敏症がある傷病者には使用しないでください。
- 6) 破損のおそれがありますので、本品を分解しないでください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

本品はポケットサイズのマウス・ツウ・マスク法の蘇生マスクです。

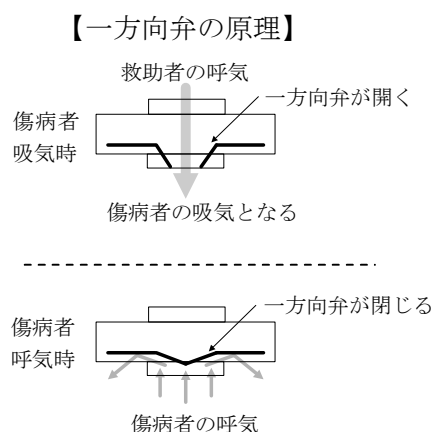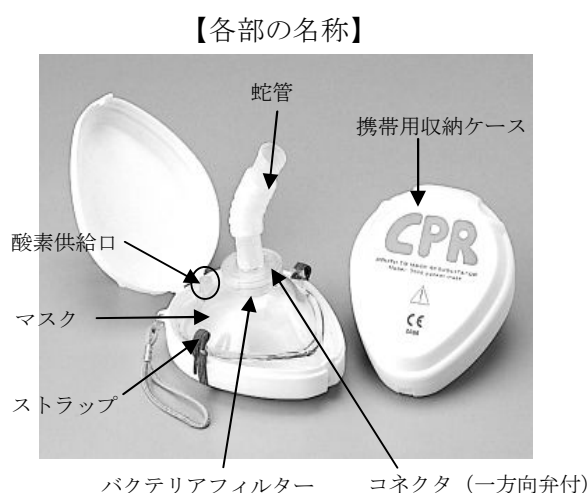

【材質】


- ①マ ス ク：ポリ塩化ビニル（可塑剤；フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)）
- ②ストラップ：ポリエステル系繊維（ラテックスフリー）
- ③蛇 管：ポリプロピレン

3. 使用前の準備に関する事項

- 1) マスクが変形していないか、また鼻・口を覆うクッション機構に異常がないか確認してください。
- 2) マウス・ツウ・マスク法に則って蛇管を吹き、マスクから空気が出ていること、一方向弁の機能が正常に働いていることを確認してください。

4. 一般的な使用方法とその注意事項

- 1) 収納状態のマスクを反対側に押し出してください。
次に、蛇管をマスクに装着してください。

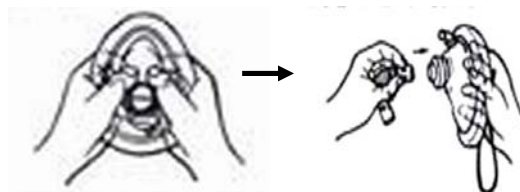


- 2) 傷病者の鼻と口を覆うように、親指と人差指（又はストラップ）でマスクを固定してください。

- 3) 蛇管を口にくわえ、心肺蘇生を行ってください。




注意

蛇管に他の蘇生器を直接装着して使用することも可能です。

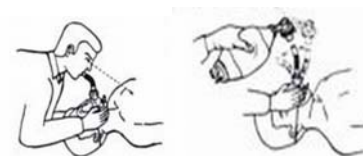


- 4) 傷病者の胸が膨らむまでゆっくりと息を吹き込み、傷病者に息を吐き出させてください。

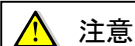

注意


傷病者が嘔吐した場合は、ただちにマスクをはずし、口腔内の嘔吐物を取り除いて傷病者の気道を確保してください。

- 5) 酸素を付加する場合は、マスクの酸素供給口のキャップを外し、酸素チューブを接続してください。

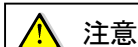

注意

接続できるプラグはユニバーサルタイプのみで、短型タイプは接続できません。

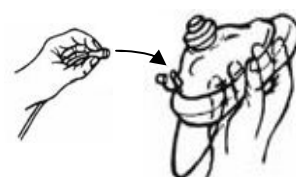

5. 医療機器の清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

- 1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。
- 2) 使用期限
製造年月より 3 年間有効です [自己認証 (当社データによる)]。

6. 技術仕様

重量	約 110g(収納ケース含む)
サイズ	W104×D118×H90 mm
コネクタ	一方向弁 (ダックビルバルブ) 内蔵 外径 15 mm
蛇管	内径 15 mm
フィルターによる呼気・吸気抵抗	< 5 cm H ₂ O (0.49kPa) / 分時流量 30LPM
使用時の環境条件	周囲温度 0～40℃
保管時の環境条件	周囲温度 -18～50℃

7. アフターサービスとその連絡先に関する事項

製造販売業者 : 村中医療器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL 0725-53-5546
<http://www.muranaka.co.jp>

注文コード	品番	商品名
502-014-31	3606	MM I C P R 蘇生マスク