


アデノウイルスキット

イムノエース® アデノ



最終判定
5分

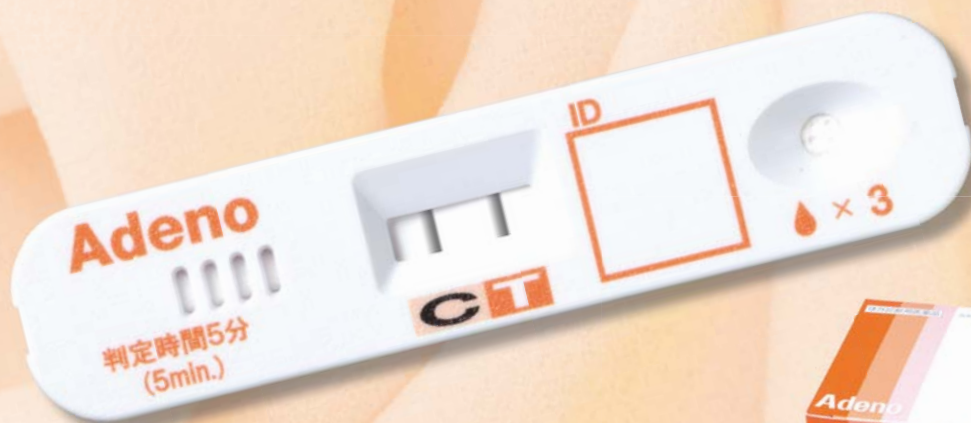

●テストプレートの写真はアデノウイルス抗原陽性例です。

最終判定は5分

陽性は3分から判定が可能

判定ラインはブラックライン

ナノテクノロジー「白金-金コロイド」採用

ナイロン軸で植毛タイプの咽頭・角結膜用スワブを採用






4種類の検体が使用可能

検体種：咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液※・鼻腔吸引液・角結膜ぬぐい液

※鼻腔ぬぐい液を使用する場合は、別売の「鼻腔用BRスワブEN 50本」(カタログ番号ACSW7001)をご使用ください。

検体抽出液はイムノエース® Flu・hMPV・RSV Neo・Flu/RSVと共通使用が可能


●検体抽出液の共通使用につきましては、各製品の添付文書に記載された使用方法に従ってください。

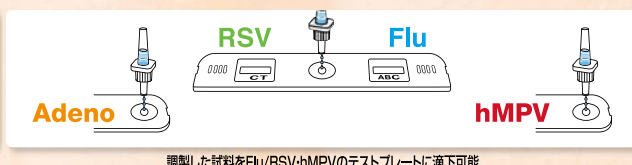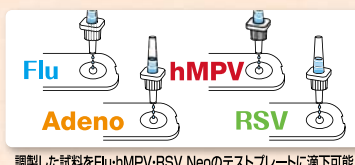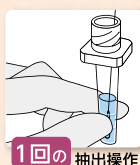




操作方法

●検体採取


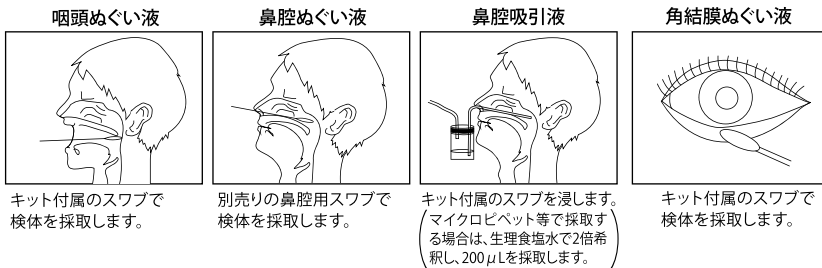


●試料調製

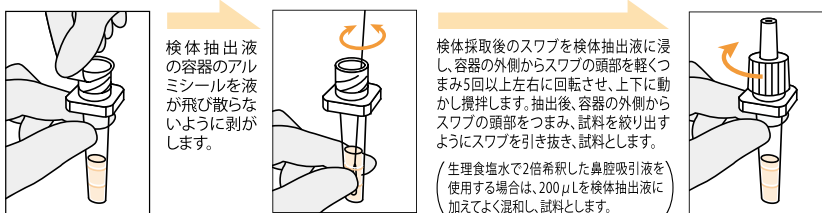


●試料滴下

検体抽出液の容器の中ほどをつまみ、テストプレートの試料滴下部に試料3滴を滴下します。

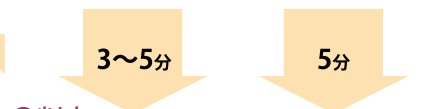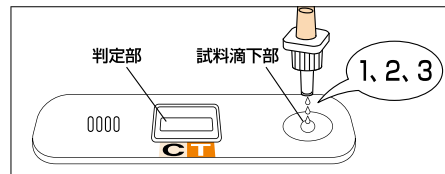

●判定

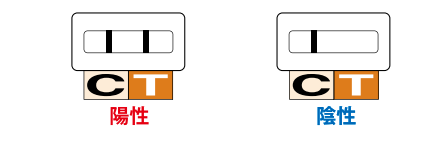

※吸引器、鼻腔用スワブ等は、キットに含まれておりません。

参考データ

●相関性試験成績

※本製品添付文書から抜粋

鼻腔吸引液		PCR		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	52	1	53
	陰性	1	58	59
	合計	53	59	112

陽性一致率: 98.1%
陰性一致率: 98.3%
全体一致率: 98.2%

鼻腔ぬぐい液		PCR		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	55	1	56
	陰性	2	56	58
	合計	57	57	114

陽性一致率: 96.5%
陰性一致率: 98.2%
全体一致率: 97.4%

角結膜ぬぐい液		PCR		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	62	2	64
	陰性	6	127	133
	合計	68	129	197

陽性一致率: 91.2%
陰性一致率: 98.4%
全体一致率: 95.9%

咽頭ぬぐい液		対照品A		
		陽性	陰性	合計
本品	陽性	56	1 ^{注1)}	57
	陰性	0	125	125
	合計	56	126	182

注1) PCR法陽性
陽性一致率: 100.0%
陰性一致率: 99.2%
全体一致率: 99.5%

製品概要

測定原理: 免疫クロマトグラフ法

使用目的: 咽頭ぬぐい液、鼻腔ぬぐい液、
鼻腔吸引液又は角結膜ぬぐい液中の
アデノウイルス抗原の検出
(アデノウイルス感染の診断の補助)

有効期間: 27ヶ月(製造後)

貯蔵方法: 2℃~30℃で保存

保険点数: アデノウイルス抗原定性(糞便を除く)189点、区分D012 35
(令和2年4月1日より適用)

判定時間: 3分~5分

品名	イムノエース®アデノ10テスト	イムノエース®アデノ30テスト
カタログ番号	IAAD0350	IAAD0340
JANコード	4987815003500	4987815003401
包装単位	10テスト	30テスト
希望小売価格(税別)	17,000円	51,000円

テストプレート製品

イムノエース®Flu・イムノエース®hMPV・
イムノエース®RSV Neo・
イムノエース®Flu/RSVとの同時測定に有効

品名	イムノエース®アデノテストプレート10テスト
カタログ番号	IAAD0325
JANコード	4987815003258
包装単位	10テスト
希望小売価格(税別)	13,000円

- 本品はテストプレートのみで、検体抽出液、スワブ、ノズルは含まれておりません。
- 同時測定を実施する場合は、イムノエース®Flu、イムノエース®hMPV、イムノエース®RSV Neo、イムノエース®Flu/RSVの検体抽出液を使用します。

- 鼻腔ぬぐい液を使用する場合は、別売の「鼻腔用BRスワブEN 50本」(カタログ番号ACSW7001)をご使用ください。



製造販売元

株式会社 **タウンス**

〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1

[HP] <http://www.tauns.co.jp/>

お問い合わせ先

お客様専用フリーダイヤル

0120-048-489

受付時間/9:00~17:30(月~金 祝日を除く)

販売店