

保護キャップ ねじ切り不要の穿刺針

- 安全** 穿刺部位に触れる部分はディスポーザブルです。
- 安心** 使用後取りはずした穿刺針は再使用できません。
- 簡単** 穿刺針は穿刺器具に差し込むだけです。



イージー
naturalet EZ

ナチュラレット EZ デバイス

患者様にも院内でもやさしい負担の少ない穿刺器具です。

準備

穿刺針を取り付けると、
状態確認窓は緑色に。



穿刺針を差し込むだけで準備完了

穿刺

穿刺が終わると、状態
確認窓はピンク色に。



大きな黄色のボタンで穿刺

廃棄

穿刺針を廃棄すると、
状態確認窓は白色に。



取りはずしレバーで穿刺針に触れずに廃棄

■ 状態確認窓

ナチュラレット EZ デバイスの状態を3色で表示します。

白 色

➡

穿刺針は取り付けられていません。

緑 色

➡

使用前の穿刺針が取り付けられています。
穿刺ボタンを押すことで穿刺されます。

ピンク色

➡

取り付けられている穿刺針は使用済みです。
ので、捨ててください。

■ 深さ調整ダイヤル

穿刺の深さを6段階に調整可能です。

深さの表示

1
2
3
4
5
6

穿刺の深さ

浅い
↑
↓
深い

■ 穿刺ボタン

黄色でわかりやすく押しやすいボタンです。

■ ケース

■ ストラップ穴

ひもを通すことができます。

■ 取りはずしレバー

穿刺針に触れずに廃棄できます。
廃棄時、穿刺針にリキャップは不要です。
軽い力で取りはずすことができます。

操作がさらに簡単に

保護キャップをねじ切る手間がいりません。
廃棄時に保護キャップをつける手間もいりません。

感染防止

穿刺部位に触れる部分はディスポーザブルです。
使用後取りはずした穿刺針は、再装着できません。

誤穿刺防止

穿刺時以外は針先が露出しない安心設計。
再穿刺はできません。

痛みへの配慮

痛みを最小限に抑えます。

一般的名称	商品名	仕 様	統一商品コード	分類・届出/認証番号
採血用穿刺器具	ナチュラレット EZ デバイス	1本	486803201	一般医療機器 (クラス I) 33B2X00002000002
単回使用自動 ランセット	ナチュラレット EZ 25本入	200本入 (25本入×8箱)	486803225	管理医療機器 (クラス II) 220AFBZX00065000
	ナチュラレット EZ 30本入	240本入 (30本入×8箱)	486803232	

※商品の外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

発 売 元 **アークレイ株式会社**

製造販売元 **株式会社旭ポリスライダー**

販 売 元 **アークレイ マーケティング株式会社**

東京本社 営業統括本部

〒160-0004 東京都新宿区四谷 1-20-20 大雅ビル 4F

TEL. 050-5527-7700 (代)

URL <http://www.arkray.co.jp/>

お問い合わせ先

担 当

アークレイ コールセンター 6:00~22:00
(年中無休)

0120-81-1955