

スキャンソニックゲル 3.8L

ポリソニックローションゲル 3.8L

取扱説明書

このたびはパーカーラボラトリー社製「スキャンソニックゲル 3.8L」・[ポリソニックローションゲル 3.8L]をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。「スキャンソニックゲル 3.8L」・[ポリソニックローションゲル 3.8L]は超音波検査用の粘性ゲルです。

注文コード	品番	商品名	内容量	入数
M00-000-21	11-28S	スキャンソニックゲル, 3.8 リットル	3.8L/本	4本/箱
M00-000-31	21-50	ポリソニックローションゲル, 3.8 リットル	3.8L/本	4本/箱

附属品 250mLの空ボトル×2本、詰替え用ポンプ×1本



注意

1. 医師、検査技師等の医療従事者以外は使用しないで下さい。
2. 超音波検査の目的以外には使用しないでください。
3. 本品の使用により、患者及び使用者に発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止して下さい。
4. 本品はパラベンを含有しているため、敏感な方には使用しないでください。
5. 健常皮膚以外には使用しないで下さい（粘膜・体液等との接触は意図しておりません）。
6. 蓋をしっかりと閉めて保管してください。

使用方法について

<詰め替え>

1. 詰替え用ポンプを3.8Lの容器に取りつけます。
2. ゲルを3.8Lの容器から250mLの空ボトルに適量分を分注します。

<使用方法>

1. ボトルから直接、適量のゲルを取り、皮膚に塗布してください（皮膚面での必要な塗布の量や面積は、皮下の検査対象組織の形に依ります）。
2. 検査終了後、皮膚上に残ったゲルは乾いたタオル等で拭き取ってください。

使用期限

使用期限は製品及び外箱に表示しています。

保 管

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管してください。

連 絡 先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>