

アクアソニック 100 ゲル 5L

アクアソニッククリアゲル 5L

取扱説明書

このたびはパーカーラボラトリー社製「アクアソニック 100 ゲル 5L」・「アクアソニッククリアゲル 5L」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。「アクアソニック 100 ゲル 5L」・「アクアソニッククリアゲル 5L」は超音波検査用の粘性ゲルです。

注文コード	品番	商品名	内容量
M00-000-03	01-50	アクアソニック 100 ゲル, 5 リットル (250ml 空ボトル 1 本付)	5L
M00-000-13	03-50	アクアソニッククリアゲル, 5 リットル (250ml 空ボトル 1 本付)	5L

附属品 250mL の空ボトル×1 本



注意

1. 医師、検査技師等の医療従事者以外は使用しないで下さい。
2. 超音波検査の目的以外には使用しないでください。
3. 本品の使用により、患者及び使用者に発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止して下さい。
4. 本品はパラベンを含有しているため、敏感な方には使用しないでください。
5. 健常皮膚以外には使用しないで下さい（粘膜・体液等との接触は意図しておりません）。
6. 蓋をしっかりと閉めて保管してください。

使用方法について

＜詰め替え＞

ゲルを 5L の容器から付属の 250mL の空ボトルに適量分を分注します。

＜使用方法＞

1. ボトルから直接、適量のゲルを取り、皮膚に塗布してください（皮膚面での必要な塗布の量や面積は、皮下の検査対象組織の形に依ります）。
2. 検査終了後、皮膚上に残ったゲルは乾いたタオル等で拭き取ってください。

使用期限

使用期限は製品及び外箱に表示しています。

保管

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管してください。

連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>

<注意>

1. 健常皮膚以外には使用しないでください（粘膜・体液等との接触は意図しておりません）。
2. 本品の使用により、患者及び使用者に発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止してください。
3. 本品はパラベンを含有しているため、敏感な方には使用しないでください。
4. 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管ください。
5. 使用期限はチューブ最上部に表示しています。
6. 蓋をしっかりと閉めて保管してください。

2017年07月27日制定

村中医療器株式会社

<注意>

1. 健常皮膚以外には使用しないでください（粘膜・体液等との接触は意図しておりません）。
2. 本品の使用により、患者及び使用者に発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止してください。
3. 本品はパラベンを含有しているため、敏感な方には使用しないでください。
4. 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管ください。
5. 使用期限はチューブ最上部に表示しています。
6. 蓋をしっかりと閉めて保管してください。

2017年07月27日制定

村中医療器株式会社

<注意>

1. 健常皮膚以外には使用しないでください（粘膜・体液等との接触は意図しておりません）。
2. 本品の使用により、患者及び使用者に発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止してください。
3. 本品はパラベンを含有しているため、敏感な方には使用しないでください。
4. 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管ください。
5. 使用期限はチューブ最上部に表示しています。
6. 蓋をしっかりと閉めて保管してください。

2017年07月27日制定

村中医療器株式会社

<注意>

1. 健常皮膚以外には使用しないでください（粘膜・体液等との接触は意図しておりません）。
2. 本品の使用により、患者及び使用者に発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止してください。
3. 本品はパラベンを含有しているため、敏感な方には使用しないでください。
4. 高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管ください。
5. 使用期限はチューブ最上部に表示しています。
6. 蓋をしっかりと閉めて保管してください。

2017年07月27日制定

村中医療器株式会社