

アクアソニック 100 ゲル (滅菌済)

取扱説明書

このたびはパーカーラボラトリー社製「アクアソニック 100 ゲル (滅菌済)」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

「アクアソニック 100 ゲル (滅菌済)」は超音波検査用の粘性ゲルです。

注文コード	品番	商品名	内容量	入数
M00-000-10	01-01	アクアソニック 100 ゲル, 20g, 滅菌	20g/パック	48 パック/箱



注意

1. 医師、検査技師等の医療従事者以外は使用しないで下さい。
2. 超音波検査の目的以外には使用しないでください。
3. 本品の使用により、患者及び使用者に発疹・発赤・かゆみ等の症状があらわれた場合には、直ちに使用を中止して下さい。
4. 本品はパラベンを含有しているため、敏感な方には使用しないでください。
5. 健常皮膚以外には使用しないで下さい (粘膜・体液等との接触は意図しておりません)。
6. 本品は滅菌済み製品です。再使用しないでください。
7. 滅菌包装が破損している場合には使用しないでください。

使用方法について

<使用方法>

1. 滅菌パックからゲルの入った袋を取り出し、切り取り口を切り取ります。
2. 袋から適量のゲルを取り、皮膚に塗布してください (皮膚面での必要な塗布の量や面積は、皮下の検査対象組織の形に依ります)。
3. 検査終了後、皮膚上に残ったゲルは乾いたタオル等で拭き取ってください。

使用期限

使用期限 (滅菌有効期限) は製品及び外箱に表示しています。

保管

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管してください。

連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>