

3ステップの簡単操作で、装着の手間や時間を削減。

ベルトや面ファスナーを調整するだけの簡単な操作でスピーディーに装着完了。装着の手間や時間を削減します。

装着手順



※ベルトをきつく締めすぎると血行を妨げるおそれがあります。締め加減は医師の指示に従ってください。※ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みください。



リストケア・プロ Wristcare-Pro

種類	商品コードNo.	規格(手首周囲)	1箱入数
右	L~LL 17501	16~19cm	1コ
	S~M 17502	13~16cm	1コ
左	L~LL 17511	16~19cm	1コ
	S~M 17512	13~16cm	1コ

リストケア・プロ Wristcare-Pro



手関節サポーター
Wrist Supporter

EBMにもとづく
手関節のケアと
多様な保持法の提案



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9:00~午後5:00

●本カタログの内容は2015年7月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EJPAのシルバー基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています。EJPA:環境保護印刷推進協議会 http://www.ejpa.com

EBMの確立と高い汎用性を実現。 手関節サポーター《リストケア・プロ》

ドクターとのパートナーシップから生まれた
《リストケア・プロ》。

EBMを確立した手関節サポーターとして、
医療の現場に革新的なソリューションを提供します。


さらに、付属品の併用で手関節保持の
多様なニーズに対応可能。

高い汎用性を発揮し、経済性にも優れています。



装具1つで多様な保持法に対応

付属のアルミステー
やマルチストラップ
の併用など、通常の
装着手順にひと手間
加えるだけで、適応
部位や装着シーンに
応じたさまざまな保
持法に適用します。

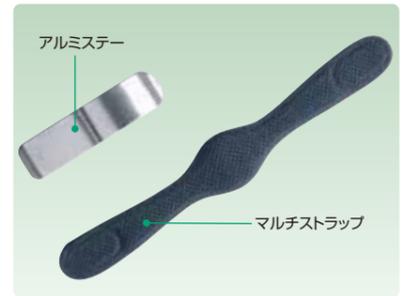

スポーツ時に



本体凸部を内側に折り返して使用。手関節を
的確に保持しながら、把持運動を妨げません。

拇指の保持に



マルチストラップを拇指に巻き付けて使用。
拇指を安定した状態に保持します。

保持力のアップに



ステーカバーの中にアルミステーを入れて
使用し、手関節の動きを制限。マルチス
トラップを手のひら側にとめることで、さらに
保持力がアップします。

※写真はイメージです。

簡単な操作で、尺骨周囲を確実に圧迫

EBMにもとづく優れた商品設計に
より、尺骨周囲を圧迫し、的確に保持
します。また、本体と一体構造のベル
トで圧迫力を自在に調整でき、簡単
かつスピーディーに装着することが
可能です。



尺骨周囲を圧迫し、的確に保持する伸縮ベルト

ADLを考慮した快適な装着感を提供



通気性・フィット感

通気性が高く柔らかなメッシュ素材を採用。ムレにくく、フィット性
に優れています。

軽量

素材の強度や耐久性を確保しながら、軽量化を追求。長時間の
装着に対する負担を軽減します。

清潔

アルミステー以外は、丸ごと洗濯することが可能。いつでも清潔
な状態で装着できます。