


# 固定型折りたたみ式歩行器

## 取扱説明書

### 1. 安全上の警告・注意

- 1) 歩行訓練用、歩行補助用以外の用途には使用しないでください。
- 2) 本品は歩行を補助するものですので、全体重をかけないでください。
- 3) 本品を改造しないでください。
- 4) 本品の各部に破損又は変形等の異常がみられたときは使用しないでください。
- 5) 濡れている場所、滑りやすい場所、でこぼこしている場所では不安定となり危険ですので、使用しないでください。
- 6) 本品を火気に近付けないでください。
- 7) 足首まであるようなすその長い衣服を着用して使用する場合は、足もとにご注意ください。
- 8) 本品を使用される前に、医師又は専門家にご相談されることをお勧めします。

### 2. 製品概要

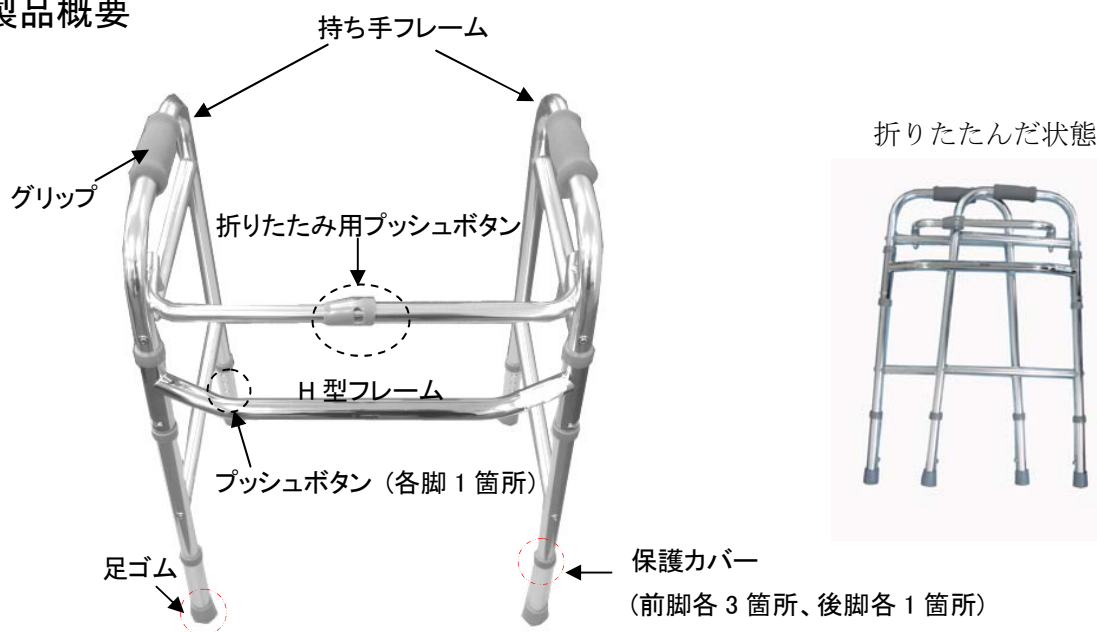

#### 1) 材質

本体：アルミニウム  
H 型フレーム：スチール  
グリップ：EVA

#### 2) サイズ

本体：幅 600×奥行 445×高さ 805～905mm (25mm ピッチで 5 段階調節)  
折りたたみ時：幅 595×奥行 100×高さ 810mm  
脚先径：φ28mm  
重量：2.5kg

#### 3) 耐荷重：100kg

### 3. ご使用の前に

- 1) 両側のグリップを握って持ち手フレームを順に左右に開き、カチッと音がするまで広げます。



#### ⚠ 注意

折りたたみ用プッシュボタンが大きく飛び出していることを確認してください。

折りたたみ用プッシュボタン



- 2) 平らな面に置き、がたつきがないか確認してください。

- 3) 脚部の高さを調節します。

患者が、フレームの間に自然な姿勢で立ち、腕の力を抜いて手を下ろした時の手首の位置に、グリップがくるようにします。

#### ⚠ 注意

腰が曲がって前傾姿勢の場合は、その姿勢で立ち、床から頭までの高さの半分くらいで調整します。

#### ⚠ 注意


- ① 高さ調節の際は、脚部のプッシュボタン4箇所を脚先が同じ高さになるように固定してください。固定が不完全な場合は本品が傾き、転倒するおそれがあります。
- ② 本品には、プッシュボタンによる固定が4箇所ありますので、プッシュボタンがすべて固定穴から大きく飛び出ていることを確認してください。
- ③ プッシュボタンを深く押し込みすぎると脚パイプ（下部）の中に入り込んでしまう場合があります。その際は、いったん脚パイプ（下部）を引き抜き、プッシュボタンの位置を確認しながら再度取り付けてください。

プッシュボタンが大きく  
飛び出た状態



- 4) 使用前に、各部に破損又は変形等がないかを点検してください。

## 4. 使用方法

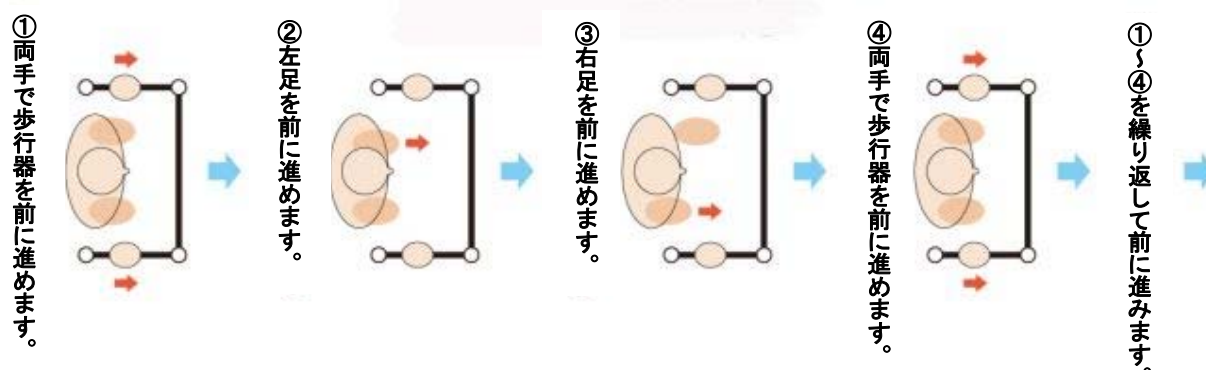

## 5. お手入れと保管方法

### 1) お手入れ

- ① ご使用後は、汚れや水ぬれを柔らかい布で拭き取って、乾燥させてください。
- ② 汚れがひどいとき、汚れが落ちにくいときは中性洗剤又は消毒用アルコール液を含ませた柔らかい布で清拭してください。

### 2) 点検

- ① 各部に傷、亀裂、ゆがみ、ガタつき、変形がないことを確認してください。
- ② グリップがゆるんでいないか確認してください。
- ③ プッシュボタンはスムーズに動くか、ネジ・ナットの緩みがないかを確認してください。
- ④ 足ゴムがすり減ったり、抜けやすくなっている場合は、新しい足ゴムに交換してください。

**※保管する前に各部を点検し、異常のないことを確認してください。もしも、異常を認めた場合はお買い上げの販売店にご相談ください。**

### 3) 保管方法

- ① 一方の手で折りたたみ用プッシュボタンを押しながら、もう一方の手で片側の持ち手フレームを内側にたたみます。
- ② 折りたたみ用プッシュボタンを離し、もう片側の持ち手フレームを同様に内側にたたみます。



**注意**

手や指を挟まないようご注意ください。

- ③ 折りたたんだ後は、本品が倒れない安定した場所で保管してください。

## 6. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546

<http://www.muranaka.co.jp/>

| 注文コード      | 品番     | 商品名                                      |
|------------|--------|------------------------------------------|
| 502-022-43 | HA2004 | 固定型折りたたみ式歩行器                             |
| 502-022-76 | HA9002 | 足ゴム, 固定型/交互型折りたたみ式歩行器, (502-022-43/45 用) |