

折りたたみステッキ 取扱説明書


1. 安全上の警告・注意

- 1) 杖としての用途以外に使用しないでください。また、本品は歩行を補助するためのもので、全体重を支えることはできません。
- 2) 杖に亀裂や変形がある場合は、折れるおそれがありますので使用しないでください。
- 3) お使いになる前に各部を点検してください。
- 4) 足ゴムが破れたり、すり減ったり、抜けやすくなった場合は、新しい足ゴムと交換してください。
- 5) 斜めに杖をついたり、濡れた路面や雪道等の滑りやすいところ、段差のあるところでは、じゅうぶん気をつけてご使用ください。
- 6) 支柱の接続部分が外れにくい場合は、ステッキを斜めにし、先端部で地面を軽く叩くようにして振動を与えてください。
- 7) ステッキの組立、折りたたむ際に、支柱のつなぎ目で指を挟まないよう気をつけてください。
- 8) 支柱に内蔵されたゴムロープの反動により袋からステッキが飛び出すおそれがあるため、取り出す際は必ず支柱の折り曲げた部分を持ちながら取り出してください。



2. 製品概要

代表的写真

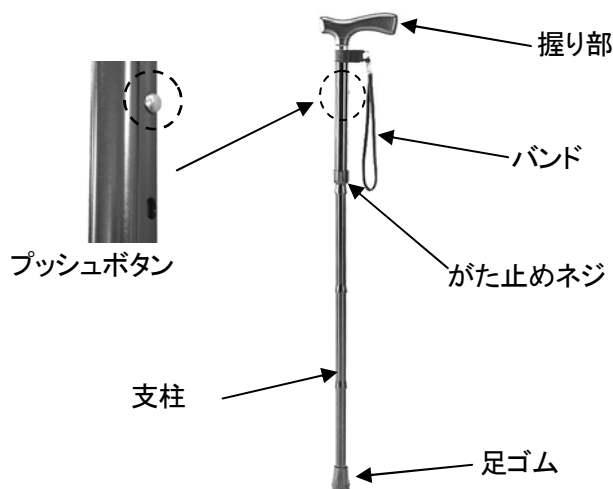

折りたたんだ状態



商品名	注文コード	品番	全長	杖先径	握り部材質	重量
アルミ製折りたたみ式ステッキ, バンド付, 木製握り	502-012-05	PW-566A	810～ 930mm	φ 17mm	木製	330g
アルミ製折りたたみ式ステッキ, バンド付, 木製握り	502-012-06	PW-589	780～ 855mm	φ 16mm	木製	265g
アルミ製折りたたみ式ステッキ, チェリー柄, バンド付, 木製握り	502-012-40	PW-589-CHERRY	780～ 855mm	φ 16mm	天然木	275g
アルミ製折りたたみ式ステッキ, ストロベリー柄, バンド付, 木製握り	502-012-41	PW-589-129SH			楓	260g

※支柱の材質はアルミニウム合金

3. 杖の長さの調節

- 1) がた止めネジを時計回りに回してゆるめます。
- 2) プッシュボタンを押し込み、支柱を上下にスライドさせて長さを調節してください。

【注文コード】

- ・ 502-012-05 : 固定穴の間隔 30mm ピッチで 5 段階調節
- ・ 502-012-05 以外 : 固定穴の間隔 25mm ピッチで 4 段階調節


⚠ 注意

調節後、プッシュボタンが固定穴から大きく飛び出ていること、
がた止めネジにゆるみがないことを確認してください。

- 3) がた止めネジを反時計回りに回してしっかりと締めます。

【杖の高さの目安】

- ・ 腕を垂直に下ろしたときの手首の位置に、握り部がくるようにします。
- ・ 腰の曲がった方は、曲がった状態で合わせてください。
- ・ 杖先をつま先の前方外側 15～20cm のところに置いたとき、体の縦の線と腕の角度が 30～40° になるようにします。

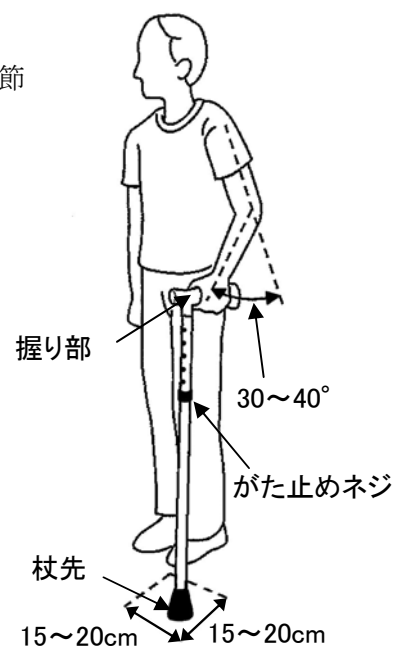

4. お手入れ・保管方法

- 1) ご使用後は、汚れや水濡れを拭き取ってください。
- 2) 汚れがひどいとき、汚れが落ちにくいときは中性洗剤を含ませた柔らかい布で清拭してください。
- 3) ストープの前、夏場の自動車内など、高温になる場所での保管は支柱内のゴムロープが劣化しやすくなるので避けてください。
- 4) 寒冷地など低温になる場所では、支柱を折りたたんだ状態からゴムロープの弾性がすぐに回復しないことがあるので注意してください。

5. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>