


アイスピック 取扱説明書


ステッキの先端に取り付けて使用し、雪道や凍った路面でステッキが滑るのを防ぎます。

取付方法

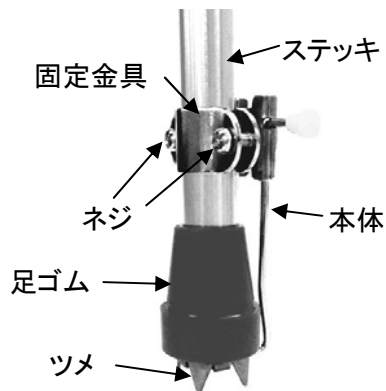

- ステッキをはさむように本体と固定金具を取り付け、ネジでしっかりと締めて固定します。その際、ツメと足ゴムの間に隙間を空けないようにしてください。
 - ステッキの径が太い場合は別添のネジ(長)を使用してください。
- 適応するステッキの外径: 16~26mm

収納方法

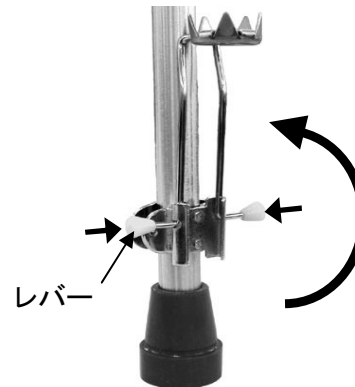

アイスピックを使用しない場合は、左右のレバーを同時に押しながら先端部を上げてください。

⚠ アイスピックのツメで足等を傷つけないようご注意ください。

販売元

村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号 TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>