

ロフストランドクラッチ

取扱説明書



はじめに

この度は、ロフストランドクラッチをご購入いただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書は、ロフストランドクラッチの正しい取扱方法について説明しています。

ロフストランドクラッチを正しくご活用いただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。

※お読みになった後は、使用する際にいつでも見られるよう、大切に保管してください。

目次

1.	安全上の警告、禁忌・禁止、注意.....	2
2.	製品概要と各部・付属品の名称・構造.....	4
3.	一般的な使用方法とその注意事項.....	5
4.	清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項.....	6
5.	保守点検に関する事項.....	6
6.	アフターサービスとその連絡先に関する事項.....	6
7.	保証.....	7

1. 安全上の警告、禁忌・禁止、注意

使用する前に、この「安全上の警告、禁忌・禁止、注意」を、よく読んで、正しくお使いください。

※ ここに示した注意事項は、製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※ 危害や損害の大きさと切迫の程度を明確にするため、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「禁忌・禁止」「注意」の三つに区分して示しています。


図記号の例	
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。
 禁忌・禁止	人が死亡または重症を負うことが想定されるため、避けるべき患者や使用方法を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
 ポイント	使用上のポイントや、確認いただきたいことを示します。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 **注意**

1. 本品は、自立歩行できる人がより安定して歩行できるよう補助的に使用する杖（歩行補助具）です。使用目的以外に使用しないでください。
2. 本品は、歩行を補助するものですので、全体重をかけないでください。
3. 本品を改造しないでください。
4. 体重をかけすぎると肩や手を痛めることがあるため、下記の方は使用しないでください。
 - ・杖無しで歩行できない方
 - ・手すりにつかまらなければ歩行できない方
 - ・介助者なしでは歩行できない方
 - ・リハビリ中等で、体重の一部を支えないと歩行できない方（医師指導の下での使用は除く）
5. 使用前に各部を点検し、傷、亀裂、変形、ガタつき等がある場合は使用しないでください。破損するおそれがあります。
6. 身体に合った長さに調節してください。斜めに杖を突くと転倒し負傷するおそれがあります。
7. 滑りやすい場所（濡れた路面、雪道等）、不安定な場所ではじゅうぶんに注意してください。転倒し負傷するおそれがあります。
8. 道路の側溝や凹みのある場所では、先端がはまり込まないようにじゅうぶん気を付けてください。
9. 本品を火気に近付けないでください。
10. 本品を使用される前に、医師又は専門家にご相談されることをお勧めします。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

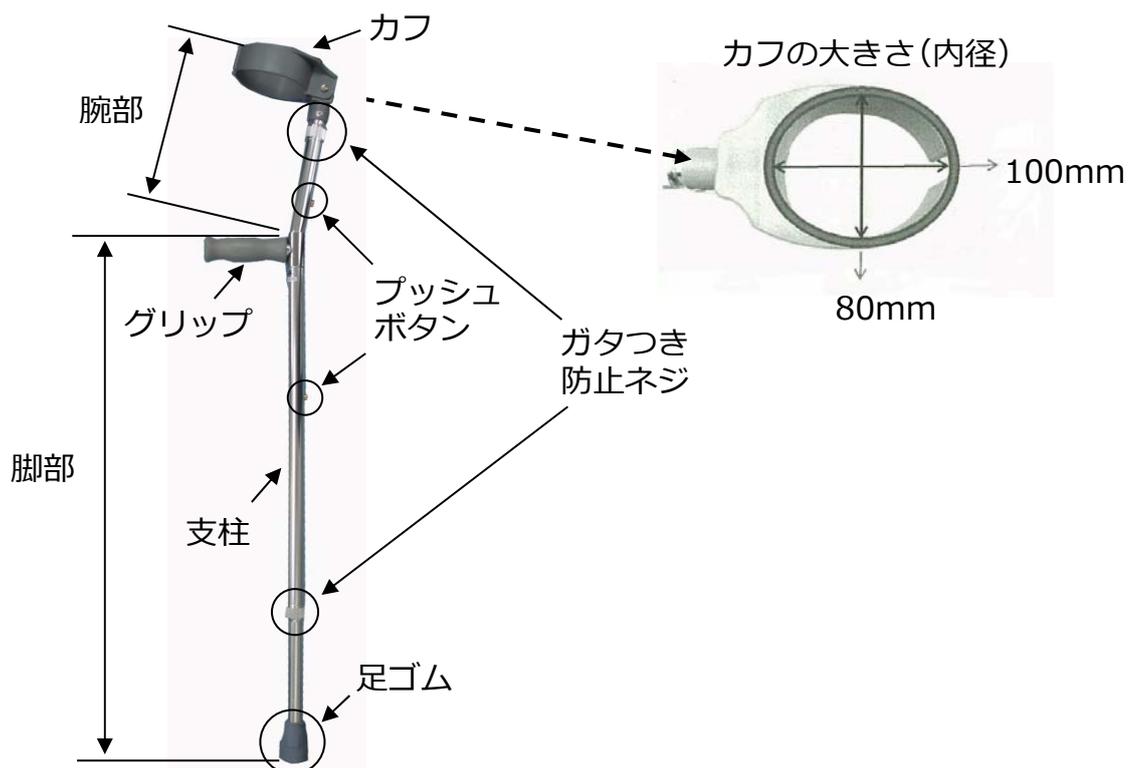

仕様

品番		HC6011	HC6012
長さ	腕部 (25mm 間隔で 4 段階調節)	245~320mm	260~335mm
	脚部 (25mm 間隔で 10 段階調節)	540~765mm	755~980mm
杖先径		Φ 22 mm	
重量		660 g	720 g
適用患者身長		150~162 cm	160~185 cm
適用患者体重		100 kg 未満	
材質		支柱 : アルミニウム カフ : ポリプロピレン グリップ : ポリ塩化ビニル	

注文コード	品番	商品名
502-022-70	HC6011	ロフトランドクラッチ (150~162cm)
502-022-44	HC6012	ロフトランドクラッチ (160~185cm)

補充品


注文コード	品番	商品名
502-022-77	HA9220	足ゴム,ロフトランドクラッチ用

3. 一般的な使用方法とその注意事項

1) ガタつき防止ネジを腕部は反時計回り、脚部は時計回りに回してゆるめ、プッシュボタンを押し込んで長さを調節します。

① 腕部は、腕の力を抜いて自然な姿勢で立ち、手を真っ直ぐ下ろした際の手首の位置にグリップがくるように調節します。

② 脚部は、グリップを杖の前方に出して握り、杖先をつま先の前方外側 15~20cm に置いた際、体の縦の線と腕の角度が 30~40°になるように調節します。

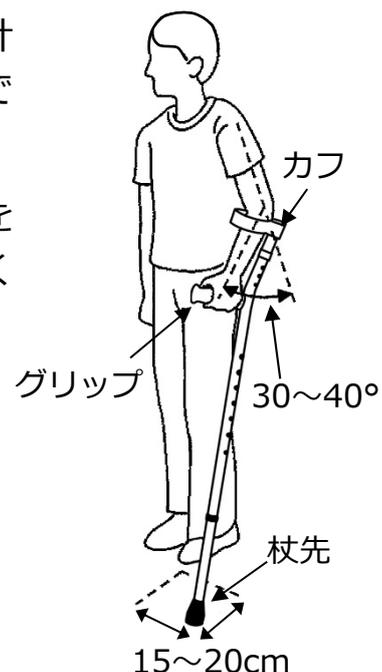

👉ポイント

カフは肘の屈曲を妨げない位置に合わせてください。

2) 2箇所あるプッシュボタンが、固定穴から大きく飛び出ていることを確認します。

プッシュボタンが
大きく飛び出た状態

👉ポイント

プッシュボタンを深く押し込みすぎると中に入り込んでしまう場合があります。押し込みすぎた場合は、一旦パイプを引き抜き、プッシュボタンをパイプの中から押し出してから再度調節してください。



3) ガタつき防止ネジを腕部は時計回り、脚部は反時計回りに回して、しっかりと固定します。

4) 使用前に平らな面に置き、各部を点検し、傷、亀裂、変形、ガタつき等がないことを確認します。

4. 清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

- 1) ご使用後は、汚れや水ぬれを柔らかい布で拭き取って、乾燥させてください。
- 2) 汚れがひどい場合や落ちにくい場合は中性洗剤又は、消毒用アルコール液を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。
- 3) 足ゴムがすり減ったり、抜けやすくなっている場合は、新しい足ゴムに交換してください。
足ゴムを交換する際は、足ゴムをねじりながら引っ張り取り外します。交換用の足ゴムを取り付ける際も、ねじりながら確実に奥まで差し込んでください。
- 4) 本品が倒れない安定した場所で保管してください。
- 5) 耐用期間：1年 [自己認証（当社データ）による]。

5. 保守点検に関する事項

- 1) 各部に傷、亀裂、ゆがみ、ガタつき、変形がないことを確認してください。異常を認めた場合はお買い上げの販売店にご相談ください。
- 2) グリップがゆるんでいないことを確認してください。
- 3) プッシュボタンがスムーズに動くこと、ネジ・ナットのゆるみがないことを確認してください。
- 4) 足ゴムがすり減っていないこと、抜けやすくなっていないことを確認してください。

6. アフターサービスとその連絡先に関する事項

輸入業者：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>

7. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 本書の提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、ロフストランドクラッチをお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: ロフストランドクラッチ
製造番号/記号:
ご芳名

ご住所

TEL. ()

お買い上げ店名

印

住所

TEL. ()

お買い上げ日 年 月 日

輸入業者: 村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号 TEL 0725-53-5546