

組立式ユーティリティカート (Y-201A)

組立説明書




1. 構成品



番号	品名	数量
①	上段棚板	1
②	棚板	1
③	キャップ	4
④	キャスター	4
⑤	支柱	4

2. 組立方法

1. 上段棚板の孔(4箇所)にキャップを取り付けます。その際、キャップと上段棚板の孔底にある4箇所の切り込みを合わせるようにします。

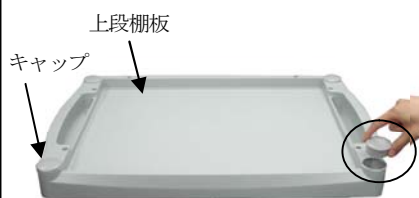

2. 上段棚板を裏返します(以降の作業がしやすくなります)。上段棚板の孔(4箇所)に支柱のネジ部側を差し込み、時計方向に回してキャップに固定します。



3. 棚板を裏返し、支柱の先(4箇所)に棚板の孔をしっかりとはめ込みます。



4. 棚板の孔(4箇所)にキャスターを差し込み、時計方向に回して固定します。



5. 本品をひっくり返して元に戻します。



3. 販売元

村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号 TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>

注文コード	品番	商品名
030-140-94	Y-201A	組立式ユーティリティカート, 二段