

無菌性保証レベル (SAL) 10^{-6} 以下を達成

充実した機能で、医療現場の信頼を支える、使いやすい全自動高圧蒸気滅菌器

タカゾノの「SteriWit(ステリウィット)」は、改正薬事法に適合し、滅菌・乾燥後の冷却時間が不要で、連続運転ができる優れた性能や、液晶モニターでの直感的操作など、いままでにない機能を備えた全自動高圧蒸気滅菌器です。さらに、耳障りな排蒸音を大幅に抑え、メンテナンスのしやすさにも徹底してこだわりました。毎日使う医療機器だからこそ、安全で安心、そして使いやすさで選んでいただきたい、全自動高圧蒸気滅菌器の自信作です。



改正薬事法
適合機種

全自動高圧蒸気滅菌器

SteriWit SS-TA1N1
ステリウィット



見やすく直感的に操作できるパネルデザイン

操作に必要な情報を、新たに採用した液晶モニターに表示。操作パネルのデザインも一新し、一目で分かるイラスト入りのキーを採用、カラーリングの統一などで、操作性と視認性を大きく向上させました。



液晶モニター

操作に必要な情報を一元的に表示。重要な情報は大きく表示するなど、見やすさ、わかりやすさにも工夫を凝らしています。

基本画面

現在の日時(年月日/時刻)、滅菌と乾燥の設定温度と時間、現在の庫内温度を表示します。

動作画面

工程ごとの設定温度と残り時間、庫内温度などを表示します。

予約設定画面

細かな時間設定が行えます。滅菌を完了させたい時刻に合わせた予約が行えます。

エラー表示

エラー内容と、必要な対処方法を表示します。

メニューキー

滅菌乾燥設定をはじめ、日付・音量・清掃メッセージ・プリンター(オプション)接続時の印字設定などが行えます。

滅菌キー


滅菌設定選択も、滅菌対象物に合わせてワンタッチ。一目で操作がわかる、視認性にすぐれたデザインです。

乾燥キー

「低温」「標準」「高温」3つの乾燥モードを搭載。滅菌物に応じて選択できます。

冷却時間が不要で連続運転も可能に! 稼働率が大幅に向上しました

2回の滅菌乾燥を行う場合

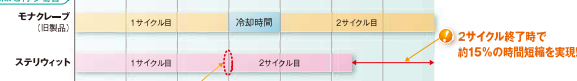

※当社製品比較
※使用温度や運転条件により稼働率は異なります。
※給水の設備までの全行程(1サイクル)に要しています。
連続運転とは、1サイクルが終了してから、次のサイクルの給水が開始されるまでの待ち時間(冷却時間)が不要で運転可能なことを指します。

二重ロックで安全性も確保

二重ロックで扉の開閉を強固にし、安全性を高めました。ハンドルの開閉時もオレンジ色のサインとエラー表示でお知らせします。また、機械式のため、万一の停電時にも扉の開閉が行えます。



セルフメンテナンスが可能なエアフィルター

庫内の空気を清浄に保つエアフィルターを前面に配置し、交換が簡単になりました。



滅菌物に応じて選べる3つの乾燥モード

「低温」「標準」「高温」、3つの乾燥モードをご用意。「高温」は、熱に強い滅菌物やすばやい乾燥に、「低温」は熱による形状変化など滅菌物損傷防止に適しています。

前面給水と、見やすい水位計

給水口は、滅菌器の扉を開けた前面に設置しているので給水作業がしやすく、設置場所を選びません。さらに給水口そばには水位計を配置し、前面から水量が確認できます。

※水道水給水タイプです。給排水を対応し、VJの場合は水道水を50°Cに加熱してください。

大幅な静音化を実現

滅菌稼働時の問題とされてきたノイズの発生を大幅に低減。機構の見直しにより、従来モデル(モノクレープ)の動作音71dBから62dBへと、静音化を実現しました。



操作は液晶モニターで案内! 抜群の使いやすさを実現しました

