

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ マイクロポア™ S
やさしくはがせる シリコンテープ





肌へのやさしさはそのまま、 より幅広い用途でお使い頂けます。

固定力


進化したシリコン系粘着剤




固定力が向上

肌へのやさしさはそのまま、より固定がしっかりできるようになりました。

皮膚への接着力 (貼付24時間後)

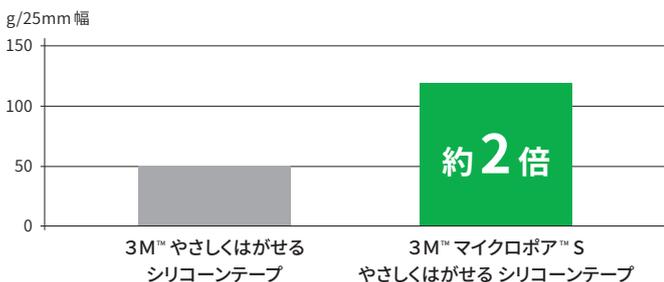

テープを重ねて貼った場合のテープ同士の接着力

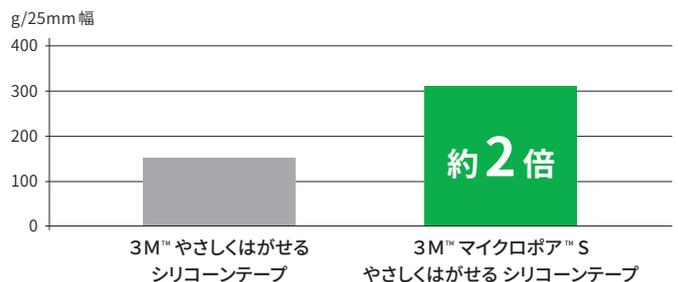

データは弊社内にて限定された条件下で測定された結果で、アプリケーションを保障するものではありません


やさしさ

肌へのやさしさはそのままに




剥がす時に痛みが少ない

やわらかい“シリコン粘着剤”は皮膚や体毛を引っ張りにくく、やさしく剥がせるので、患者様の痛みを軽減できます。

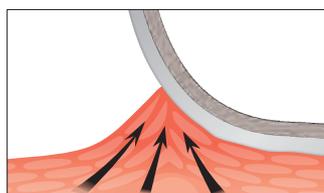

弊社アクリル系サージカルテープ

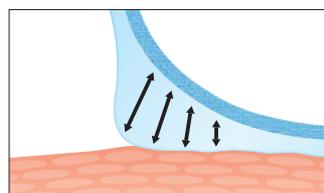


3M™ マイクロポア™ S やさしくはがせる シリコンテープ




貼り直しが可能

弊社従来品に比べ、角質剥離が少ないため、テープの貼り直しが可能になります。

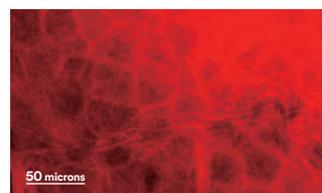

弊社アクリル系サージカルテープ

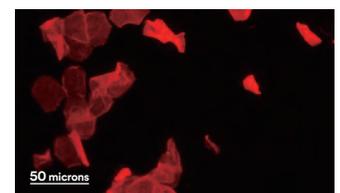

3M™ マイクロポア™ S やさしくはがせる シリコンテープ

はがしたテープに付着した角質剥離量の比較
赤く見えるのが角質です。

安心

手切れ性や防水性も備わっています



簡単に手で切れる



はさみが要らないので、簡単・安心にケアできます。



外からの水を通さず、
皮膚からの水蒸気を透過

ストーマ装具周囲などシャワーの水から保護したいときに便利です。

*表面の不織布に付いた水は上からタオルなどで軽くふきとることですぐに乾きます。

*テープを上から押さえ隙間ができていないか確認してください。



清潔に保てる

エッジキャップがついているのでテープが汚れにくいです。



エッジキャップ

汎用性

様々な用途でお試し頂けます

新シリコーン系粘着剤で固定力が向上したことにより、しっかり固定したい用途にもお使い頂けるようになりました。



ガーゼ固定などに



ストーマ装具周囲の補助固定に

*面板の下にテープを貼付しないでください。



脆弱な皮膚に



顔まわりなどの繊細な場所に



チューブ固定の補助に



透析回路の固定に



特にこんな部署で
ご使用頂いています

- 化学療法室
- 皮膚科

- 産婦人科
- 形成外科

- 小児科
- 透析室

3M™ マイクロポア™ S やさしくはがせる シリコンテープ

スタンダードパック

製品番号	テープ幅×全長	エッジキャップ	入れ目 巻/箱	希望病院価格 円/箱	1巻当り価格 円/巻
	mm×m				
2770-1	25×5	あり	12	9,000	750
2770-2	50×5	あり	6	9,000	1,500



個包装パック *1巻ずつ小箱に入ったタイプです。

製品番号	テープ幅×全長	エッジキャップ	入れ目 巻/箱	希望病院価格 円/箱
	mm×m			
2775-1	25×5	あり	1	800
2775-2	50×5	あり	1	1,600

価格は税抜きです。



3M™ やさしくはがせる シリコンテープ

個包装パック *1巻ずつ小箱に入ったタイプです。

製品番号	テープ幅×全長	エッジキャップ	入れ目 巻/箱	希望病院価格 円/箱	1巻当り価格 円/巻
	mm×m				
2775-0	19×5	あり	12	7,440	620


価格は税抜きです。



*2775-0は2021年に3M™ マイクロポア™ S やさしくはがせる シリコンテープに変更予定です。


肌にやさしいテープでも、使い方を誤ると皮膚トラブルの原因となることがあります。テープを貼る前に皮膚を清潔にし、下の図のように、貼るとき、はがすときの基本テクニックを守って使いましょう。

しっかり貼るための基本テクニック

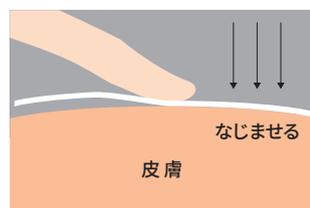

皮膚やチューブに指の腹で優しく圧着し、なじませるように貼ることでより安定した粘着力が得られます。

剥離刺激を減らすための基本テクニック

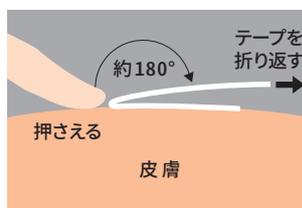

本品をはがす場合は、皮膚の負担を軽くするため、テープを約180度に折り返し、皮膚が持ち上がらないように手で押さえながら、体毛の方向に逆らわずゆっくりとはがしてください。

ご使用上の注意

- 貼付時**
- 本品はISO-10993に従った生物学的安全性評価済み*のシリコン系粘着剤を使用しておりますが、粘着性製品により皮膚トラブルを起こしやすい方や、アレルギー体質の方は事前に医師にご相談ください。
 - 本品は未滅菌です。創部、穿刺部などの無菌手技が必要とされる部位や皮膚に異常のある部位に直接貼らないで下さい。
 - テープを貼る前に、皮膚を清潔にし、消毒薬などの液体は完全に乾かしてください。
 - 皮膚の状態や医療器材の材質によってはつきにくい場合があります。フッ素系樹脂の表面にはほとんど粘着しません。
 - 固定力が必要な用途では、テープが粘着する面積を大きくする等、必要に応じて補強の固定を追加してください。
 - 貼付箇所の表面に油分や水分が有るとつきにくい場合があります。
 - 臨床上必要な場合以外はテープや皮膚をひっぱらずに貼り、しっかりと圧着してください。
 - 同一箇所への繰り返しの貼付は皮膚にダメージを蓄積させることがございます。
 - 本品を重ねて貼る場合には、固定力を十分にするためにしっかりと圧着して下さい。

*3Mのテープ製品は、細胞毒性、皮膚刺激性、皮膚感作性(アレルギー反応)が十分に低いことが確認された材料を使用しています。(全ての方にアレルギーが起きないという訳ではありません。)

3M、マイクロポアは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社

医療用製品事業部

<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2019. All Rights Reserved.
HPM-916-A(1219)SE

2019年12月発行

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)