

Swann-Morton

PRODUCTS CATALOGUE

スワンモートン製品カタログ



Swann-Morton®



KLEENブレード	3・4
ディスポーザブルスカルペル	5・6
替刃メス	7
替刃メス用ハンドル	8
ブレードリムーバー	8
ブレードリムーバーユニットボックス	8
マイクロ替刃メス	9
マイクロ替刃メス用ハンドル	9
シグネティック専用メス刃	10
シグネティックハンドル	10
メジャー替刃メス	11
メジャー替刃メス用ハンドル	11

Safe, **KLEEN**
and easy to
use

KLEENブレード



安全・清潔・使いやすい

オールインワンブレード

安全な器械出しおよび医療従事者の創傷事故発生リスクを低減します。

KLEENブレードは、従来から院内システム内に流通している標準的な替刃メスハンドルで使用できるように設計されているので、従来の作業手順を変更する際に発生すると思われる混乱やコスト問題を低減します。

この製品は2つの射出成形部品で構成されており、標準的な替刃を封入しています。

替刃部分は露出していないので、替刃メスハンドルへの取り付け、取り外し時に起こる可能性のある創傷事故から医療従事者を保護します。


使用方法

1




本品にハンドルを差し込みます。正しく装着されるとカチッと音がします。

2

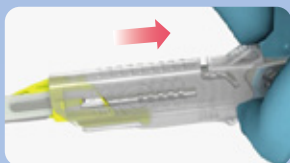



本品のキャッチレバーを指で押さえるとロックが解除されますので、そのままカバーをハンドル側へスライドさせて使用します。カバーは完全に止まるところまでスライドさせます。

3

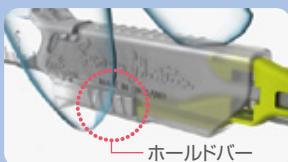


刃を前方へ真っすぐ押し込むように使用する際はカバーのずれ防止のためにホールドバーを指で軽く押さえてください。

4

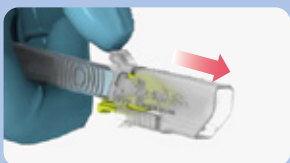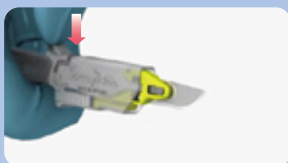

使用しないときに再度カバーを被せる際は、キャッチレバーを指で押さえて、そのまま刃側へスライドさせます。スライドさせたカバーはカチッと音がする場所で固定されます。

5

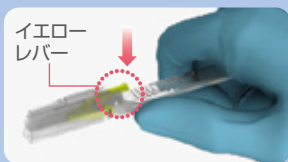

本品をハンドルから外す時は、キャッチレバーを手前に向けた状態でイエローレバーを指で押し下げながら真っすぐハンドルから引き抜いてください。

KLEENブレード

規 格	No.10	No.11	No.11P	No.15	No.15T
刃形状					
品 番	5701	5703	5791	5705	5792
注文コード	567-002-01	567-002-02	567-002-03	567-002-04	567-002-05
標準価格	¥13,600	¥13,600	¥13,600	¥13,600	¥13,600

	No.20	No.21	No.22	No.23	No.24
	5706	5707	5708	5710	5711
	567-002-06	567-002-07	567-002-08	567-002-09	567-002-10
	¥13,900	¥13,900	¥13,900	¥13,900	¥13,900

材 質：(刃)ステンレス鋼 (イエローレバー)ABS樹脂
 対応替刃メスハンドル：(567-002-01～05)No.3・7・3L (567-002-06～10)No.4・4L
 入 数：1箱(50個入)

※γ線滅菌済

管理医療機器
 認証番号：223ADBZX00042000
 販 売 名：スワンモートン替刃メス



スマートフォン・タブレット端末より
 商品の説明動画をご覧いただけます。

※KLEENブレードはBS EN 27740、ISO 7740に適合するハンドルを使用してください。

Disposable Scalpels

管理医療機器
 認証番号: 223ADBZX00041000
 販売名: スワンモートンディスポーザブルスカルペル

ディスポーザブルスカルペル 各1箱(10本入) ※γ線滅菌済


病棟、救急、外傷センターや野外での救急活動等の様々な場面でご使用いただけます。
 刃先はステンレススチール製滅菌済スカルペル。

ハンドル裏面はすべてスケール仕様になっています。



規格

No.10

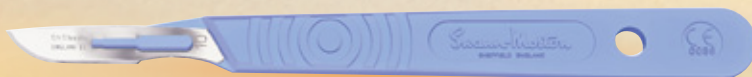

品番

0501

注文コード
標準価格

567-001-21
¥1,000

No.10A



0502

567-001-22
¥1,000

No.11



0503

567-001-23
¥1,000

No.12



0504

567-001-24
¥1,000

No.14



0519

567-001-33
¥1,000

No.15



0505


567-001-25
¥1,000

No.15C



0521

567-001-34
¥1,000

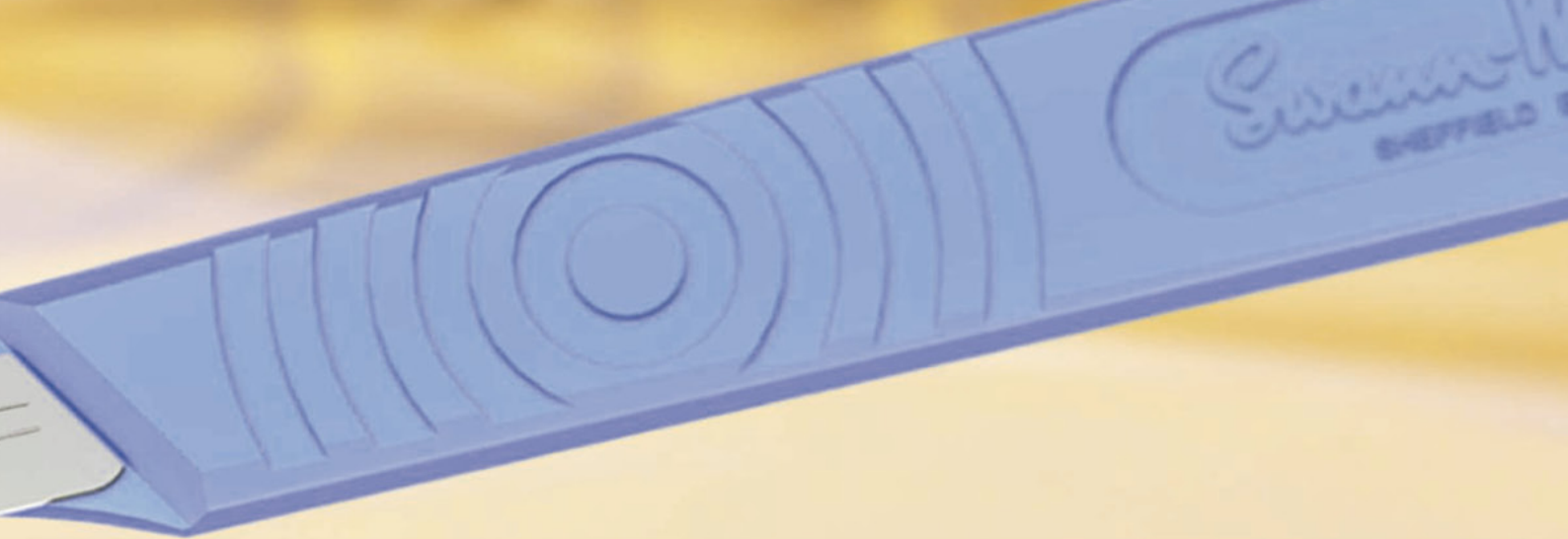


No.20



0506

567-001-26
¥1,000

No.21

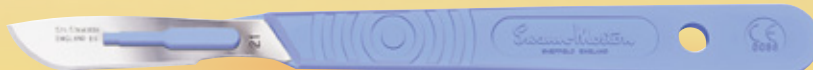

0507

567-001-27
¥1,000

No.22



0508

567-001-28
¥1,000

No.22A



0509

567-001-29
¥1,000

No.23



0510

567-001-30
¥1,000

No.24



0511

567-001-31
¥1,000

No.25



0512

567-001-32
¥1,000

Surgical Blades

管理医療機器
 認証番号: 223ADBZX00042000
 販売名: スワンモートン替刃メス

替刃メス 各1箱(100枚入) ※**γ線滅菌済** カーボンスチール製の滅菌済替刃です。

◆ No.3 , No.7, No.3L 替刃メスハンドル対応

規格

No.10



No.10A



No.11



品番

0201

0202

0203

注文コード

567-001-01

567-001-02

567-001-03

標準価格

¥4,800

¥4,800

¥4,800

No.12



No.15



No.15A



0204

567-001-04

¥4,800

0205

567-001-05

¥4,800

0220

567-001-15

¥4,800

No.15C



No.D15



No.15T



0221

567-001-16

¥4,800

0265

567-001-17

¥4,800

0292

567-001-18

¥4,800

● No.4 , No.4L 替刃メスハンドル対応

No.20



No.21



No.22



0206

567-001-06

¥4,800

0207

567-001-07

¥4,800

0208

567-001-08

¥4,800

No.22A



No.23



No.24



0209

567-001-09

¥4,800

0210

567-001-10

¥4,800

0211

567-001-11

¥4,800

No.25



No.26



No.27



0212

567-001-12

¥4,800

0213

567-001-13

¥4,800

0214

567-001-14

¥4,800

Surgical Handles

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000245
販売名: スワンモートン替刃メスハンドル

替刃メス用ハンドル

◆ No.10 ～ No.15T 替刃メス対応

規格
No.3



全長

120mm

品番
注文コード
標準価格

0933

567-001-44

¥900

No.7



160mm

0907

567-001-41

¥1,500

No.3L



210mm

0913

567-001-42

¥3,000

● No.20 ～ No.27 替刃メス対応

No.4




130mm

0934

567-001-45

¥900

No.4L

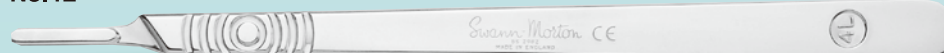

210mm

0914

567-001-43

¥3,000

Blade Remover

ブレードリムーバー ※Y線滅菌済

手術室でも使用可能な滅菌済リムーバー。
1枚仕様のディスポタイプです。

567-001-56

5502


1箱(50個入)

¥2,000

ご使用方法



替刃メスをリムーバーにセットします。

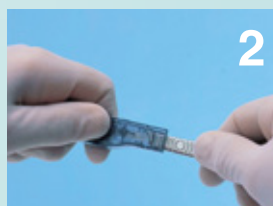

「カチッ」となるまで替刃メスをはさみこみます。



リムーバーを押さながらハンドルを引き抜くと替刃が安全に外れます。

Blade Remover Unit Box

ブレードリムーバーユニットボックス

使用済み替刃を約100枚収納し、廃棄できます。

567-001-57

5525

1箱(10個入)

¥3,000

ご使用方法



替刃メスを上向きにし、奥まで差し込みます。



リムーバー上部をしっかりと押さえます。




そのままハンドルを引き抜くと替刃が外れます。

Fine Range Blades

マイクロ替刃メス 各1箱(25枚入) ※γ線滅菌済

再建術や眼科手術、心臓外科手術、脳神経外科手術等の複雑で高度な術式でお使いいただける
ステンレススチール製滅菌済替刃。

管理医療機器
認証番号: 223ADBZX00042000
販売名: スワンモートン替刃メス

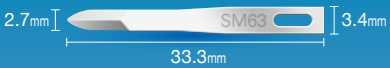規格	SM61	SM62	SM63
			
品番	5901	5902	5903
注文コード	567-001-61	567-001-62	567-001-63
標準価格	¥10,000	¥10,000	¥24,800

	SM64	SM65	SM65A
			
品番	5904	5905	5906
注文コード	567-001-64	567-001-65	567-001-66
標準価格	¥10,000	¥10,000	¥10,000

	SM67	SM68	SM69
			
品番	5907	5908	5909
注文コード	567-001-67	567-001-68	567-001-69
標準価格	¥10,000	¥10,000	¥24,800

Fine Range Handles

マイクロ替刃メス用ハンドル

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000245
販売名: スワンモートン替刃メスハンドル

SF1



全長

130mm

6051

567-001-71

¥4,800

SF2



103mm

6052

567-001-72

¥4,800

SF3



78mm

6053

567-001-73

¥4,800

SF4



53mm

6054

567-001-74

¥4,800

Cygnetic®

シグネティック

Easy to attach, easy to detach and easy to clean.


■簡単な替刃メスの着脱

レバーを垂直方向に上げると本体がうしろにスライドし、替刃メスを着脱できます。
レバーを元の位置に戻すと本体も元の位置に戻り替刃メスが固定されます。



■簡単な分解構造で洗浄を容易にします。

レバーを押し上げ軽くひねることで簡単に分解できるため、
洗浄の際の手間を省きます。

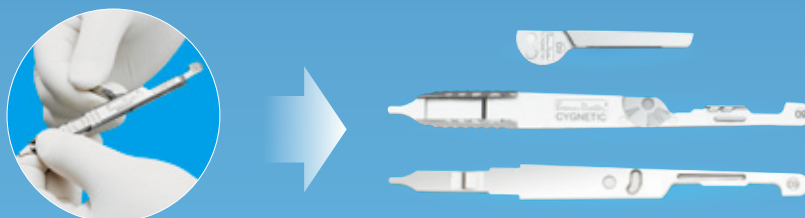

Cygnetic® Blades

シグネティック専用メス刃

ステンレススチール製シグネティック専用滅菌済替刃。

各1箱(50枚入) ※γ線滅菌済

管理医療機器
認証番号: 223ADBZX00042000
販売名: スワンモートン替刃メス



No.10

5301

567-001-81

¥4,000



No.11

5303

567-001-82

¥4,000



No.15

5305

567-001-83

¥4,000



No.20

5306

567-001-84

¥4,000

Cygnetic® Handle

シグネティックハンドル

一般医療機器
届出番号: 27B1X00024000245
販売名: スワンモートン替刃メスハンドル



全長 約124mm

5398

567-001-85

¥8,200

Major Blades

管理医療機器
 認証番号: 223ADBZX00042000
 販売名: スワンモートン替刃メス

メジャー替刃メス 各1箱(50枚入) ※γ線滅菌済

骨や関節等整形外科領域の手術用に厚めにつくられたカーボンスチール製滅菌済替刃。



規格 S
 品番 0721
 注文コード 567-001-86
 標準価格 ¥5,000

規格 U
 品番 0723
 注文コード 567-001-88
 標準価格 ¥5,000

規格 V
 品番 0724
 注文コード 567-001-89
 標準価格 ¥5,000



規格 X
 品番 0726
 注文コード 567-001-91
 標準価格 ¥5,000

規格 Y
 品番 0727
 注文コード 567-001-92
 標準価格 ¥5,000

規格 Z
 品番 0728
 注文コード 567-001-93
 標準価格 ¥5,000

Major Handles

一般医療機器
 届出番号: 27B1X00024000245
 販売名: スワンモートン替刃メスハンドル

メジャー替刃メス用ハンドル

Standard



全長
110mm

0639
567-001-94
¥1,700

Long



170mm

0640
567-001-95
¥1,700

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
 ※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
 ※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
 MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360
 総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641
 東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217
 仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448
 金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490
 村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121
 広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818
 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122
 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501
 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116
 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930
 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363