

ORTHOGLASS® NW

オルソグラス® NW (ポリエステル)

オルソグラス® NWは、スピーディーな装着および優れた快適性を実現した不織布製スプリントです。
カット時、不織布素材のエッジが柔らかいため引っかかりを防ぎます。
フェルトパッドは撥水効果があり速乾性に優れています。
この特長がスピーディーな装着と優れた快適性を可能にします。



利点


- 芯材は、不織布製のためカットしてもエッジは柔らか
- フェルトパッドは、撥水効果があり速乾性に優れ、快適性を維持
- 高いX線透過性を備えているため、レントゲン撮影時の取り外しが不要となり、検査および治療時間の短縮が実現
- パッドを濡らさずにスプリントを硬化でき、肌の快適性を維持

適用

下記に対する部分的または完全な固定：


- 捻挫
- 軟部組織、関節囊または靱帯の損傷
- 腱損傷
- 骨折
- 軟部組織損傷や亀裂のサポート

素材：
ポリエステル不織布
コーティング：
水硬化性ポリウレタン樹脂

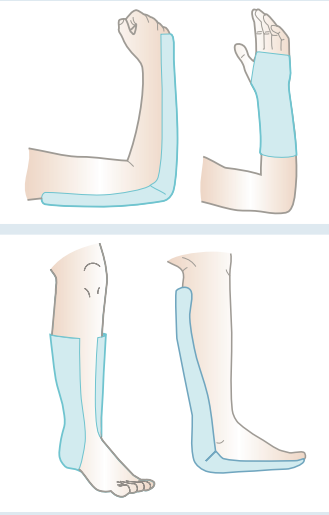


ロールタイプの装着手順

1

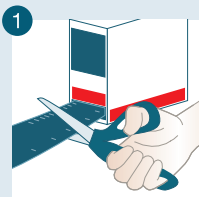


患部の形状、大きさに応じて本品の中から適したサイズを選び、適当な長さにカットします。

2

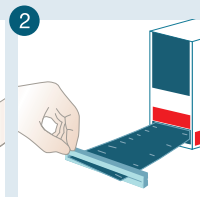


カットした残りのオルソグラス®NWは、自然硬化を防ぐため、すぐにホイルバックの中に数センチ折り返して完全に収め、付属のクリップでしっかりと封をしてください。この時ホイルはしわの無いように、また中の空気はできるだけ抜くようにしてください。

3

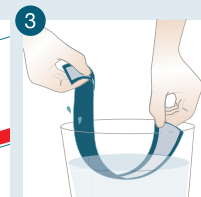


カットしたオルソグラス®NW全体を水に浸し、パッドに残った水分をしぼり、タオル等で余分な水分を取り除きます。

4

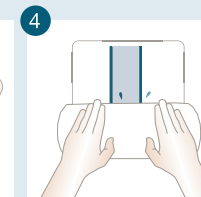


スプリントをタオルで包み、きつく巻いて、さらに余分な水分を取り除きます。

5

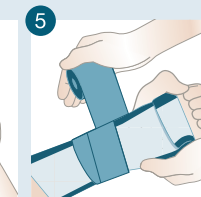

厚い方（印字がない方）の面を内側にして患部に装着します

6

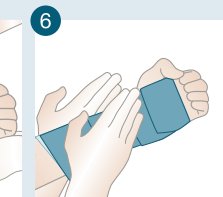

患者様の患部に合わせてモールドイングを行い、形を整えます。



品番	製品規格 (幅×長さ)	種類	1 箱入数
ORTHOGLASS® NW – オルソグラス® NW			
194502	5.0 cm x 4.5 m	2号	1 ロール
194503	7.5 cm x 4.5 m	3号	1 ロール
194504	10.0 cm x 4.5 m	4号	1 ロール
194505	12.5 cm x 4.5 m	5号	1 ロール
194506	15.0 cm x 4.5 m	6号	1 ロール
医療機器届出番号：		13B2X10405000013	