

ニチバンの極低刺激性テープ
SKINERGATE™

スキナゲート™は『安全』『安心』『快適』に貢献する、肌へのやさしさを追求したニチバンの医療用巻絆創膏の総称です。

“安全”… 肌にやさしい粘着剤ではがす時の痛みをおさえます。

“安心”… 高い皮膚粘着力で固定がしっかり行えます。

“快適”… 通気性が高く、肌のムレをおさえます。

極低刺激性テープ

スキナゲート™ スパット (スモールパック)

SKINERGATE™ SPATT

医家向品



NEW

少量タイプが
お求めやすい価格で新登場！

※内容は従来のスキナゲート™スパットと同じです。

スパット切れるから、
ハサミいらず！
グローブにつきにくい！
見た目がきれい！

テープ表面の特殊なエンボス加工により、ハサミ要らずで簡単にカット

はく離刺激の軽減

透湿性の高い基材と
アクリル系粘着剤によりムレにくい



スキナゲート™ スパット

表面を特殊加工し、ハサミがなくても、まっすぐきれいに切れるようになりました。

手で切った時の
切断面




スキナゲート™スパット 当社従来品

ハサミがなくても、
まっすぐきれいに切ることができ、
グローブにまとわりつきにくくなっています。
グローブ着用のまま作業できるので
感染リスクの軽減が期待でき、
作業時間の短縮にも貢献できます。

様々なシーンで…

軽い力で切れ、グローブにまとわりつきにくくなりました。
ケア時やドレッシングチェンジの際に時間の短縮
や感染リスクの軽減が期待できます。

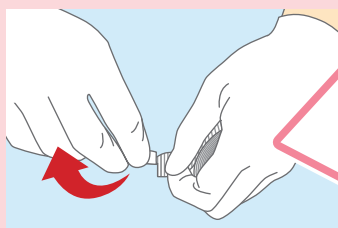

コツは
ひねり切り!

『ハサミらず』のからくりは!

1mm 間隔のエンボス加工

テープ表面に1mm間隔で
溝を作り、テープを凹凸にし
ました。
どこで切っても必ず凹部に
力が集まるので、まっすぐ切
れます。

1mm

用途

脆弱な皮膚の患者さんの

- ガーゼ固定
- カテーテル、チューブ固定
- 透析時の回路固定


使用上の注意

- 伸ばした状態で貼ると皮膚刺激の原因となります。テープは引っ張って貼らないでください。
- 傷口には直接貼らないでください。
- 体動が激しい場合やテープに負担がかかり過ぎるとはがれることがあります。
- 使用中に、発疹・発赤、水疱、表皮はく離、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止してください。
- はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。

貯蔵・保管方法

- 水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて、室温保存してください。


TMIは商標です。

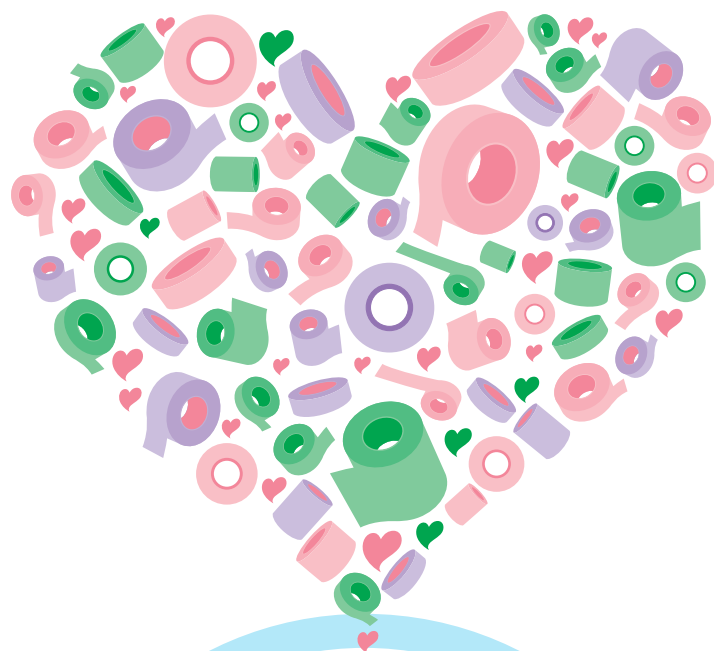

ムレにくく、 カブレにくい粘着剤

刺激の少ないアクリル系粘着剤に
通気孔を設けることで空気や水蒸気を
通りやすくしています
(透湿性:7500g/m²・24h)。
また、粘着剤が柔らかいので、
はがす際の痛みや、角質はく離が軽減されます。
(数値は当社調べ)

■ 粘着剤断面拡大イメージ図

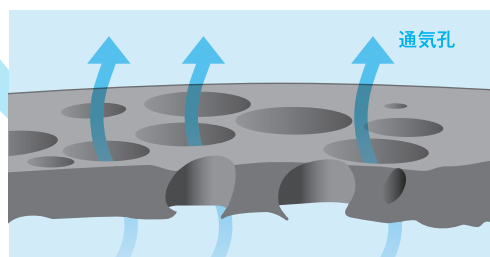

＜スモールパック＞

品番	サイズ	1箱	標準価格(税別)	JANコード
SGS12H	12mm×7m	12巻	2,350円	4987167092832
SGS25H	25mm×7m	6巻	2,350円	4987167092849

日本製
MADE IN JAPAN

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口 2-3-3 ホームページ <https://www.nichiban.co.jp/>

お問い合わせ先 ニチバン株式会社 お客様相談室 TEL 03-5978-5622
受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00(土、日、祝日を除く)