



ニチバングループはSDGs(持続可能な開発目標)の達成のために、
さまざまな取り組みを推進しています。
粘着技術を基に、快適で健康な生活に貢献しながら、
ゴール目標とターゲットに取り組んでまいります。

ニチバン株式会社

〒112-8663 東京都文京区関口2丁目3番3号 国内事業本部 医療材営業統括部
<https://www.nichiban.co.jp/>

お客様相談室	〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル	TEL (0120) 377-218	FAX (03) 5229-2330
札幌オフィス	〒060-0005 札幌市中央区北五条西5-2-12 住友生命札幌ビル	TEL (011) 231-2310	FAX (011) 231-2387
仙台オフィス	〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町8-1 斎喜センタービル	TEL (022) 390-0220	FAX (022) 390-0221
東京オフィス	〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2-26 KDX飯田橋ビル	TEL (03) 5229-7524	FAX (03) 5229-2330
名古屋オフィス	〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-16-4 BPRプレイス名古屋丸の内	TEL (052) 229-1766	FAX (052) 201-1811
大阪オフィス	〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-9-6 肥後橋ユニオンビル	TEL (06) 4803-2311	FAX (06) 4803-2300
広島オフィス	〒730-0051 広島市中区大手町2-11-2 グランドビル大手町	TEL (082) 249-1703	FAX (082) 249-1742
福岡オフィス	〒810-0011 福岡市中央区高砂1-24-20 ちくぎん福岡ビル	TEL (092) 521-1171	FAX (092) 521-1180



本カタログは環境に優しいベジタブルオイルインクを使用しています。



ぴったり技術で明日をつくる



患者様と医療を結ぶ絆を大切に

感染対策製品のご案内

お悩み1 止血ベルトを衛生的に使いたい



こんなお困りごとはございませんか？

- ☒ 止血ベルトの使いまわしが気になる
- ☒ 患者さん自身で圧迫することが難しい
- ☒ 止血ベルトの滅菌・消毒に手間がかかる
- ☒ 粘着テープによるかぶれが気になる

解決！ 自着性伸縮包帯 バトルウィン™ くっつくバンデージ™



品番	略称	サイズ	1箱	JANコード
KB38	KB38	38mm×4m〈伸長時〉	12巻	4987167064228
KB50	KB50	50mm×4m〈伸長時〉	12巻	4987167057992
KB75	KB75	75mm×4m〈伸長時〉	12巻	4987167058005
KB38L	KB38L	38mm×8m〈伸長時〉	12巻	4987167074999
KB50L	KB50L	50mm×8m〈伸長時〉	12巻	4987167075002

〔基材〕綿・ポリウレタン織布 〔自着剤〕ゴム系(天然ゴム・脱タンパク)

1 ディスポーザブルで衛生的

穿刺部に止血絆創膏を貼った上から、1周半～2周重ねて巻きます。適度な圧迫力があり、ディスポーザブルの止血ベルトとしてお使いいただけます。手で簡単に切れます。

2 皮膚にくっつかない為、かぶれの心配が少ない

包帯同士を重ねて巻くだけで簡単にくっつきます。皮膚にはつかないため、どなたでも安心してお使いいただけます。



＜使用方法＞
動画で分かりやすく
説明しています！

＜使用方法＞



約1周半～2周程度巻きます。引っ張りすぎないように注意してください。



手で切ります。



外れないように端をしっかりと密着させ、完成です。



引っ張る長さは、約1～2cm(指が1本入る程度)を目安にしてください。



端を内側に織り込んで入れると外れにくくなります。

POINT

くっつくバンデージ™は脱タンパク天然ゴムラテックスを使用しています

ラテックスアレルギーとは、天然ゴムに含まれるラテックスタンパク質がアレルゲンとなって、アレルギーを引き起こすものです。症状としては、赤み、かゆみ、じんましんなどの皮膚障害が発現し、まれに呼吸困難、血圧低下や意識障害などのアナフィラキシーショックを引き起こすことが特徴です。くっつくバンデージ™は一般的な天然ゴム製品と比べ、タンパク質量を約1/50以下に低減し、天然ゴム由来のアレルギーが生じる確率を低くしています。(重篤なアレルギー患者は除く)

TM:trademark

標準採血法
ガイドライン
GP4-A3

止血

患者自身で圧迫止血できない場合や止血が不十分になる場合を考慮し、止血用のベルトを使用するのも一法である。その場合、ベルトは使い捨てとする。

皮下血腫・止血困難

(予防)通常の患者では採血後5分程度、穿刺部位を圧迫する。必要に応じ止血ベルト等を用いる。抗凝固薬を服用している場合など、止血に時間がかかると予測される場合は、確実に止血するまで圧迫を続ける。

お悩み2 しっかりと圧迫したい



こんなお困りごとはございませんか？

- ☒ 血液が漏れて患者さんの衣服が汚れてしまうことがある
- ☒ ガーゼとテープによる圧迫は手間がかかる
- ☒ 患者さん自身で圧迫することが難しい

解決！ 圧迫止血用パッド付絆創膏(創面保護材) ステップティ™



ステップティ™ NO.80 白タイプ

品番	略称	サイズ		1箱	JANコード
		テープ部	パッド部(6mm厚)		
No.80	STP80	39mm×80mm	27mm×15mm	50枚	4987167036218

ステップティ™ NO.80A ベージュタイプ

品番	略称	サイズ		1箱	JANコード
		テープ部	パッド部(6mm厚)		
No.80A	STP80A	39mm×80mm	27mm×15mm	50枚	4987167036225

テープ部	パッド部
〔基材〕ポリウレタン不織布 〔粘着剤〕アクリル系	〔基材〕ポリエステル・セルローズ・レーヨン不織布

△使用上の注意

- ※ はがした時に必ず止血ができていないことを確認してください。
- ※ 皮膚刺激を防ぐため、2時間以内にはがしてください。

1 厚さ6mmのパッド

厚さ6mmのパッドでしっかりと圧迫し、血液を吸収します。

2 楕円形のパッドでしっかりと圧迫

楕円形のパッドが、皮膚穿刺部と血管穿刺部の2点をカバーし、しっかりと圧迫止血ができます。

＜使用方法＞



針またはカテーテルの血管刺入点
がパッドの中央になるようにパッド
をあてがい、軽く仮止めします。



当てたパッドに軽く親指をそえ、針
またはカテーテルを抜去すると同
時にパッドを強めに圧迫します。




パッドがずれないように圧迫しながら、片側の
テープを1cm(親指の幅)程度引き伸ばしま
す。はく離紙をはがしながら、皮膚に貼ります。



③と同様に反対側を貼
ります。



完成です。

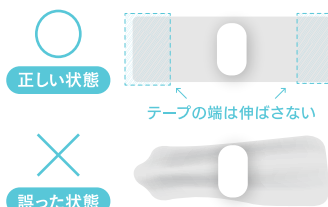


正しい状態

テープの端は伸ばさない

誤った状態

なぜテープの端を伸ばしてはいけないの？

皮膚表面に強い力が連続してかかると水ぶくれ(緊張性水疱)が生じる可能性があります。テープを強く引っ張って貼ると、テープが元に戻ろうとする力がテープの端部分に集中して加わるためです。皮膚トラブルを防ぐために、テープの端は伸ばさないで貼りましょう。

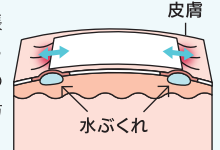

TM:trademark

標準採血法
ガイドライン
GP4-A3

ガーゼ、絆創膏およびテープ

止血

採血部位の止血のために用いる。ガーゼは個別包装された滅菌済みのものを準備しておく。

通常、抜針後5分間程度穿刺部位を圧迫する。

お悩み3 / たくさん使いたい



こんなお困りごとはございませんか？

- ☒ 採血、注射後にたくさん使いたい
- ☒ 子供が採血、注射を怖がってしまう

解決！ / 穿刺部被覆保護材 チューシャバン™



医療機器届出番号 13B2X00218131180
医療用品(4)整形用品 一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

チューシャバン™					
品番	略称	サイズ		1箱	JANコード
		テープ部	パッド部		
Sサイズ	CSV5	20mm×20mm	8mm×8mm	1000枚(10枚×100袋)	4987167029555
Mサイズ	CSV6	27mm×27mm	13mm×13mm	480枚(8枚×60袋)	4987167029562
Lサイズ	CSV7	35mm×35mm	20mm×20mm	480枚(6枚×80袋)	4987167029579

テープ部
〔基 材〕パルプ・ポリエステル不織布 〔粘着剤〕アクリル系
パッド部
〔基 材〕セルロース系不織布
△ 動脈留置針抜去後の止血には使用しないでください。

1 パッド面に触れず衛生的


パッド、粘着面に触れずに衛生的に貼ることができます。

2 ベージュ色で目立ちにくい

肌なじみの良い色のため、貼っていても目立ちにくい。



<使用方法>
動画で分かりやすく
説明しています！

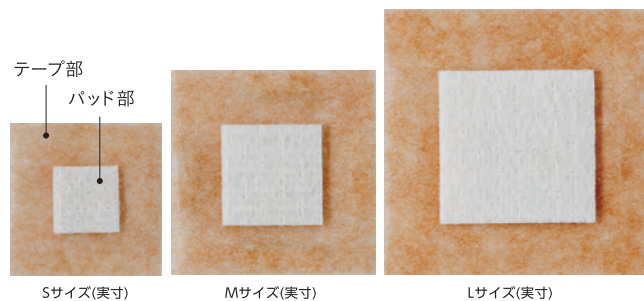

<使用方法>



解決！ / 救急絆創膏 オーキューバンエコ™ キャラクター



医療機器届出番号 13B2X00218131160
医療用品(4)整形用品 一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000



<使用方法>
動画で分かりやすく
説明しています！

オーキューバンエコ™ キャラクター					
品番	略称	サイズ		1箱	JANコード
		テープ部	パッド部		
OQEC5	OQEC5	30mmφ	13mm×13mm	90枚(キャラクター6種類：各15枚入)	4987167085452

テープ部
〔基 材〕ポリエチレンフィルム 〔粘着剤〕アクリル系
パッド部
〔基 材〕レーヨン不織布+ポリエチレンネット

サンリオの人気キャラクター6種類入り

採血、注射を嫌がるお子様のごほうびに。

TM:trademark

お悩み4 / 衛生的に使いたい



こんなお困りごとはございませんか？

- ☒ ゴミ箱に血の付いたガーゼが捨てられていることがあり、衛生的ではない
- ☒ 1つ1つ個包装の絆創膏が欲しい
- ☒ 適度な厚みのあるパッドが欲しい

解決！ / 止血用パッド付絆創膏（創面保護材） インジェクションパッド マイルド



医療機器届出番号 13B2X00218131270
医療用品(4)整形用品 一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000

インジェクションパッド マイルド					
品番	略称	サイズ		1箱	JANコード
		テープ部	パッド部		
No.30N	IJPM30N	30mmφ	10mmφ	100枚	4987167058272
No.36N	IJPM36N	36mmφ	16mmφ	80枚	4987167058289

テープ部
〔基 材〕ポリプロピレン不織布 〔粘着剤〕アクリル系
パッド部
〔基 材〕セルロース系不織布
△ 動脈留置針抜去後の止血には使用しないでください。

1 個包装で衛生的

一つ一つ個包装になっているため、患者さんごとに衛生的に貼ることができます。また、パッドに触れることなく貼れるように工夫がしてあるため、医療者の方や患者さんも安心して使うことができます。

2 皮膚にやさしい

透湿性、柔軟性に優れた粘着テープの採用により、皮膚の角質を保護し、はがす時の痛みも軽減しました。



<使用方法>
動画で分かりやすく
説明しています！



<使用方法>



※ 使用法はインジェクションパッドについても同じです。

解決！ / 止血用パッド付絆創膏（創面保護材） インジェクションパッド



医療機器届出番号 13B2X00218131100
医療用品(4)整形用品 一般医療機器 救急絆創膏
JMDNコード 34864000



インジェクションパッド 白タイプ					
品番	略称	サイズ		1箱	JANコード
		テープ部	パッド部		
No.30	IJP30	30mmφ	10mmφ	120枚	4987167010638
No.36	IJP36	36mmφ	16mmφ	100枚	4987167010645

インジェクションパッド ベージュタイプ					
品番	略称	サイズ		1箱	JANコード
		テープ部	パッド部		
No.30A	IJP30A	30mmφ	10mmφ	120枚	4987167013226
No.36A	IJP36A	36mmφ	16mmφ	100枚	4987167013233

テープ部
〔基 材〕パルプ・ポリエステル不織布 〔粘着剤〕アクリル系
パッド部
〔基 材〕セルロース系不織布
※ 動脈留置針抜去後の止血には使用しないでください。

個包装で衛生的

一つ一つ個包装になっているため、患者さんごとに衛生的に貼ることができます。また、パッドに触れることなく貼れるように工夫がしてあるため、医療者の方や患者さんも安心して使うことができます。



こんなお困りごとはございませんか？

- ☒ 消毒作業を毎回実施すると時間がかかる ☒ よく手の触れる部分を簡単に消毒したい
- ☒ 菌やウイルスをまとめて除去したい

ウイルス除去除菌スプレー

バリアサーティ™



バリアサーティ™

品番	略称	内容量	JANコード
BT100	BT100	100mL	4987167098186

〔成分〕エタノール、陰イオン系ナトリウム塩

効果・効能対照表

項目	ウイルス		菌
	エンペロープ有	エンペロープ無	－
即効性	○	×	○
1ヶ月持続	○	×	×

※全てのウイルス・菌に効果があるわけではありません。

＜使用方法＞

約10cm離してスプレーし、
乾かしてください。電気製品には直接スプレーせず
乾いた布などにスプレーして、
塗布してください。使用の目安として100cm²あたり
1～2秒スプレーしてください。乾燥後、ムラがある場合は
再度スプレーし、乾く前に布などで
均一に塗り広げてください。① ウイルス除去効果約1ヶ月持続^{*1}

ウイルス除去効果が約1ヵ月続くので、少ない使用回数で効果的にウイルス除去ができます。

② ウイルス・菌を即効除去^{*2}

スプレー後、約30秒で99.9%のウイルス・菌を除去します。

③ よく手が触れる場所にスプレーして拭くだけ

ドアノブ、机、手すりなどよく手が触れる部分にスプレーするだけなので
時間や手間が要りません。

*本品は医薬品・医薬部外品ではありません。 *使用環境によって効果の持続時間に差があります。 *全てのウイルス・菌に効果があるわけではありません。

*1 テーブル試験で実証済。バリアサーティ™をフィルムにスプレー後、乾燥させる。1ヶ月後、フィルム表面にウイルス液を接触させたのち、ブランク法にて評価。

*2 約30秒で99.9%のウイルス・菌を除去。 ウイルス除去効果の判定：試験管にバリアサーティ™とウイルス液を入れ、30秒接触させたのち、ブランク法にて評価。
除菌効果の判定：試験試料に試験菌液をそれぞれ100μLずつ接種し25℃で培養した物より生菌数を測定。



ドアノブに



机に



スイッチに



リモコン等に

よく手が触れる場所等は効果の持続時間に差があります。

よく手が触れる部分には定期的にスプレーしてください。水ふきした場合は、再度スプレーしてください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため下記の注意を守ってください。①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：DME

使用上の注意

●ウイルス除去や除菌の用途以外には使用しないでください。 ●人体に使用しないでください。直接吸入しないように注意してください。 ●本製品はアルコールを含有します。アルコールに弱い方(アレルギー等)はご使用時、注意してください。 ●手指に用いたり、マスク等に吹きかけたりしないでください。 ●1か所に集中してスプレーしないでください。 ●変色、変質などの変化が起きる場合があるため、白木、桐、銅、真ちゅう、水性ワックス、塗装部分等には使用しないでください。その他の対象物に対しても、試し噴き等により事前に確かめてからご使用することをお奨めします。 ●子供の手の届くところには置かないでください。 ●缶が錆びるのを防ぐため、水回りや湿気の多いところには置かないでください。

製品一覧表

品 名	品番	略称	サイズ		1 箱	JANコード	標準価格 (税別)	
			テープ部	パッド部				
くつつくバンデージ™	KB38	KB38	38mm×4m 〈伸長時〉		12巻	4987064228	6,530円	
	KB50	KB50	50mm×4m 〈伸長時〉			4987057992	7,560円	
	KB75	KB75	75mm×4m 〈伸長時〉			4987058005	10,080円	
	KB38L	KB38L	38mm×8m 〈伸長時〉			4987074999	13,000円	
	KB50L	KB50L	50mm×8m 〈伸長時〉			4987075002	15,000円	
ステプティ™ NO.80 (白タイプ)	No.80	STP80	39mm×80mm	27mm×15mm	50枚	4987036218	1,500円	
ステプティ™ NO.80A (ベージュタイプ)	No.80A	STP80A				4987036225		
チューシャパン™	Sサイズ	CSVs	20mm×20mm	8mm×8mm	10枚×100袋	4987029555	3,300円	
	Mサイズ	CSVm	27mm×27mm	13mm×13mm	8枚×60袋	4987029562	3,000円	
	Lサイズ	CSVl	35mm×35mm	20mm×20mm	6枚×80袋	4987029579	3,300円	
オーキューバンエコ™ キャラクター	OQECS	OQECS	30mmφ	13mm×13mm	90枚 (キャラクター6種×15枚)	4987085452	1,200円	
インジェクションパッド マイルド	No.30N	IJPM30N	30mmφ	10mmφ	100枚	4987058272	700円	
	No.36N	IJPM36N	36mmφ	16mmφ	80枚	4987058289		
インジェクションパッド	ベージュタイプ	No.30	IJP30	30mmφ	10mmφ	120枚	4987010638	700円
		No.36	IJP36	36mmφ	16mmφ	100枚	4987010645	
		No.30A	IJP30A	30mmφ	10mmφ	120枚	4987013226	700円
		No.36A	IJP36A	36mmφ	16mmφ	100枚	4987013233	
	バリアサーティ™	BT100	BT100	100mL 〈内容量〉			4987098186	1,500円