

HbA1c results in minutes

Informed conversations at the point of care




グリコヘモグロビンA1cキット

A1CNow⁺

- ディスポーザブル(モニター & デバイス)
- 測定時間は5分
- 検体量は5μL
- ポータブルなので診察室、在宅医療でも使用可能
- 簡単な操作
- NGSP^(*)認証 (米国)

(*) National Glycohemoglobin Standardization Program

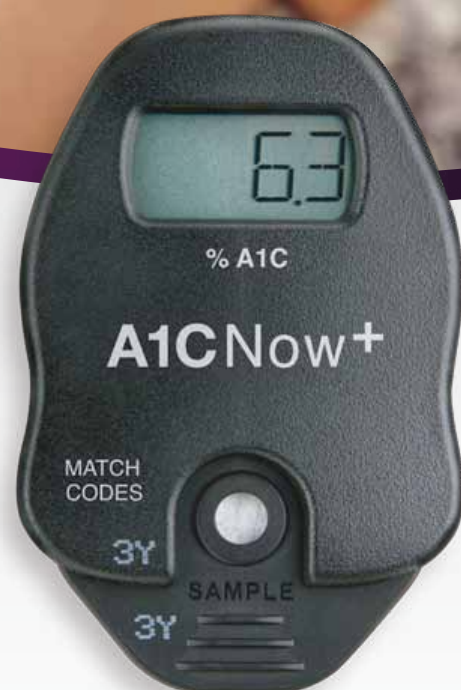

実物大 (モニター+カートリッジ)

一般医療機器 特定保守管理医療機器
A1CNow+モニター
届出番号: 13B1X10181000044

体外診断用医薬品
A1CNow+
届出番号: 13E1X80026000002

Finggal Link

操作方法

A1CNow+モニター




テストカートリッジ



サンプル希釈セット
・血液コレクター
・サンプラー




1

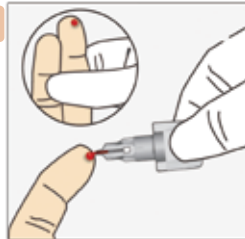


ランセットを使用し指先から採血、コレクターを血液に軽く触れて採取する

-----または-----

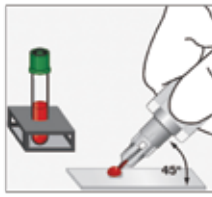

血液をスライドグラスから吸引する

2

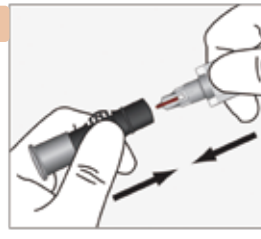


コレクターをサンプラーに差し込む

3




6～8回振り、しっかりと混和する

4

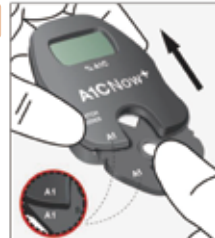

テストカートリッジをモニターに挿入する

5

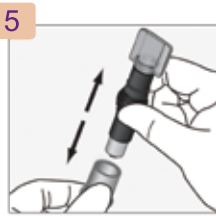

サンプラーカバーを外す

6



サンプラーをモニターに点着し、検体を添加する

7



5分後に結果表示

参考データ

既存法との相関性

40人を対象に静脈血を用いてA1CNow+とHPLC法で測定し、結果を比較した（右図）。

同時再現性


2レベルの全血検体を使用して、50回ずつ測定した。
＜結果＞

レベル1 (HbA1C 5.7%) : CV= 2.4%

レベル2 (HbA1C 8.9%) : CV= 3.0%

測定範囲 ; 4%～13% (NGSP値)

参考正常値 ; 4.6%～6.2% (NGSP値)

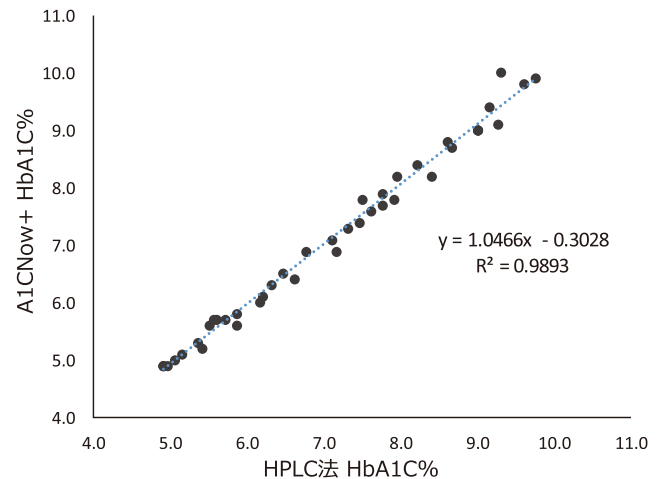

製品概要

- 使用目的 : 全血中のグリコヘモグロビンA1cの測定
(主に臨床上の疾病等の診断補助その他に使用)
- 測定原理 : 免疫法
- 有効期間 : 15ヶ月 (使用期限は外箱に表示してあります)
- 貯蔵方法 : 2～8℃
- 保険収載名 : ヘモグロビンA1c (HbA1c)
- 実施料 : 49点 (「D005」の「9」)
- 判断料 : 125点 (血液学的検査)

注) 確定診断は、他の関連する検査結果や臨床症状などに基づいて総合的に判断してください。



製品名		A1CNow+	
カタログ番号		3024	3021
回数		10テスト	20テスト
キットの構成	A1CNow+モニター	1台	1台
	テスト・カートリッジ	10枚	20枚
	サンプル希釈セット	10セット	20セット

＜本キットには下記製品は含まれておりません＞
ランセット、微量採血用穿刺器具、ヘパリン採血管、スライドグラス

【製造販売業者】 **フィンガルリンク株式会社**

IVD事業部

〒111-0041

東京都台東区元浅草2-6-6 東京日産台東ビル5F

TEL: 03-6802-7145 FAX: 03-6802-7156

URL: www.finggal-link.com

第一種医療機器製造販売業 許可番号 13B1X10181

【製造業者】 **Polymer Technology Systems, Inc. (米国)**

Finggal Link

