

# アルミ製 4点支持杖

## 取扱説明書



## はじめに

この度は、アルミ製 4 点支持杖をご購入いただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書は、アルミ製 4 点支持杖の正しい取扱方法について説明しています。

アルミ製 4 点支持杖を正しくご活用いただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。

※お読みになった後は、使用する際にいつでも見られるよう、大切に保管してください。

## 目次

1.	安全上の警告、禁忌・禁止、注意.....	2
2.	製品概要と各部の名称・構造 .....	4
3.	一般的な使用方法とその注意事項.....	5
4.	清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項 .....	6
5.	アフターサービスとその連絡先に関する事項 .....	6
6.	保証.....	7

## 1. 安全上の警告、禁忌・禁止、注意

使用する前に、この「安全上の警告、禁忌・禁止、注意」を、よく読んで、正しくお使いください。

- ※ ここに示した注意事項は、製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ※ 危害や損害の大きさと切迫の程度を明確にするため、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「禁忌・禁止」「注意」の三つに区分して示しています。

図記号の例	
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。
 <b>禁忌・禁止</b>	人が死亡または重症を負うことが想定されるため、避けるべき患者や使用方法を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
 <b>ポイント</b>	使用上のポイントや、確認いただきたいことを示します。

**いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。**

 **注意**

1. 本品は、杖（歩行補助具）です。使用目的以外に使用しないでください。
2. 本品は全体重を支えることはできません。
3. 杖に亀裂や変形、ガタつきがある場合は、折れるおそれがあるため使用しないでください。
4. 使用する前に各部を点検してください。
5. 身体に合った長さに調節してください。
6. 4点すべてが床面につくように垂直に杖を突いて歩行してください。斜めに杖を突くと転倒し負傷するおそれがあります。
7. 使用中も、長さを調節するプッシュボタンが固定穴から大きく飛び出ていること、ガタつき防止ネジにゆるみがないことを確認してください。
8. 濡れた路面や雪道等の滑りやすいところ、段差のあるところでは転倒し負傷するおそれがあるため、じゅうぶん気をつけて使用してください。
9. 道路の側溝や凹みがある箇所では杖の先端がはまり込む場合があるため、じゅうぶん気をつけて使用してください。

## 2. 製品概要と各部の名称・構造



全長	約 650~870mm (20mm 間隔で 12 段階調節)
杖先径	φ 16 mm
握り部材質	ポリウレタン
重量	690g
適用患者体重	120kg 未満

注文コード	品番	商品名
502-012-53	AQC-BK	アルミ製 4 点支持杖,バンド付,ブラック
502-012-54	AQC-SV	アルミ製 4 点支持杖,バンド付,シルバー
502-012-55	AQC-BR	アルミ製 4 点支持杖,バンド付,ブロンズ


### 補充品

注文コード	品番	商品名
502-012-80	502-012-80	足ゴム,黒色,アルミ製 4 点支持杖・杖先径φ 16mm 用

### 3. 一般的な使用方法とその注意事項

1) ガタつき防止ネジを時計回りに回してゆるめ、プッシュボタンを押し込み、支柱を上下にスライドさせて長さを調節します。

- ① 自然な姿勢で立ち、腕を垂直に下ろしたときの手首の位置に、握り部がくるようにします。
- ② 杖先をつま先の前方外側 15~20cm のところに置いたとき、体の縦の線と腕の角度が 30~40° になるようにします。

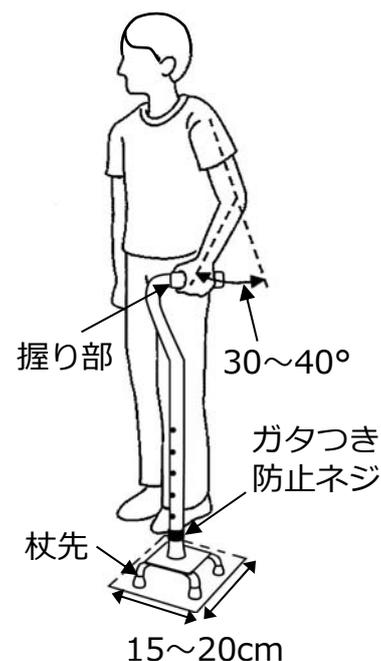

#### ポイント

- 1) 指等を挟まないように注意してください。
- 2) 腰の曲がった方や前傾姿勢の方は、その姿勢で立ち、床から頭までの高さの約半分の位置に握り部がくるように調節してください。
- 3) プッシュボタンを深く押し込みすぎると中に入り込んでしまう場合があります。押し込みすぎた場合は、一旦パイプを引き抜き、プッシュボタンをパイプの中から押し出してから再度調節してください。
- 4) 調節後、プッシュボタンが固定穴から大きく飛び出ていることを確認してください。


2) ガタつき防止ネジを反時計回りに回してしっかりと締めます。

#### ポイント


ガタつき防止ネジにゆるみがないことを確認してください。

### 3) 健常な足に合わせてベースの向きを変えます。


- ① ガタつき防止ネジを時計回りに回してゆるめます。
- ② プッシュボタンを押さえながらベースを 180°回転させます。
- ③ プッシュボタンが固定穴から大きく飛び出ていることを確認し、ガタつき防止ネジを反時計回りに回して締めます。

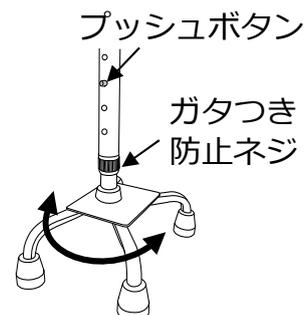

健常な足が左の場合（左用として使用）

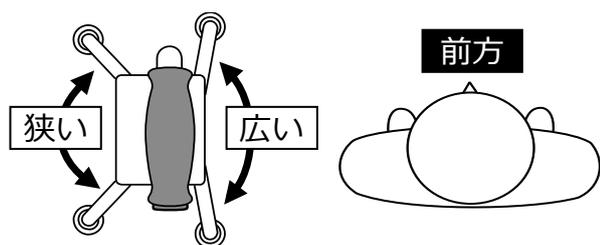

健常な足が右の場合（右用として使用）

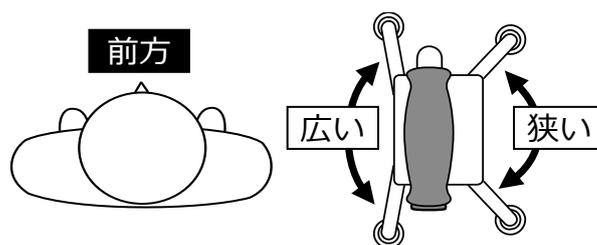

#### ポイント

本品は、前後の足の開き角度が広い方を内側にして使用します。

## 4. 清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

- 1) 使用後は、汚れや水濡れを拭き取ってください。
- 2) 汚れがひどい場合や落ちにくい場合は、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。
- 3) 足ゴムが破れたり、すり減ったり、抜けやすくなっている場合は、4個とも新しい足ゴムに交換してください。  
足ゴムを交換する際は、足ゴムをねじりながら引っ張り取り外します。交換用の足ゴムを取り付ける際も、ねじりながら確実に奥まで差し込んでください。
- 4) 本品が倒れない安定した場所で保管してください。
- 5) 耐用期間：1年 [自己認証（当社データ）による]。

## 5. アフターサービスとその連絡先に関する事項

輸入業者：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>

## 6. 保証

### 保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
  - (ニ) 本書の提示がない場合。
  - (ホ) 本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
  - (ヘ) 消耗部品。
  - (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
  - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

### 品質保証書

このたびは、アルミ製4点支持杖をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: アルミ製4点支持杖

製造番号/記号:

ご芳名

ご住所

TEL. ( )

お買い上げ店名

印

住所

TEL. ( )

お買い上げ日 年 月 日

輸入業者: 村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号 TEL 0725-53-5546