



Design Your Voice
Hakuzo

ハクゾウおうと物処理セット

嘔吐物の処理に必要な防護具や環境清掃製品などをセットにした製品です。



7点セット入り



簡単操作! 液パックをひねってつぶすだけ

ひねって含浸
ハクゾウジアパック 1000
入り

次亜塩素酸ナトリウム 45mL
0.1w/v% (1000ppm)

不織布 5枚
水解性パルプ(トイレに流せるタイプ)

製品特長

感染対策

◎嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃の徹底が図れます。

省力化

◎防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。

ひねって含浸ハクゾウジアパック 1000 入り

◎ジアパック(次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水解性パルプを組み合わせた製品)と一緒にセットしています。

主な使用場面

- ◎医療機関(各病棟の備蓄用。外来に。)
- ◎高齢者施設(老人保健施設など。)
- ◎消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。

【セット内容】

内 容	規 格	入 数
プラスチックガウン	親指フック	1 枚
サージカルマスク	ブルー	1 枚
プラスチックグローブ	M	2 双
ペーパータオル	2枚重ね	10 組
ひねって含浸ハクゾウジアパック1000	水解性パルプ 200×300mm	1 袋
イエロー袋	Lサイズ	1 枚
使用手順書	A5 サイズ	1 枚
トレー	縦178×横256×高さ40mm	1 個

※上記以外の組み合わせについて、別途ご相談を承ります。

品 番	規 格	包 装	製品サイズ (mm) 製品重量 (g)	1梱入数	ケースサイズ (mm) ケース重量 (kg)	JANコード
2610343	ICPACK⑤-F	1個	256×178×40 190	18個/箱	290×350×410 4.0	4 958286 055572

※詳細は各営業担当にお申し出ください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <http://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 神戸営業所 ☎078-940-8975
東京支店 ☎03-3522-6720 広島営業所 ☎082-849-4188
北大阪支店 ☎072-653-4045 四国営業所 ☎0875-52-6900
南大阪支店 ☎0721-20-2900 北九州営業所 ☎093-617-3911
仙台営業所 ☎022-393-7434 福岡営業所 ☎092-481-5921
関東営業所 ☎03-5809-4780 熊本営業所 ☎096-345-2253
西東京営業所 ☎042-646-0451 札幌駐在所 ☎011-788-8009
三河営業所 ☎0564-54-5447 盛岡駐在所 ☎019-613-2176
三重営業所 ☎059-350-3844 北陸駐在所 ☎076-225-8013
京都営業所 ☎075-603-4826 山陰駐在所 ☎0859-30-2193
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
阪神営業所 ☎078-262-1634



ハクゾウおうと物処理セット 使用手順

おうと物処理セットの準備


1 おうと物処理セットの準備




汚物
環境表面におうと物等の汚物が付着。



ハクゾウおうと物処理セット

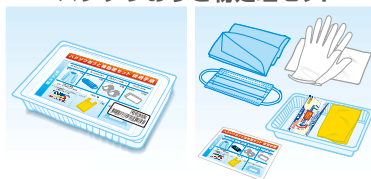

おうと物処理セットを用意してください。

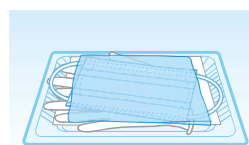

トレーの四隅のいずれかから透明フィルムを剥がしてください。

2 個人防護具の着用

ガウン



マスク



グローブ



防護具をガウン→マスク→グローブの順に取り出し装着してください。




トレー



取り出す
トレーに入っているすべての部材を取り出し汚染しないところに、トレーを汚物の近くにおいてください。

おうと物処理手順

3 おうと物の処理

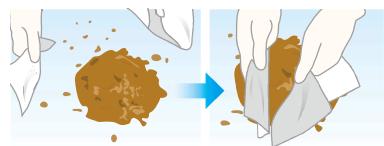

ペーパータオルを取り出し、汚物を外側から内側に向けて、拭き取ってください。



拭き取ったペーパータオルを空のトレーに入れてください。



汚物を完全に拭き取ってください。



ひねって含浸
ジアパック1000を取り出し、液剤パックをひねりつぶし、パックの上から少し揉んで液剤を広げてから袋を開封しワイパーを取り出してください。



次亜塩素酸ナトリウムを含んだワイパーで汚物が付着した表面を清拭してください。



拭き取ったワイパーをトレーに入れてください。


4 処理後



ペーパータオルやワイパーの入ったトレーをイエロー袋に入れてください。



グローブ→ガウン→マスクの順に防護具を脱いでください。

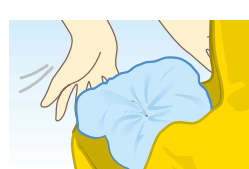

脱いだ防護服をイエロー袋に入れてください。



イエロー袋の紐を結んで密閉し廃棄してください。



石鹸と流水で手洗いを行ってください。



次亜塩素酸ナトリウム液で拭き取って10分程度経過したら、次亜塩素酸ナトリウム液で清拭した環境表面を水拭きしてください。