

翼付静注針
winged infusion set

ニプロPSVセット

医療機器認証番号 219AABZX00291000
医療機器クラス分類:クラスⅡ(管理医療機器)




静脈内輸液用、輸血用、小児頭皮用、麻酔用など、
広い範囲に使用できます。

特 長

- 柔軟性をもったウイング(翼)により、動きの激しい乳幼児でも刃先が静脈からはずれにくくなっています。
- ウイングはゲージ別に色別けしています。
その上、針の太さを表すゲージ刻印もありますので、選択も容易です。
- 18Gから27Gまで各種サイズを揃えていますので、目的に応じて選択していただけます。
- 包装はブリスター包装、またはラッパー包装を採用し、内部を透視できるため、内容を容易に判別できます。

使用方法

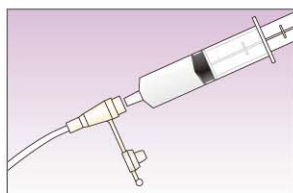


ルアーコネクタに注射筒、チューブ、アダプターなどを接続します。



薬液をチューブ内に満たし、チューブ内のエアを完全に抜きます。



ウイングをつまみ、静脈に穿刺します。血液がチューブ内に逆流するのを確認後、ウイングを固定して準備完了です。

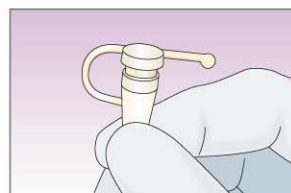

薬液の注入が終わったらアダプター内孔にキャップを挿入して留置します。(長時間の留置を必要とする場合は、チューブ内をヘパリン溶液で充填し、血液の凝固を防いでください。)



ソフトコネクタ

ハードコネクタタイプはロックコネクタとも接続可能です。



ハードコネクタ



規 格

ソフトコネクタタイプ

個包装：ブリスター



ソフトコネクタタイプ

個包装：ラッパー



ハードコネクタタイプ

個包装：ラッパー



商品コード	品名	翼の色	静脈針長さ (Length)	針の外径
04-018	PSV18G×3/4	ピンク	19mm	1.2mm
04-009	PSV19G×3/4	黄色		1.1mm
04-020	PSV20G×3/4	黄緑		0.9mm
04-021	PSV21G×3/4	緑		0.8mm
04-022	PSV22G×3/4	黒		0.7mm
04-013	PSV23G×3/4	青		0.6mm
04-014	PSV24G×3/4	紫		0.55mm
04-015	PSV25G×3/4	赤		0.5mm
04-027	PSV27G×3/4	グレー		0.4mm
04-031	PSV21G×5/8	緑	16mm	0.8mm
04-032	PSV22G×5/8	黒		0.7mm
04-043	PSV23G×5/8	青		0.6mm

チューブ長:30cm 50本入/箱

商品コード	品名	翼の色	静脈針長さ (Length)	針の外径
04-418	PSV18G×3/4	ピンク	19mm	1.2mm
04-409	PSV19G×3/4	黄色		1.1mm
04-420	PSV20G×3/4	黄緑		0.9mm
04-421	PSV21G×3/4	緑		0.8mm
04-422	PSV22G×3/4	黒		0.7mm
04-413	PSV23G×3/4	青		0.6mm
04-414	PSV24G×3/4	紫		0.55mm
04-415	PSV25G×3/4	赤		0.5mm
04-427	PSV27G×3/4	グレー		0.4mm
04-441	PSV21G×5/8	緑	16mm	0.8mm
04-442	PSV22G×5/8	黒		0.7mm
04-433	PSV23G×5/8	青		0.6mm

チューブ長:30cm 50本入/箱

商品コード	品名	翼の色	静脈針長さ (Length)	針の外径
04-450	PSV18G×3/4ハードコネクタ	ピンク	19mm	1.2mm
04-469	PSV19G×3/4ハードコネクタ	黄色		1.1mm
04-452	PSV20G×3/4ハードコネクタ	黄緑		0.9mm
04-453	PSV21G×3/4ハードコネクタ	緑		0.8mm
04-454	PSV22G×3/4ハードコネクタ	黒		0.7mm
04-473	PSV23G×3/4ハードコネクタ	青		0.6mm
04-474	PSV24G×3/4ハードコネクタ	紫		0.55mm
04-475	PSV25G×3/4ハードコネクタ	赤		0.5mm
04-458	PSV27G×3/4ハードコネクタ	グレー		0.4mm
04-459	PSV21G×5/8ハードコネクタ	緑	16mm	0.8mm
04-460	PSV22G×5/8ハードコネクタ	黒		0.7mm
04-463	PSV23G×5/8ハードコネクタ	青		0.6mm

チューブ長:30cm 50本入/箱

翼の色は見本です。実際の製品の色とは若干異なる場合がございますので、ご了承ください。



NIPRO

製造販売

ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番5号