

## 誤刺防止機構付


## セーフタッチ® PSVセット

## 特 長


## ○ 安全性と操作性を両立 ○

従来の翼付針と同様の操作でご使用になれます。  
抜針時と、さらに廃棄時における針刺事故も防止できます。


## セーフタッチ® PSVセット 誤刺防止機構

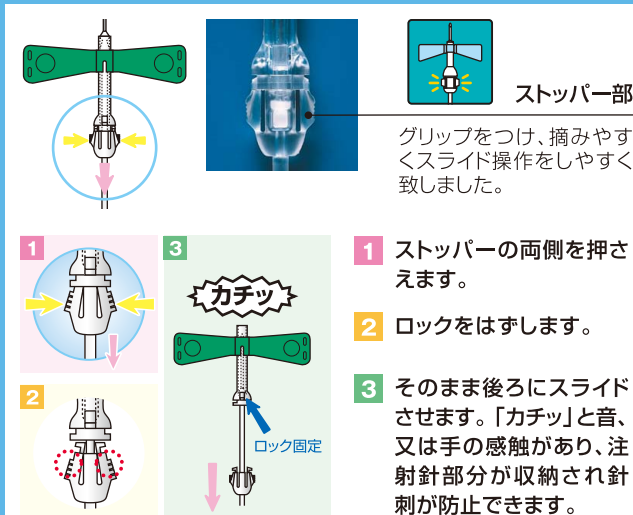


## 使用方法

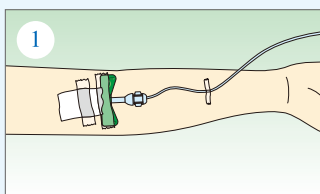


穿刺するときは、従来の翼付針と同じように穿刺し、翼をテープで固定します。

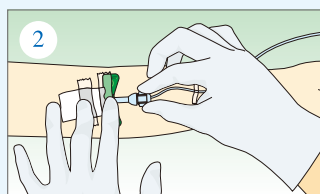

抜針するときは翼をテープ固定したままで行います。刺入部を中指で、ウイング部を人差し指で押さえます。ストッパーの両側を押さえてロックをはずし、引きます。

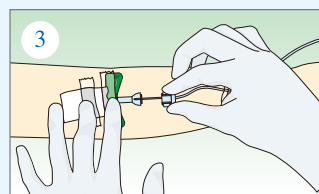

「カチッ」と音がするまでストッパーを完全に引き、注射針部分をウイングプロテクター内に収納固定します。

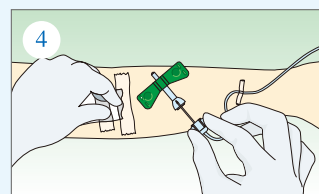

刺入部の止血処置をおこない、翼の固定テープを外して廃棄します。


## 規 格

## ■ソフトコネクタータイプ

チューブ長:30cm 50本入/箱

| 商品コード  | 品名      | 翼の色 | 静脈針長さ | 針の外径  |
|--------|---------|-----|-------|-------|
| 04-309 | 19G×3/4 | 黄   | 19mm  | 1.1mm |
| 04-321 | 21G×3/4 | 緑   |       | 0.8mm |
| 04-322 | 22G×3/4 | 黒   |       | 0.7mm |
| 04-333 | 23G×3/4 | 青   |       | 0.6mm |
| 04-335 | 25G×3/4 | 赤   |       | 0.5mm |
| 04-336 | 27G×3/4 | 灰   |       | 0.4mm |
| 04-341 | 21G×5/8 | 緑   | 16mm  | 0.8mm |
| 04-342 | 22G×5/8 | 黒   |       | 0.7mm |
| 04-353 | 23G×5/8 | 青   |       | 0.6mm |
| 04-345 | 25G×5/8 | 赤   |       | 0.5mm |

ハードコネクタータイプはロックコネクターとも接続可能です。

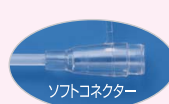

## ■ハードコネクタータイプ

チューブ長:30cm 50本入/箱

| 商品コード  | 品名              | 翼の色 | 静脈針長さ | 針の外径  |
|--------|-----------------|-----|-------|-------|
| 04-509 | 19G×3/4ハードコネクター | 黄   | 19mm  | 1.1mm |
| 04-521 | 21G×3/4ハードコネクター | 緑   |       | 0.8mm |
| 04-522 | 22G×3/4ハードコネクター | 黒   |       | 0.7mm |
| 04-513 | 23G×3/4ハードコネクター | 青   |       | 0.6mm |
| 04-515 | 25G×3/4ハードコネクター | 赤   |       | 0.5mm |
| 04-527 | 27G×3/4ハードコネクター | 灰   |       | 0.4mm |

翼の色は見本です。実際の製品の色とは若干異なる場合がございますので、ご了承願います。

## 真空採血システム

ルアーアダプター付き  
セーフタッチ® PSVセット ホルダー付

## 特 長

## ◆ 準備時間短縮

翼付針、ルアーアダプター、ホルダーを一体化していますので、開封後すぐに使用できます。

## ◆ 安全な採血セット

安全対策商品の翼付針を使用しておりますので、針刺事故防止に効果を発揮します。


## ◆ 安全性と操作性を両立

従来の翼付針と同様の操作でご使用になれます。  
抜針時と、さらに廃棄時における針刺事故も防止できます。



医療機器認証番号 220AABZX00324000  
医療機器クラス分類:クラスII (管理医療機器)

## 使用方法

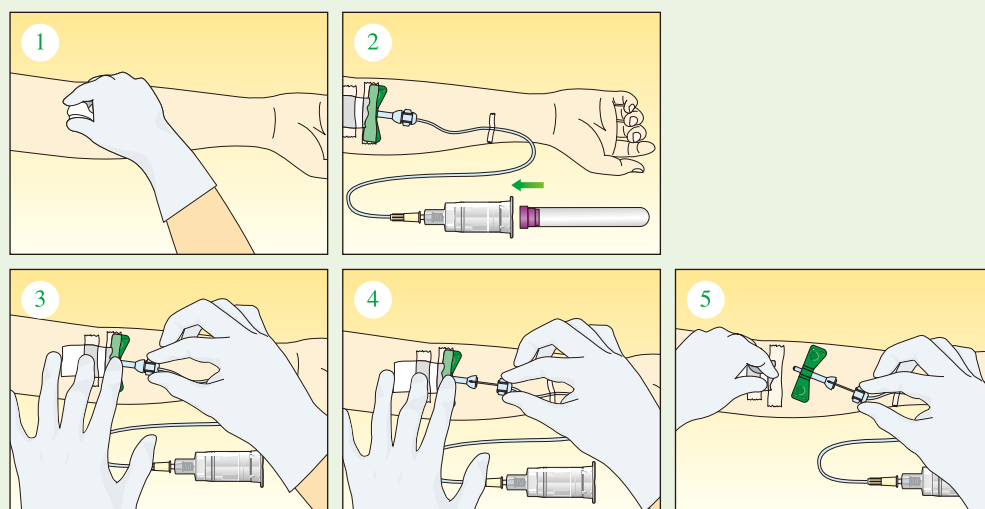

- 1 穿刺部位を消毒します。
- 2 従来の翼付針と同じように穿刺し、翼をテープで固定してホルダーに採血管を挿入します。
- 3 抜針するときは、刺入部を中指で、ウイング部を人差し指で押さえます。ストッパーの両側を押さえてロックをはずし、引きます。
- 4 **カチッ**と音がするまでストッパーを完全に引き、注射針をウイングプロテクター内に収納固定してください。
- 5 刺入部の止血に注意し、翼付針を取り外し、廃棄ボックスに廃棄してください。

## 規 格

## ■チューブ長19cmタイプ

24本入/箱

| 商品コード  | 品名                                | 翼の色 | 静脈針長さ | 針の外径  |
|--------|-----------------------------------|-----|-------|-------|
| 32-380 | ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット 21Gホルダー付   | ■   | 19mm  | 0.8mm |
| 32-381 | ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット 22Gホルダー付   | ■   | 19mm  | 0.7mm |
| 32-383 | ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット 23Gホルダー付 * | ■   | 19mm  | 0.6mm |

## ■チューブ長30cmタイプ (受注生産品)

24本入/箱

| 商品コード  | 品名                               | 翼の色 | 静脈針長さ | 針の外径  |
|--------|----------------------------------|-----|-------|-------|
| 32-384 | ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット21G Lホルダー付 | ■   | 19mm  | 0.8mm |
| 32-385 | ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット22G Lホルダー付 | ■   | 19mm  | 0.7mm |
| 32-387 | ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット23G*Lホルダー付 | ■   | 19mm  | 0.6mm |

翼の色は見本です。実際の製品の色とは若干異なる場合がございますので、ご了承願います。