

Inspiron

Oxygen Masks

オキシジェンマスク

マスクフィッティングと皮膚障害を考慮した簡易酸素マスク

低流量システムで使用するオキシジェンマスクです。

中濃度酸素投与に適します。



スタールーメン



誤接続防止

- 鼻梁部分までマスクの縁を折り返す処理をすることで、皮膚にやさしく、フィット感も向上しました。
- マスクは3サイズをご用意しています。
- マスク部が透明で、患者の口元が観察しやすくなっています。
- 2点支持のノーズクリップで鼻梁の形に合わせやすくなっています。
- 酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造を採用しています。
- コネクター部は、気管チューブとの誤接続を防止するタイプとフレアコネクタータイプの2種類を採用しています。
- フレアコネクタータイプは各種の加湿瓶に接続しやすくなっています。
- アレルギーリスクの少ないノンラテックスです。
- マスク内に溜まった呼気ガスを再呼吸しないように酸素流量は通常5L／分以上にします。そのため、吸入酸素濃度は40％以上になり、低濃度酸素吸入には適しません。やむをえず酸素流量を5L／分未満で使用する場合、患者のPaCO₂が上昇する危険性に留意してください(酸素療法ガイドラインより引用)。

酸素流量によって投与される吸入酸素濃度の目安


酸素流量(L/分)	5	6	7	8
F _I O ₂ (%)	40～45	45～50	50～55	55～60

※F_IO₂=吸入酸素濃度 ※患者の呼吸回数・パターンによって吸入酸素濃度が変動します。


Adult / Pediatric

オキシジェンマスク 大人用／大人用(小)

001421

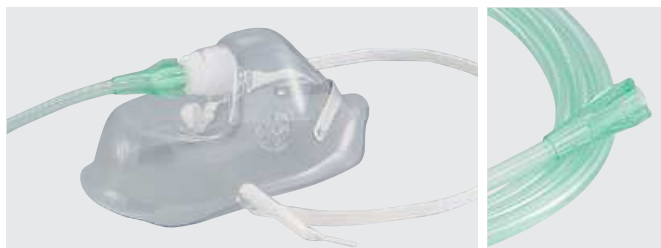

001422

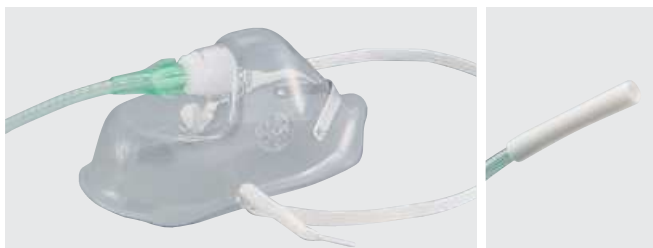

001451



001452




カタログ番号	製品名	規格	包装単位	医療機器承認番号
001421	オキシジェンマスク	大人用	20入／箱	22000BZX01571000
001422	オキシジェンマスク(フレアコネクタータイプ)	大人用	20入／箱	22000BZX01571000
001451	オキシジェンマスク	大人用(小)	20入／箱	22000BZX01571000
001452	オキシジェンマスク(フレアコネクタータイプ)	大人用(小)	20入／箱	22000BZX01571000

オキシジェンマスク 小児用

001471



001472

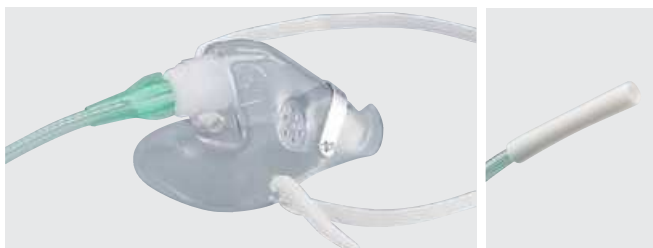

カタログ番号	製品名	規格	包装単位	医療機器承認番号
001471	オキシジェンマスク	小児用	20入／箱	22000BZX01571000
001472	オキシジェンマスク(フレアコネクタータイプ)	小児用	20入／箱	22000BZX01571000