

抜管防止用腕固定具

NEホルダー・NEホルダーショート



NEホルダー フリーサイズ



NEホルダーショート



Sサイズ

Mサイズ



NEホルダー用抜管防止カバー(別売)

- 透析、点滴中の抜管防止用の腕固定具です。
- 可動式のマジックテープにより穿刺部位に合わせて固定できます。
- 手首の固定などにNEホルダーショート(Sサイズ・Mサイズ)もございます。
- 可動式バンドの固定位置によって、腕を伸展位、屈曲位2種類の固定が可能です。
- 抜管を防止するためのビニールカバー(別売)もございます。 ※全サイズ共通

品名	品番	規格	入数	定価	付属バンド
NEホルダー	NE-2191	幅21cm、長さ45cm、高さ6cm	1個	¥5,000	25cm×2本、30cm×1本
NEホルダー ショート Sサイズ	NE-2194	幅16cm、長さ23cm、高さ6cm	1個	¥4,500	20cm×2本
NEホルダー ショート Mサイズ	NE-2195	幅18cm、長さ23cm、高さ6cm	1個	¥4,500	25cm×2本
NEホルダー用抜管防止カバー	NE-2192	幅23cm、長さ23cm	1個	¥1,000	—


【装着方法】



1. 本体の細い方を手のひら側に当て、手のひら位置から固定します。



2. 点滴等の穿刺部位を避ける位置で残り2本のベルトをしっかりと固定します。
※三本目の上腕寄りのバンドは肘より上に装着すると、肘の屈曲を抑えることができます。

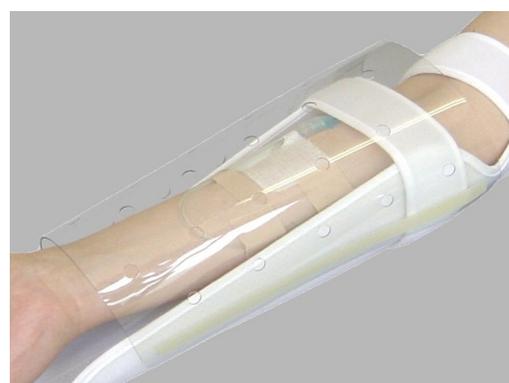

3. 抜針を防止するためのビニールカバー(別売)を装着するとより効果的です。

※当製品は回路の抜管等を完全に防げる商品ではありません。ご使用の際はベルトの締めすぎ等に十分注意し、定期的な確認をしてください。



日本衛材株式会社
Bandage & Medical Materials

東京都八王子市千人町3-17-10
URL: <http://www.eizai.co.jp>

☎ 042-666-5500
✉ info@eizai.co.jp