


O₂ キャリアーホルダー（車椅子用） 取扱説明書



1. 安全上の注意

- 1) 使用目的以外に使用しないでください。
- 2) 耐荷重は 20kg です。車椅子が転倒するおそれがありますので、本品にそれ以上の無理な力がかからないようにしてください。
- 3) 各固定ノブ、取付用ノブがしっかり締まっているか、定期的に（週に一回以上）点検してください。
ノブがゆるんだ状態で使用されますと、転倒や破損の原因となります。必ず定期的に点検を行い、ゆるみがある場合は増し締めをしてください。
- 4) 酸素は、燃焼を助ける性質が強いガスであり、火を近づけると大変危険です。酸素ボンベ使用中は火気の取り扱いにご注意ください。
 - (1) 酸素吸入中は、周囲 2 m 以内には火気を置かないでください。
 - (2) 患者さん自身はもちろん、介助する方、家族の方なども酸素ボンベの周辺での喫煙や火気は厳禁です。

2. 製品概要と各部・付属品の名称

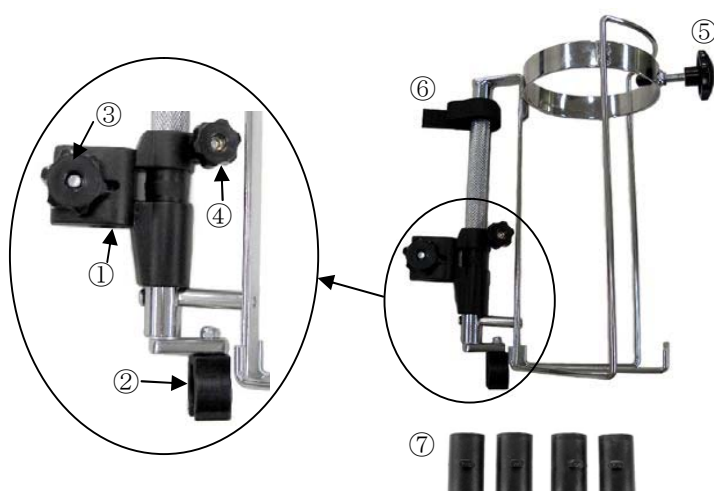

部品名	数量
①固定ホルダー①	1
②固定ホルダー②	1
③車椅子取付用ノブ	1
④ボンベホルダー固定ノブ	1
⑤酸素ボンベ固定ノブ	1
⑥マジックカップ	1
⑦割りピン(7/8 インチ(22mm)パイプ用) (3/4 インチ(19mm)パイプ用)	各1組

耐荷重 : 約 20kg
 全長 : 320mm
 重量 : 約 1.2kg
 搭載可能なボンベ直径 : φ 90mm～110mm

3. 使用方法とその注意事項



注意

- ① 車椅子への取り付けは、平坦な場所で行ってください。
- ② 必ず車椅子のブレーキをロックし、車椅子が動かない状態で取り付けてください。
- ③ 固定ホルダー①は 1 インチ(25mm)パイプ用です。車椅子のパイプがそれより細い場合、固定ホルダー①に付属の割りピンを取り付けてください。
(次頁の【割りピンの取付方法(車椅子のパイプが細い場合)】参照。)

- 1) 車椅子取付用ノブをゆるめて固定ホルダー④から取り外します。
- 2) 固定ホルダー④、⑤を車椅子のパイプにしっかりとはめこみます。




- 3) 取り外した車椅子取付用ノブを固定ホルダー④に取り付け、しっかりと締めます。
ボンベホルダー固定ノブをしっかりと締めます。

**注意**

各固定ノブ、取付用ノブは、車椅子の車輪に触れないよう車椅子の内側に取り付けてください。

固定ホルダー④

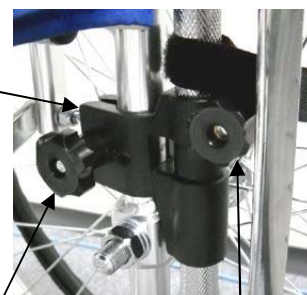

車椅子取付用ノブ

ボンベホルダー固定ノブ

- 4) マジックカフを車椅子のパイプにしっかりと巻きつけます。

マジックカフ




- 5) 酸素ボンベをボンベホルダーにセットし、酸素ボンベ固定ノブを締めて固定します。

酸素ボンベ固定ノブ

**【割りピンの取付方法(車椅子のパイプが細い場合)】**

- 1) 固定ホルダー④から車椅子取付用ノブを取り外します。
- 2) 割りピンを右図のように固定ホルダー④に挿入し、車椅子のパイプに取り付けます。(割りピンにより 19mm、22mm のパイプに取り付けが可能となります。)

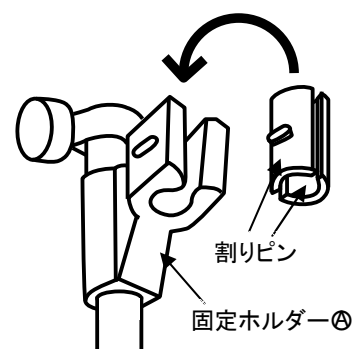

割りピン

固定ホルダー④

4. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号

TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>

注文コード	品番	商品名
502-022-33	HP3041	O ₂ キャリアーホルダー(車椅子用)