

ワンタッチアクロ® 簡単使い方ガイド

製品についてのお問い合わせは「ワンタッチコールセンター」まで。

ワンタッチ コールセンター **0120-113-903**
24時間365日 携帯電話・PHSからでもかけられます。

ご使用にあたってはご使用する製品の添付文書をご参照ください。

採血に必要なもの



器具の準備、穿刺、測定は、清潔な状態でいきましょう。



1 深度調節ダイヤルを回して、 穿刺深度を調節します。

深度 0, 1	より浅い穿刺
深度 2, 3	標準的な穿刺
深度 4, 5	より深い穿刺



2 保護キャップを持って穿刺針を 穿刺器具にカチッと音がるまで しっかり押し込んでください。




3 穿刺針を取り付けると「取りはずし ボタン」が現れます。「確認窓」が オレンジ色になったことを確認します。



4 水色の保護キャップを2~3回 ねじって取りはずしてください。



5 穿刺針ケースの先端を穿刺部位にしっかり押し当てたまま、 穿刺ボタンを押してください。

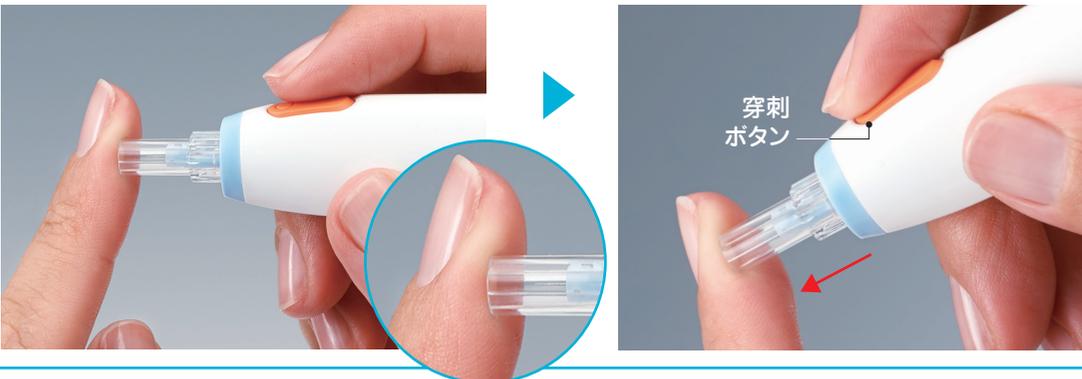

測定に必要な血液量を 確保します。



6 穿刺針がはずれるまで、 水色の取りはずしボタン を押しきってください。

