

救急絆創膏

サージット® 10 WA

サージット® 10 WA IV

【サージット®10 WA】 医療機器届出番号：43B2X00005000109

医療機器クラス分類：クラス I (一般医療機器)

【サージット®10 WA IV】 医療機器届出番号：43B2X00005000108

医療機器クラス分類：クラス I (一般医療機器)


10 μ mのポリウレタンフィルム+ウレタンゲル粘着剤

10 μ mの ポリウレタンフィルム

- 柔らかい
- 伸びがよい
- 蒸れにくい


ウレタンゲル粘着剤

- 柔らかい
- 高い密着力

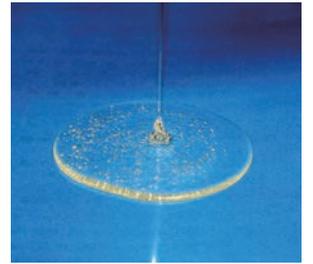


高密着・低刺激のドレッシング剤を実現


優れた透湿性

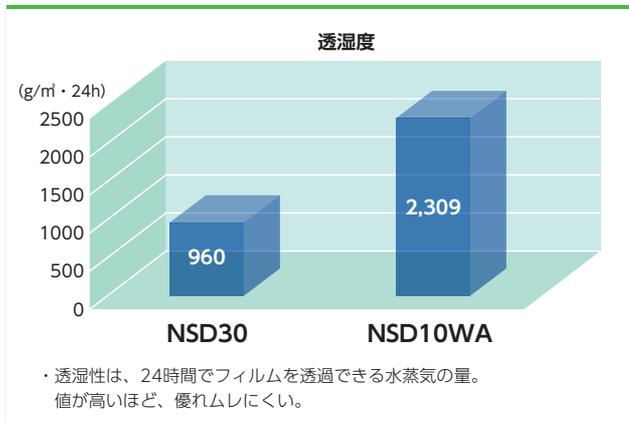


高密着性

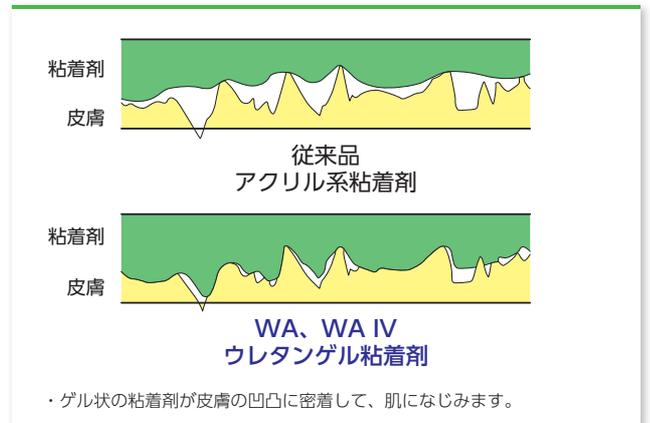


高伸縮性

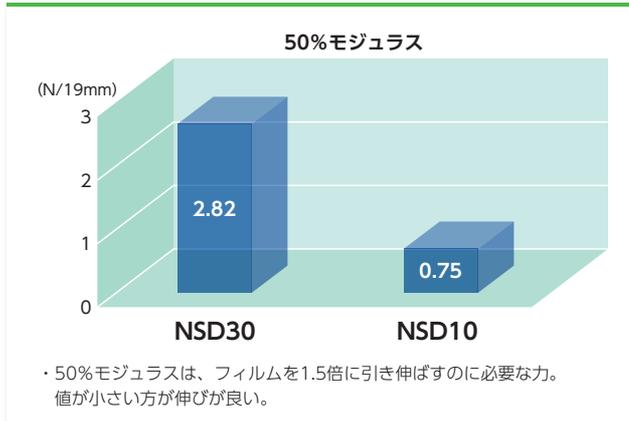

低粘着力

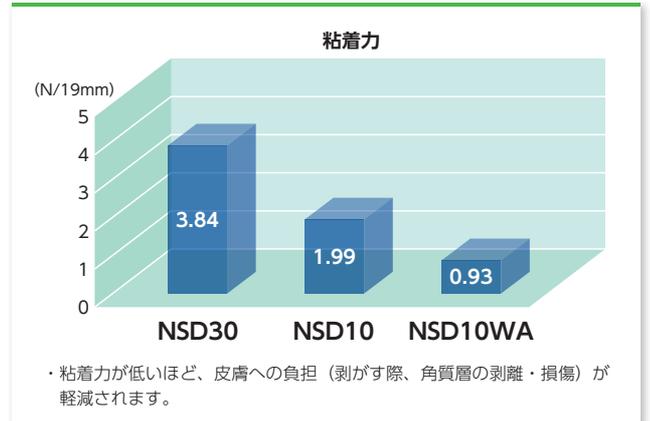

直径22cmの円形フィルムに1.8kgの鉄球を乗せた状態

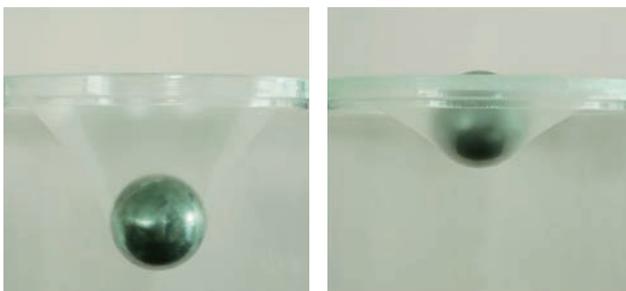


NSD10

NSD30

・柔軟性に優れたフィルムは肌に追従し、ストレスを軽減します。

角質剥離染色試験の比較

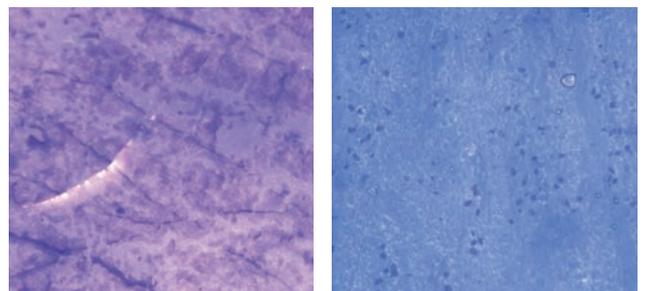


NSD30

NSD10WA

製造販売元社内試験。50代女性の一例。

取っ手付きフレームタイプの剥離紙を採用

使いやすさを向上

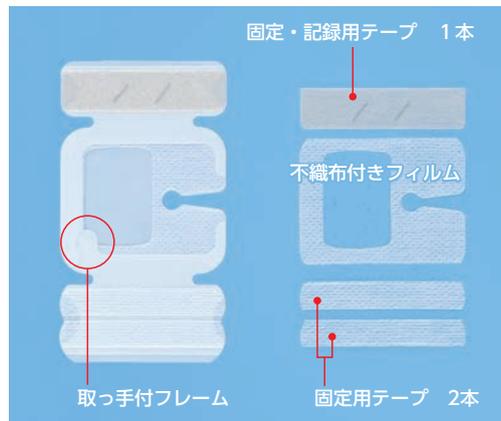

良好な操作性




・粘着部分に触れず、片手でも貼付が可能です。



・凹凸部にもしわなく貼付が可能です。

防水性・遮菌性

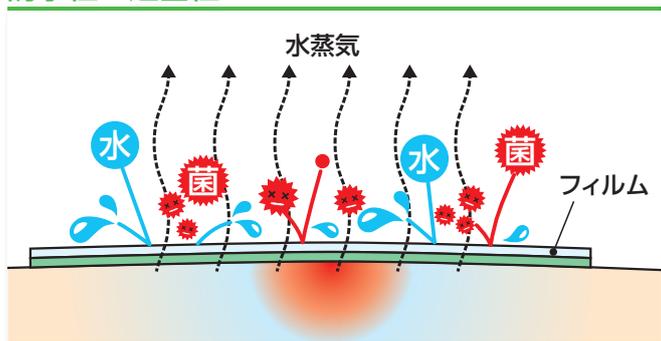

操作回数の減少

従来品のサージットシリーズは剥離紙の剥離操作が4工程必要でした。WAシリーズ(左)は2工程に、WA IVシリーズ(右)は3工程に減少されます。



豊富な品揃え

| 商品コード | 規格 | サイズ | 梱包 | JANコード |
|--------|--------------|-----------|---------------------|---------------|
| 21-071 | NSD10 WA-1 | 44× 44mm | 2,000枚 (100枚/箱×20箱) | 4987458210716 |
| 21-072 | NSD10 WA-2 | 60× 70mm | 2,000枚 (100枚/箱×20箱) | 4987458210723 |
| 21-073 | NSD10 WA-3 | 100×115mm | 1,000枚 (50枚/箱×20箱) | 4987458210730 |
| 21-074 | NSD10 WA-4 | 100×120mm | 1,000枚 (50枚/箱×20箱) | 4987458210747 |
| 21-081 | NSD10 WAIV-1 | 50× 60mm | 2,000枚 (100枚/箱×20箱) | 4987458210815 |
| 21-082 | NSD10 WAIV-2 | 60× 70mm | 2,000枚 (100枚/箱×20箱) | 4987458210822 |
| 21-083 | NSD10 WAIV-3 | 65× 70mm | 2,000枚 (100枚/箱×20箱) | 4987458210839 |
| 21-084 | NSD10 WAIV-4 | 70× 85mm | 2,000枚 (100枚/箱×20箱) | 4987458210846 |
| 21-085 | NSD10 WAIV-5 | 90×120mm | 1,000枚 (50枚/箱×20箱) | 4987458210853 |
| 21-086 | NSD10 WAIV-6 | 100×120mm | 1,000枚 (50枚/箱×20箱) | 4987458210860 |

サージット® 10 WA

固定・記録用テープ1本



- 医療機器届出番号
43B2X00005000109
- 医療機器クラス分類
クラス I (一般医療機器)
- 一般の名称 救急絆創膏
- エチレンオキサイドガス滅菌済み



21-071
NSD10 WA-1
(44mm×44mm)



21-072
NSD10 WA-2
(60mm×70mm)



01 固定・記録用テープ側から剥がします。



02 裏面の剥離紙 (茶色テープが貼付されていない方) を剥ぎ取り、粘着面を出します。



03 創傷面が本品の中央にくるようにあわせ、貼付させます。



04 創傷面に貼りながら周囲を上から押さえ全体が密着するように貼付します。

サージット® 10 WA IV (不織布付き・スリット入り)

固定テープ2本、固定・記録用テープ1本



- 医療機器届出番号
43B2X00005000108
- 医療機器クラス分類
クラス I (一般医療機器)
- 一般の名称 救急絆創膏
- エチレンオキサイドガス滅菌済み



21-081
NSD10 WA IV-1
(50mm×60mm)



21-083
NSD10 WA IV-3
(65mm×70mm)

WA IV-1・3・4・5




01 固定・記録用テープ側から剥がします。



02 裏面の剥離紙 (3枚のテープ (白・茶色) が貼付されていない方) を剥ぎ取り、粘着面を出します。



03 カテーテル穿刺部位が本品フィルム部分の中央にくるように合わせ、不織布テープのスリット部分とカテーテルハブを固定させます。

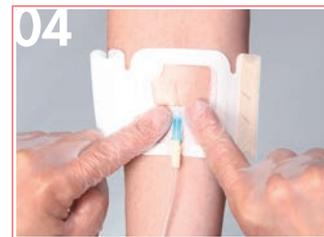

04 カテーテル周囲を良く密着させます。

WA IV-2・6



01 固定・記録用テープ側から剥がします。



02 裏面の剥離紙 (2枚のテープ (白・茶色) が貼付されていない方) を剥ぎ取り、粘着面を出します。



03 カテーテル穿刺部位が本品フィルム部分の中央にくるように合わせて貼付します。




04 カテーテル周囲を良く密着させます。



21-073
NSD10 WA-3
(100mm×115mm)



21-074
NSD10 WA-4
(100mm×120mm)

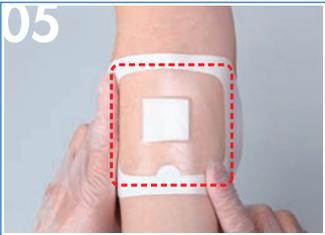

テープ周囲をしっかり押さえながら密着させます。




本品を押さえながら表面の剥離紙の取っ手をつまみ、矢印の方向にゆっくりと剥ぎ取ります。



表面の剥離紙に附属している茶色のテープは、固定もしくは記録用テープとして使えます。

固定テープ1本、固定・記録テープ1本

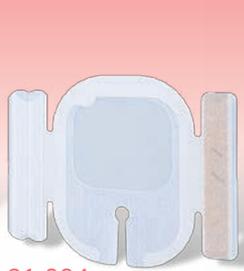

21-084
NSD10 WA IV-4
(70mm×85mm)




21-085
NSD10 WA IV-5
(90mm×120mm)



21-082
NSD10 WA IV-2
(60mm×70mm)




21-086
NSD10 WA IV-6
(100mm×120mm)

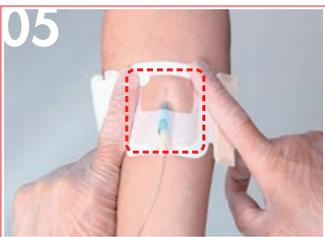

テープ周囲をしっかり押さえながら密着させます。




本品を押さえながら表面の剥離紙の取っ手をつまみ、矢印①の方向にゆっくりと剥ぎ取ります。

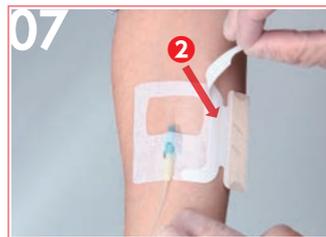


この後、残った剥離紙も同様に、矢印②の方向に剥ぎ取ります。




表面の剥離紙に附属している3枚のテープ(白・茶色)は、カテーテルラインの補強やルートの固定用テープとして、また茶色のテープについては記録用テープとして使えます。

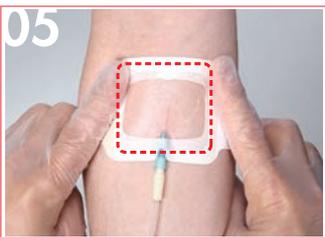

テープ周囲をしっかり押さえながら密着させます。

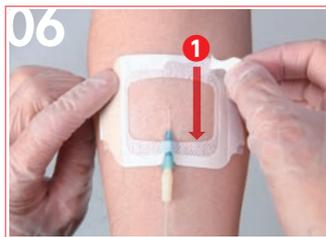

本品を押さえながら表面の剥離紙の取っ手をつまみ、矢印①の方向にゆっくりと剥ぎ取ります。

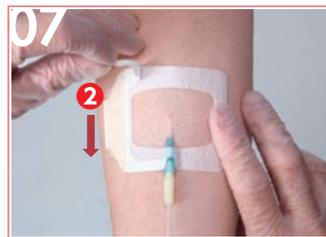

この後、残った剥離紙も同様に、矢印②の方向に剥ぎ取ります。



表面の剥離紙に附属している2枚のテープ(白・茶色)は、カテーテルラインの補強やルートの固定用テープとして、また茶色のテープについては記録用テープとして使えます。



販売 **ニプロ株式会社**
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

製造販売者 **リバテープ製薬株式会社**
熊本県熊本市北区植木町岩野45

