

Inspiron

Oxygen Masks Three in one type

オキシジェンマスク スリーインワン型

安全性と利便性を考えたリザーバーシステム

酸素チューブから流れる酸素とリザーバーバッグに貯まった酸素を吸入するため、高濃度の酸素吸入が可能となります。

通常、吸入酸素濃度が60%以上に適しています。



スタールーメン



誤接続防止

- 首折れ防止構造を採用していますので、バッグの折れによる酸素ガス遮断を防止します。
- 高濃度マスクとして非再呼吸式と部分再呼吸式に対応します（部分再呼吸式は、マスク両側とバッグ接続部にある一方弁を取り外すことで使用できます）。
- マスク両側にある一方弁とリザーバーバッグをマスクから取り外し、付属のスピゴットコネクターを接続することで、中濃度酸素投与に適した簡易酸素マスクとして使用できます。
- マスク部が透明で、患者の口元が観察しやすくなっています。
- 2点支持のノーズクリップで鼻梁の形に合わせやすくなっています。
- 酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造で、コネクター部は気管チューブとの誤接続を防止するタイプとフレアコネクタータイプの2種類を採用しています。
- フレアコネクタータイプは各種の加湿瓶に接続しやすくなっています。
- アレルギーリスクの少ないノンラテックスです。
- 二酸化炭素の蓄積を防止するためと、リザーバーバッグ内に十分な酸素を貯めるために、酸素流量は6L／分以上に設定してください。酸素流量が少ないと呼気ガスを再呼吸するためPaCO₂が上昇する可能性があります（酸素療法ガイドラインより引用）。

酸素流量によって投与される吸入酸素濃度の目安


酸素流量(L/分)	6	8	10	12
F _I O ₂ (%)	55~60	60~80	80~90	90

※F_IO₂=吸入酸素濃度 ※患者の呼吸回数・パターンによって吸入酸素濃度が変動します。


Adult / Pediatric

オキシジェンマスク スリーインワン型 大人用／大人用(小)

001423

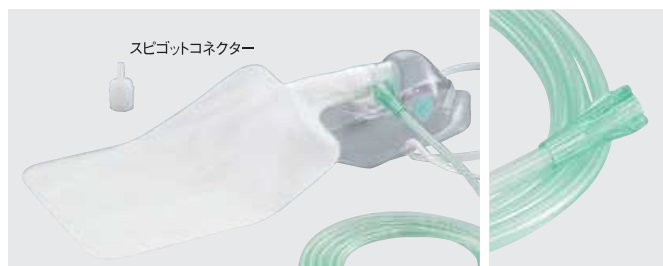

001424

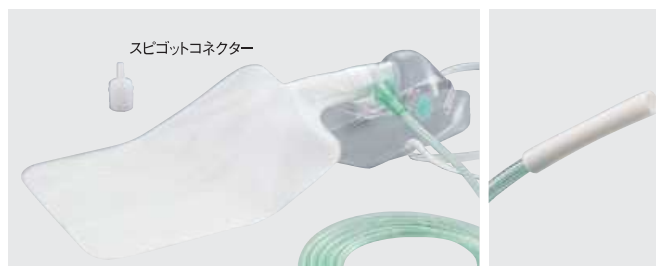

001453



001454



カタログ番号	製品名	規格	包装単位	医療機器承認番号
001423	オキシジェンマスク スリーインワン型	大人用	20入／箱	22000BZX01571000
001424	オキシジェンマスク スリーインワン型(フレアコネクタタイプ)	大人用	20入／箱	22000BZX01571000
001453	オキシジェンマスク スリーインワン型	大人用(小)	20入／箱	22000BZX01571000
001454	オキシジェンマスク スリーインワン型(フレアコネクタタイプ)	大人用(小)	20入／箱	22000BZX01571000

オキシジェンマスク スリーインワン型 小児用

001473



カタログ番号	製品名	規格	包装単位	医療機器承認番号
001473	オキシジェンマスク スリーインワン型	小児用	20入／箱	22000BZX01571000