



VELOX® 快適な呼吸

快適な生活



約3分間で吸入

スピーディーかつ効率的な吸入治療

※ドイツ PARI Pharma GmbH の社内測定による

VELOX®スピーディーで効果的な吸入治療

VELOXは、下部気道に疾患のある患者の生活をより快適にします。
小型・軽量で静粛性に優れており、携帯に便利です。

VELOXは、日々の生活の中で使用していただく事で、患者の日常生活をサポートします。

保証期間

コントローラー：2年
ベロックスケア：6ヶ月



慢性閉塞性肺疾患（COPD）や気管支喘息といった
急性/慢性気道疾患治療用携帯型吸入器


注文コード	M23-001-16
品番	055G1012
標準価格	¥38,000
吸入器仕様	
電源	AC100V 50-60Hz（専用ACアダプター使用時）、単3形アルカリ電池（DC1.5V）×3本、単3形ニッケル水素充電電池（DC1.2V）×3本
消費電力	2.0W Max（専用ACアダプター使用時）
重量	110g（電池含まず）
外形寸法	ネブライザー：約W13.9×D6.6×H6.1cm コントローラー：約W7.2×D6.0×H9.1cm
保証期間	2年（補充品除く）※
一般医療機器	
届出番号	27B1X00024000332
販売名	PARI ベロックス

※保証の対象は、コントローラーのみとなります

* 一般医療機器
届出番号：27B1X00024000332
販売名：PARI ベロックス

標準セット内容

- 吸入器本体（コントローラー、イヤープック）
- スマートマスクベビー
- 大人用ソフトマスク
- ベロックスケア
- ACアダプター
- キャリングケース

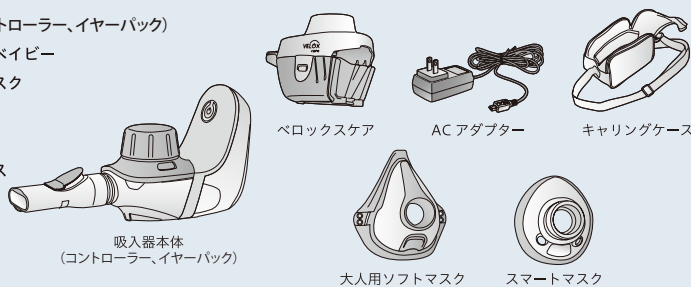

補充品	注文コード	品番	標準価格
PARI ベロックスケア	M23-005-01	055G6100	¥2,500
PARI キャップ	M23-005-07	055G3500	¥750
PARI ACアダプター	M23-005-02	055G7101	¥5,300
PARI スマートマスクベビー	M23-005-06	055G4500	¥4,500
PARI キャリングケース	M23-005-03	055G8000	¥2,600
PARI ベロックスイヤープック*	M23-005-04	055G3010	¥13,000
PARI 大人用ソフトマスク	M23-004-29	041G0740	¥1,900

別売品	注文コード	品番	標準価格
PARI ベビーマスク（新生児用）ベビーバント付	M23-004-22	041G0700	¥6,000
PARI ベビーマスク（小）ベビーバント付	M23-004-23	041G0701	¥6,000
PARI ベビーマスク（中）ベビーバント付	M23-004-24	041G0702	¥6,000
PARI ベビーマスク（大）ベビーバント付	M23-004-25	041G0703	¥6,000
PARI ベビーバント	M23-004-21	041E0701	¥1,300

特長

- 小型
- 軽量
- 静粛性
- スピーディー
- 携帯性

急性/慢性気道疾患をもつ患者様に



スピーディーかつ効率的な吸入治療：

約3分間の吸入時間で薬液（サルブタモール）2.5mlを吸入することが可能です。



携帯に便利：AC電源または電池での使用が可能なコンパクトサイズ設計。

※本体重量：110g（電池含まず）/140g（電池含む）



静かな動作音：

使用時の動作音が小さく、周囲に不快感を与えません。



取扱が簡単：少ないパーツ構成で軽量。

人間工学にもとづいた設計で取り扱いが簡単。




常に安定した能力を発揮：


付属のVELOX®ケアを使用し、簡単に短時間でメンテナンスが可能。

メッシュ振動技術による効率的な治療を提供

肺への有効な薬剤沈着率（5 μ m未満）[単位：%]

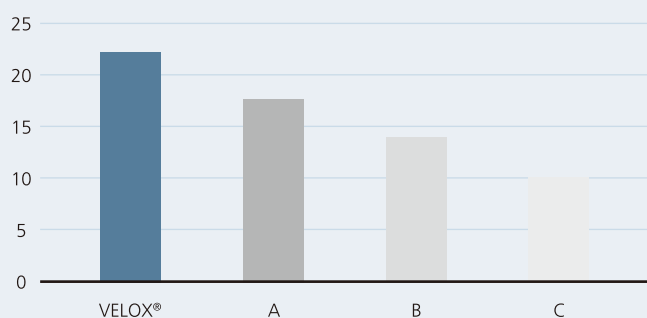

吸入時間[単位：分]

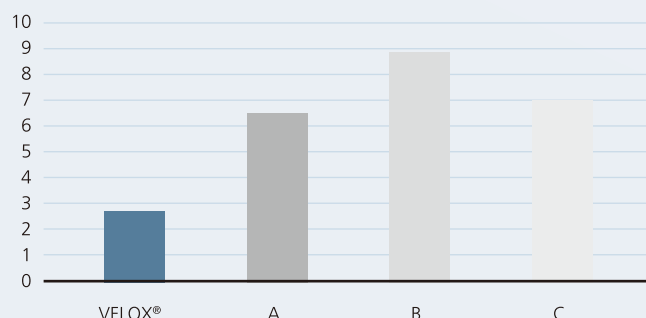

4種類のメッシュ式ネブライザーを比較し、
VELOXが最短時間で効果的な沈着薬剤量を提供します。

エアロゾルの特性

分時噴霧量：	497 mg/分
粒子径中央値：	3.8 μ m
5 μ m以下の粒子質量比率：	74%

<測定条件>

試験液：0.9%生理食塩水（2.5ml）
室温：23℃、湿度：50%
測定装置：Sympatec社 Helos
分時平均吸気流量：20ℓ/分


PARI Pharma GmbH（在ドイツ・グレーフェルフイング市）の社内測定による、成人の呼吸吸入
（ $V_T = 500$ ml; 15 bpm; In:Ex = 1:1）に使用可能なサルブタモールの噴霧量：2.5 mg / 2.5 ml

ネブライザーのすすぎ

VELOX®ケアを使用して、ネブライザーを週に一度すすいでください。

i VELOX®ケアを使用したリザーバーのすすぎによって、ネブライザーのメッシュ部分を機械的にフラッシングすることができます。これによりに見えないメッシュ部分の詰まりを除去します。(このすすぎによって、ネブライザー全体の洗浄および消毒ができる訳ではありません。)


- VELOX®ケアの側面のタブの固定を解除します。
- VELOX®ケアを開きます。

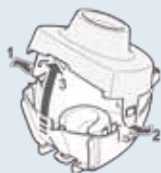


- リザーバーの開口部を下方に向けて、VELOX®ケアに入れます。青色のバルブが上になるようにセットします。



- VELOX®ケアを閉じ、タブを固定します。

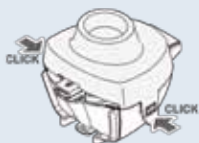

- VELOX®ケアをコントローラーに接続します。

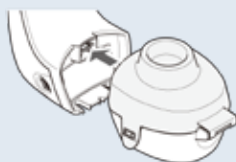

- コントローラー下側のタブを固定します。



- VELOX®ケアに蒸留水を2.5 ml充填します。



ACアダプターを使用した作動：

- ACアダプターのUSBプラグをコントローラーに接続します。
- ACアダプターを適切な電源コンセントに接続します。
- ▶これでVELOX®ケアの作動準備は完了です。



- コントローラーの電源ボタンを押して、すすぎを開始します。



- ▶洗浄開始時にピープ音が1回鳴り、ボタンのLEDが緑色に点灯します。

- ▶洗浄機能が実行されます。

- ▶洗浄終了時にピープ音が1回鳴り、ボタンのLEDが消灯します。

- 洗浄がすべて完了次第、電源ボタンを押して、本装置のスイッチをオフにします。

- コントローラー下側のタブの固定を解除し、VELOX®ケアをコントローラーから取り外します。

- VELOX®ケアの側面のタブの固定を解除し、VELOX®ケアを開きリザーバーを取り出します。



- VELOX®ケアおよびリザーバーを水道水ですすぎます。

■PARI製品のお問い合わせ



0120-799-221

受付：9：00～17：30（土・日・祝日を除く）

PARI

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

Muranaka
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

〒540-0036 大阪市中央区船越町 2-3-6

☎06-6943-1221(代) FAX06-6947-5360

総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2

☎0725-53-5541(代) FAX0725-53-5641

東京支店 ☎03-3813-9211(代) FAX03-3813-9217

札幌営業所 ☎011-737-9121(代) FAX011-737-9122

仙台営業所 ☎022-274-7780(代) FAX022-271-8448

埼玉営業所 ☎048-844-3500(代) FAX048-844-3501

金沢営業所 ☎076-286-4531(代) FAX076-286-0490

名古屋営業所 ☎052-709-7111(代) FAX052-709-7116

村中船越ビル ☎06-6943-1159(代) FAX06-6946-0184

米子営業所 ☎0859-33-6231(代) FAX0859-33-7930

広島営業所 ☎082-532-1800(代) FAX082-233-8818

福岡営業所 ☎092-473-0123(代) FAX092-474-1363



スマートフォン・タブレット端末から
商品の説明動画をご覧いただけます。

P1811.2000