


自宅でプロの傷あと*ケアを再現！

アトレスケアは伸ばして貼るだけ！
自分でいつでも手軽に傷あと*ケアを実現できます。

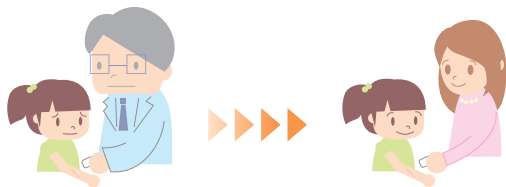

自分で積極的に傷あと*ケアする時代へ

テープを伸ばし、傷あとに当てて貼るだけ。自宅でプロの処置を再現できるように、テープの構造や手順にこだわりました。貼り替えも自分でできるので、長期間の傷あとケアもストレスなく、快適に続けられます。

特長1 傷あと*だけに『寄せる力』を加える


伸ばしたテープの縮む力を利用して、
広がろうとする傷あと*に
ピンポイントに寄せる力を加えます。

中央だけが均一に縮むから、
『寄せる力』が傷あと*だけに！



テープを左右にひっぱると、
切り込み部分だけが凸凹状に均一に伸びます。
そのまま傷あとに貼ることで、
傷あと部分だけ、
ピンポイントにテープが縮みます。

傷あとと周辺部は、
皮膚トラブルが起きにくい！

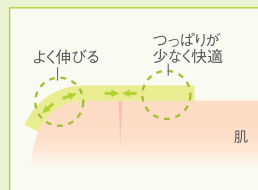

テープを貼っている傷あと以外の部分や
肌の凹凸・曲面部分には
やわらかくフィットし、つっぱりません。
テープはとても肌になじみやすいので、
皮膚トラブルが起きにくいです。

よくあるご質問

Q アトレスケアはどんなところに使うのですか？


A 縫合した傷の抜糸後すぐの傷あと*にご使用いただけます。その際、
滲出液や血液が出ていれば、ご使用をお控えください。

Q どのくらいで交換したらいいですか？

A 2～3日に1回を目安に交換してください。はがれてきたら、貼りかえ時
です。

Q 傷あとがテープよりも大きい場合はどうしたら良いですか？

A 右図のようにテープは隙間を空けずに、少しでも
重なるようにして貼り、傷あと*の長さに合わせた
枚数を使用してください。

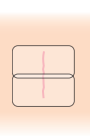

Q テープを貼ったまま、お風呂に入ってもはがれませんか？

A アトレスケアは防水性があります。そのため貼ったままでの入浴や
シャワー浴が可能です。

Q アトレスケアはどうやってはがせば良いですか？

A テープのふちを優しくこすり、めくる部分を作
ります。傷あとに刺激を与えないよう、やさし
くゆっくりはがしてください。



アトレスケア規格表

※販売希望小売価格には、消費税は含まれておりません。

規格	サイズ	品名コード	販売希望 小売価格	入数
No.S10	25mm×50mm	YB-Q2550S1	980円	10枚
No.S30	25mm×50mm	YB-Q2550S	2,700円	30枚
No.M10	50mm×50mm	YB-Q5050S1	1,980円	10枚
No.M30	50mm×50mm	YB-Q5050S	5,400円	30枚

用途：抜糸後の傷あと*の被覆保護

製品のご購入

楽天直販 アトレスケア 検索

テープが医療にできること、もっと。

skinix®

www.skinix.jp

株式会社 共和 メディカルグループ

大阪本社：〒557-0051 大阪市西成区橋3-20-28

TEL: 06-6658-8217

FAX: 06-6658-8101

東京支店：〒135-0016 東京都江東区東陽5-29-16

TEL: 03-5634-3843

FAX: 03-5634-3845

札幌・仙台・名古屋・熊本

【使用上の注意】●アトレスケアは抜糸後の傷あと*に
使用する未滅菌のテープです。直接創部に貼らないで
ください。●安全にお使い頂くため、アトレスケアの使
用に際しては、必ず医師の指示に従ってください。●本
品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・水泡等があら
われた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師に
相談してください。●貼付部分の水分や汚れはよく拭
き取り、清潔にしてください。水気があるときにつく
場合があります。●油分の多い部位に貼るとはがれ
やすいため、顔や頭部に貼る場合は注意して使用し
てください。●テープ部のはがれ・浮き等がないよう貼
付けてください。また、観察時にそれらが発見された場
合には、貼りかえてください。●関節等を使用する場合は、
皮膚を伸ばした状態で使用してください。（医師から
具体的な指示がある場合はその指示に従ってくださ
い。）●救急絆創膏にかぶれやすい方は、注意して使
用してください。●アトレスケアは伸縮性のある商品ですが、
引っ張りすぎるとテープが破れたり、ちぎれたりする
場合がありますので注意して使用してください。
●傷あとと長さにあわせて枚数を使用してください。
【保管方法】●直射日光を避け、湿気の少ない涼しい
所で保管してください。●小児の手の届かないところに
保管してください。

【テープ交換の目安】2～3日に一回を目安に交換し
てください。はがれてきたら貼りかえ時です。

【★注釈】傷あととは滲出液や血液などがなく、
創面がふさがっている状態のことを指します。

ZZ016 19.11-10.000 第6版

skinix®

気になる傷あと、どうしていますか？
抜糸後からはじめる、
“本格” 傷あとケア。

傷あとケア専用テープ

アトレスケア

Sサイズ



Mサイズ



www.skinix.jp

積極的にはじめる、傷あとケア専用テープ

アトレスケア誕生。

抜糸後の傷あと、
気になるなあ。

帝王切開の傷あとって
どうなるんだろう…。

抜糸した後、
ケロイドにならないかしら？

「抜糸も終わって、傷はふさがったけれど…。」
傷が癒えたあとも、心配や不安が残ります。

そこで新たに誕生したのが、
傷あとケア専用テープ“アトレスケア”。

寄せる力を加えることで、傷あと*は広がりにくく、
革新的な傷あとケアを実現できます。

特長1 傷あと*だけに『寄せる力』を加える

特長2 まるで貼っていないような感覚


アトレスケアで先進の傷あとケアを。

安全にお使いいただくため、使用に際しては必ず医師の指示に従ってください。

特長2 まるで貼っていないような感覚

先進の医療用テープ“アトレスケア”のフィルムは、透明でわずか0.007mmの薄さ！
髪の毛と比べると、約1/20の薄さで、ムレ・つぶりがほとんどありません。
そんな肌への優しさを極限まで追求した、快適な透明のテープです。
貼っていることを忘れるほどの自然な貼りごちを実現しました。


汗をかいてもムレない！

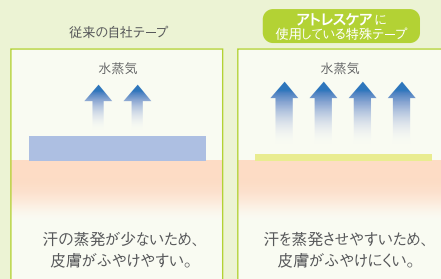

水蒸気透過性が非常に高く、
汗の蒸発を妨げないので、
長時間貼っていても
ムレによるかゆみや
不快感がほとんどありません。

水蒸気透過量が **約4倍！**^{*}
テープを透過する水蒸気量の差(24時間1㎡当たり)

伸縮性があるからつぶらない！

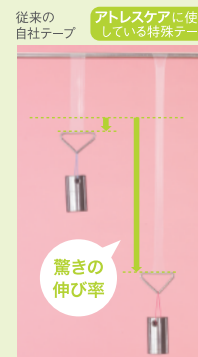

伸縮性に優れているため、
動きに沿ってしなやかに伸び縮みし、
皮膚ストレスを軽減します。
水ぶくれや赤みなど皮膚トラブルの原因となる、
肌の固定やつっぱり感から開放します。

伸び率の差が **約15倍！**^{*}
同重量のおもりを吊るした時の伸び率の差


※当社比

貼り方手順 ※傷から血液等が出ていないことをご確認ください。

■両手貼り



裏の白い紙(大きい方)を途中まではがします。

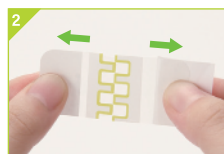

テープを表に返し、両手で左右の凸の切り口が綺麗に揃うまで徐々に引っ張ります。



テープ中央に傷あと*を合わせ、引っ張ったまましっかり貼ります。



白い紙を全てはがし、上から押さえ、テープを端までしっかり貼ります。



表の透明なフィルムをゆっくりはがします。



最後にテープを肌になじませて、完成です。テープは透明なので目立ちません。

■片手貼り



裏の白い紙(小さい方)をはがします。



テープを傷あと*に合わせ、①ではがした部分を貼ります。



裏の白い紙(大きい方)を途中まではがします。



②で貼ったところを押さえ、他の指で反対側の端をつまんで引っ張ったまま、しっかり貼ります。




残りの白い紙を全てはがし、上から押さえ貼り、表の透明なフィルムをゆっくりはがします。




最後にテープを肌になじませて完成です。テープは透明なので目立ちません。

貼り方の
コツ


a b c

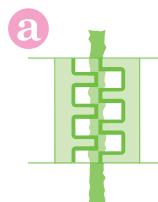

左右の凸の切り口が綺麗に揃うまで引っ張ります。テープの中心と傷あと*が重なるようにして、伸ばした状態で貼ります。

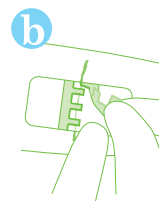

透明なフィルムをはがす時は貼っているテープをはがれないように、テープを押さえながら、ゆっくりはがします。特にテープの周囲は、注意しながらはがします。

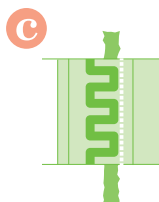

テープを貼るときに、図のように合わせるようにテープを伸ばして貼るときに傷あと*が中央にきます。