

フェザー[®] メディカル製品カタログ


替刃式剃毛用レザー／ディスポガード／ディスポーザブルレザー／チョッキン／バンデージスニップ



替刃式剃毛用レザー ソフトな肌あたりを実現したハイグレードレザー


分解・組み立てがワンタッチのバネ式ですので、替刃の交換、ホルダーの洗浄が簡単です。
替刃は剃毛用ガードブレード、剃毛用ブレードをご使用ください。

- 添付替刃：剃毛用ガードブレード(3枚入)

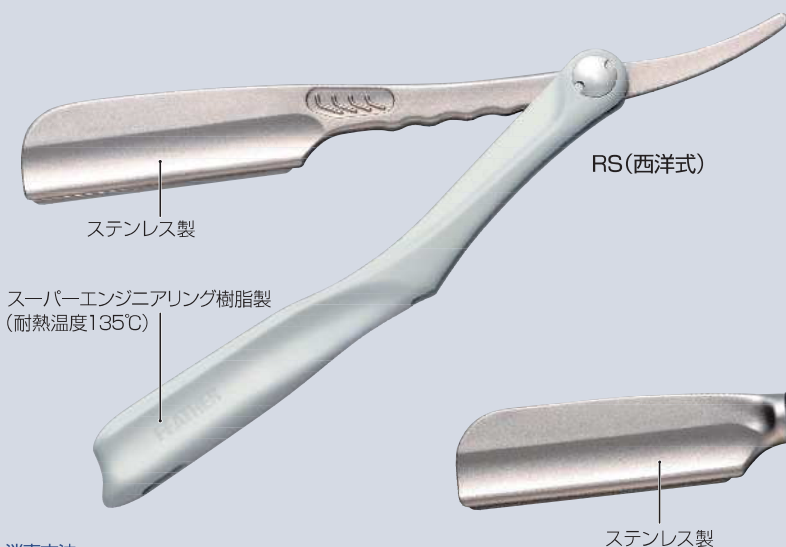

先端の丸みと刃の出がポイント

刀身先端の「丸み」と「刃の出」のバランスが肌への負担を軽減し、今までにないソフトでなめらかな肌あたりの良さを実現しました。(当社比)

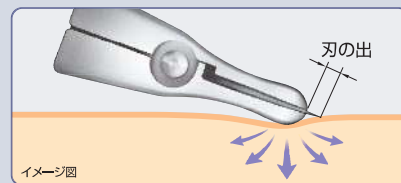

消毒方法

⚠ 必ず替刃を外してから行ってください。

消毒方法	
☐	煮沸消毒
☐	オートクレープ処理
☐	エタノール消毒 ※1
☐	EQGガス滅菌処理
☒	次亜塩素酸ナトリウム消毒 ※2

●消毒液への長時間の漬け込みは避けてください。
●誤った消毒方法は、製品に不具合が生じる原因となりますのでご注意ください。

※1 消毒用エタノール(76.9～81.4VOL%)を使用してください。


※2 次亜塩素酸ナトリウムでの消毒は、長時間にわたるとホルダーが腐食してきますので避けてください。

替刃セット方法

フェザー剃毛用レザーの替刃保持機構は全てバネ式です。本体峰中央(バネ内蔵部)を指でつまみ、替刃セット部を開いてセットします。

- 上向きに行うと安全にセットできます。
- 替刃ディスペンサーからも直接セットできます。
- 替刃が正しくセットされているかを確認した上でご使用ください。

※ケガをしないよう十分ご注意ください。

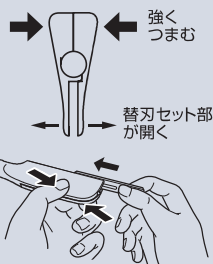

替刃の外し方

刃先を下に向けて本体峰中央(バネ内蔵部)を図のようにつまむと、替刃は自重で落下します。

- 刃先にヒゲかす等が付着したままですと、外しにくくなる場合があります。
- ご使用済の替刃はディスペンサーの捨て刃収納部へ入れてください。


※ケガをしないよう十分ご注意ください。



剃毛用ガードブレード

肌当たりがソフトで、安全性の高い半円形ガード付替刃です。刃が肌に強く当たらないので、耐久性にも優れています。

刃長50mm、全体厚0.35mm(刃厚0.15mm、ガード厚0.1mm)
〈15枚入〉

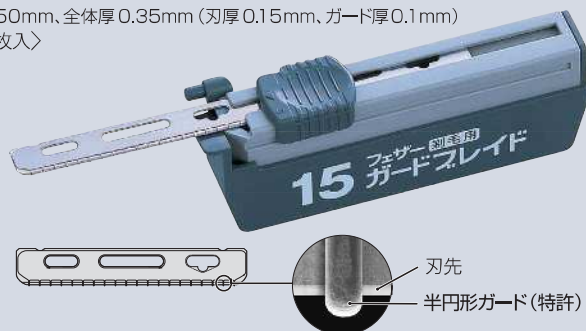

剃毛用ブレード


プラチナコーティングと樹脂コーティング加工されたステンレス刃は、なめらかな剃り味と耐久性に優れています。

刃長50mm、刃厚0.254mm
〈10枚入〉




ディスポガード

ディスポーザブルタイプの剃毛用カミソリです。ガード付ですのでなめらかな剃り味と耐久性に優れています。

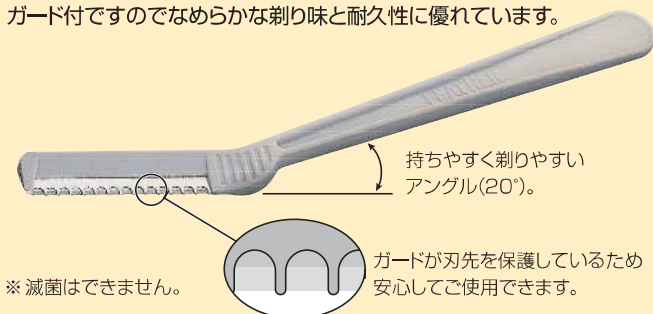

ディスポーザブルレザー

広範囲の剃毛に最適なディスポーザブルタイプの剃毛用T型両刃カミソリです。

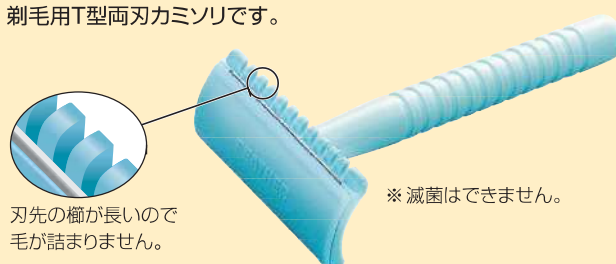

チョッキン コアラ/クロス (伸縮性のストラップ付)

粘着テープを切っても、刃がベタつかないフッ素コーティング加工です。
樹脂製ガード付きですので、カットする時も安心です。



フッ素コーティング加工

樹脂製ガード

クリップ式ホルダー付で
出し入れもスムーズ。
ポケットもいためます。



伸縮性のストラップ



コアラピンク



コアラブルー



コアライエロー



コアラグリーン



クロスピンク



クロスブルー



クロスイエロー



クロスグリーン

バンデージスニップ

一般医療機器 届出番号:21B2X10001081003

やわらかいガーゼから硬い金属板まで対象物を問わずに使用できます。
グリップは耐熱性樹脂を使用していますのでオートクレーブ滅菌が可能です。

特殊ステンレス鋼製
(ピラニア刃付)

刃の先端に丸味がありますので、
携帯時・使用時に危険がありません。

