

FDI エルゴグリフクラッチ

エルゴダイナミック

取扱説明書



はじめに

この度は、FDI エルゴグリフクラッチ エルゴダイナミック をご購入いただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書は、FDI エルゴグリフクラッチ エルゴダイナミックの正しい取扱方法について説明しています。

FDI エルゴグリフクラッチ エルゴダイナミック を正しくご活用いただくために、ご使用前に必ず本書をお読みください。

※お読みになった後は、お使いになるときにいつでも見られるよう、大切に保管してください。

目 次

1. 安全上の警告、禁忌・禁止、注意	2
2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造	4
3. 一般的な使用方法とその注意事項	5
4. 清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項	6
5. 技術仕様	7
6. アフターサービスとその連絡先に関する事項	7
7. 保証	8

1. 安全上の警告、禁忌・禁止、注意

使用する前に、この「安全上の警告、禁忌・禁止、注意」を、よく読んで、正しくお使いください。

- ※ ここに示した注意事項は、製品を安全かつ適正に使用して、使用者等への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ※ 危害や損害の大きさと切迫の程度を明確にするため、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「禁忌・禁止」「注意」の三つに区分して示しています。


図記号の例	
 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。
 禁忌・禁止	人が死亡または重症を負うことが想定されるため、避けるべき患者や使用方法を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。
 ポイント	使用上のポイントや、確認いただきたいことを示します。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 注意

1. 本品は、杖（歩行補助具）です。自立歩行ができる人がより安定して歩行出来るよう補助的に使用するものです。使用目的以外に使用しないでください。
2. 全体重をかけないでください。
3. 体重をかけすぎると肩や手を痛めることがあるため、下記の方は使用しないでください。
 - ・杖無しで歩行できない方
 - ・手すりにつかまらなければ歩行できない方
 - ・介助者なしでは歩行できない方
 - ・リハビリ中等で、体重の一部を支えないと歩行できない方（医師指導の下での使用は除く）
4. ロッククリップを押し込む際に、指を挟まないように注意してください。
5. 使用前に各部を点検し、傷、亀裂、変形、ガタつき等がある場合は使用しないでください。破損するおそれがあります。
6. 使用前及び使用中、ロッククリップが確実に固定されていることを確認してください。
7. 足ゴムが破れている、すり減っている、抜けやすくなっている場合は新しい足ゴムと交換してください。
8. 身体に合った長さに調節してください。斜めに杖を突くと転倒し負傷することがあります。
9. 滑りやすいところ（濡れた路面、雪道等）、段差のあるところはじゅうぶん注意してください。転倒し負傷するおそれがあります。
10. 道路の側溝や凹みのある場所では、先端がはまり込まないようにじゅうぶん気を付けてください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

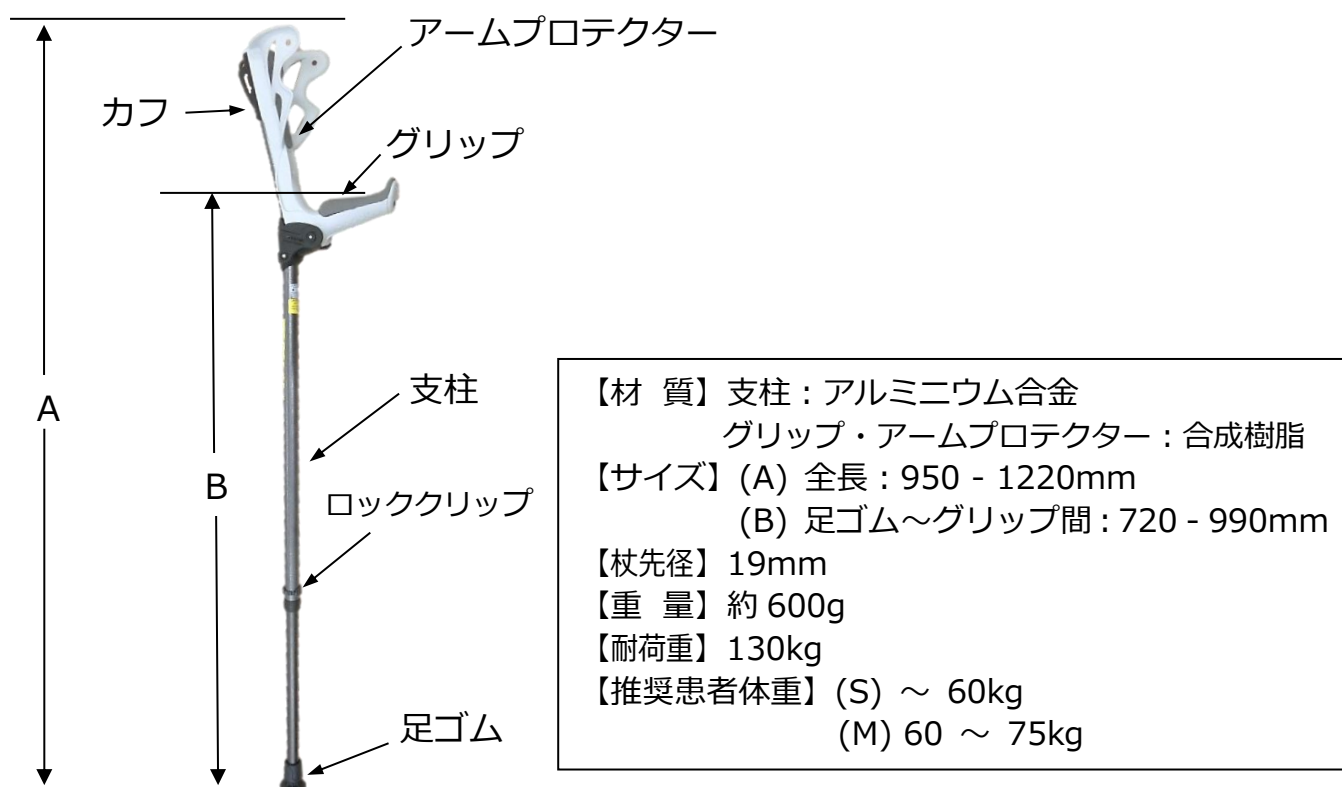

注文コード	品 番	商 品 名
M01-000-01	EDS/05/02	FDI エルゴグリフクラッチ,エルゴダイナミック, ホワイト S
M01-000-02	EDS/02/06	FDI エルゴグリフクラッチ,エルゴダイナミック, ブラック S
M01-000-03	EDM/05/02	FDI エルゴグリフクラッチ,エルゴダイナミック, ホワイト M
M01-000-04	EDM/02/06	FDI エルゴグリフクラッチ,エルゴダイナミック, ブラック M

補充品

注文コード	品 番	商 品 名
M01-000-10	BA1/02/00	エルゴグリフクラッチ用足ゴム
M01-000-11	GO1/06/00	エルゴグリフクラッチ用ウルトラソフトグリップ,イエロー
M01-000-12	GO1/02/00	エルゴグリフクラッチ用ウルトラソフトグリップ,ブラック
M01-000-13	FP1/06/00	エルゴグリフクラッチ用アームプロテクター,イエロー
M01-000-14	FP1/02/00	エルゴグリフクラッチ用アームプロテクター,ブラック
M01-000-15	LD/1/02/00	エルゴグリフクラッチ用高さ調整ロッククリップ

3. 一般的な使用方法とその注意事項

支柱の長さ調節

1) ロッククリップの取外し

ロッククリップのロックを外し（図1）両手で支柱（穴）から外します（図2）。



図1



図2

2) 支柱の長さ調節とロッククリップの取付け

支柱を伸縮し長さ調節をした後、固定穴を合わせます（固定穴の間隔 25mm ピッチで12段階調節が可能）。両手でロッククリップを支柱に押し込み（図1）、反対側をロックし（図2）、固定します（図3）。



図1



図2

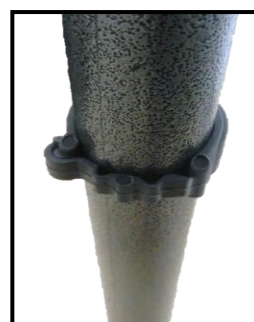


図3


注意

ロッククリップを押し込む際に、指を挟まないように注意してください。

ポイント

【支柱の長さ調整の目安】

腕の力を抜いて自然な状態で立ち、腰骨の最も出っ張っているところと、地面に垂直に立てた本品のグリップ上面（右図赤線）が合うように調節してください。

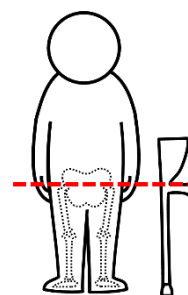

4. 清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

4-1 清掃

- 1) 汚れや水濡れを柔らかい布で拭き取って、乾燥させます。
- 2) 汚れがひどい場合、汚れが落ちにくい場合は中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ります。

4-2 足ゴムの交換

- 1) 取外し：使用済みの足ゴムをねじって外します(図 1→2)。
- 2) 取付け：支柱を新しい足ゴムの奥までねじりながら差し込み、固定します(図 3→2)。

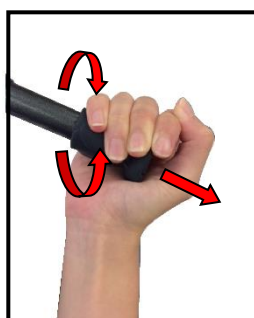


図 1



図 2

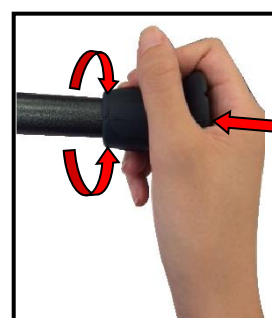


図 3

4-3 グリップの交換

- 1) 取外し：ペン等でグリップ部にある黒いボタンを押し（図 2）、使用済みグリップを外します（図 3）。



図 1



図 2



図 3

- 2) 取付け：新しいグリップをグリップ部に押し込み、取付けます（図 1→2）。



図 1



図 2

4-4 アームプロテクターの交換

- 1) 取外し：カフを押さえ、使用済みアームプロテクターを上から徐々に外します
(図 1、2→3)。

正面から見た図

上から見た図



図 1



図 2



図 3

- 2) 取付け：新しいアームプロテクターの裏の突起部をカフの穴に押し込み取付けます
(図 1→2)。



図 1



図 2

4-5 保管

安定した場所で倒れないように保管します。

5. 技術仕様

耐用期間：1 年〔自己認証（当社データ）による〕

6. アフターサービスとその連絡先に関する事項

輸入業者：**村中医療器 株式会社**



〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL 0725-53-5546

7. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 本書の提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
 - (ヘ) 消耗部品。
 - (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
 - (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、FDI エルゴグリフクラッチ エルゴダイナミックをお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名: FDI エルゴグリフクラッチ エルゴダイナミック
製造番号/記号:
ご芳名

ご住所

TEL. ()

お買い上げ店名

印

住所

TEL. ()

お買い上げ日 年 月 日

輸入業者: 村中医療器株式会社

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号 TEL 0725-53-5546