

Stomacare Accessory

ストーマケアアクセサリカタログ

Index

■ pluMuse プラミューズ モイスチャーローション	2
■ pluMuse プラミューズ 洗淨フォーム	2
■ MMI ストーマヘルニアベルト(装具固定用ベルト)	3
■ MMI 伸縮チューブ(腹帯チューブ)	4
■ シェルターゲル(顆粒状高分子吸収凝固剤)	5
■ 入浴パッド	5
■ リムーバーパッド(粘着剥離剤)	6
■ ウロプレップ(皮膚被膜剤)	6
■ BONIMED ストーマケア剪刀(ストーマケア専用ハサミ)	7
■ BONIMED オイレンブルヒ知覚計	7
■ MMI ストーママーキングディスク	8
■ BONIMED サージカルスキンマーカー	8
■ レッグバッグ	9
■ 接続延長チューブ	9
■ ウリナリードレナージバッグ	9
■ MMI カテーテルホルダー	10

pluMuse プラミューズ モイスチャーローション

5種類のヒト型セラミド配合

肌にうるおいを閉じ込め、乾燥を防ぐ弱酸性保湿ローション

特 長

- ヒト型セラミド5種類配合(セラミドEOP・NG・NP・AG・AP)で肌をすこやかに保ちキメを整え、はり・ツヤを与えます。
- セラミドのほかにヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス等の保湿成分を配合。さらに保湿成分の浸透を促すシア脂、スクワランをプラス。お肌をやわらかく保ちながら保護します。
- グリチルリチン酸2K配合により肌荒れを防ぎます。
- 無香料・無着色・防腐剤フリー・アルコールフリーで、敏感なお肌にも安心です。
- 少量で伸びが良く、素早く肌に馴染みます。

イメージ



ボトルタイプ
300g

仕 様

- 入 数：1本

注文コード	品 番	規 格	標準価格	税込価格
730-800-02	ML300	ボトルタイプ 300g	¥900	¥990

pluMuse プラミューズ 洗淨フォーム

5種類のヒト型セラミド配合

泡立ても洗い流しも不要の弱酸性洗淨フォーム

特 長

- やわらかな泡で汚れを浮かせ洗淨し、皮膚を清淨にします。
- ストーマケアをはじめ、全身の洗淨・清拭にご使用いただけます。
- ヒト型セラミド5種類配合(セラミドEOP・NG・NP・AG・AP)で肌をすこやかに保ちキメを整え、はり・ツヤを与えます。
- セラミドのほかにヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス等の保湿成分を配合。さらに保湿成分の浸透を促すシア脂、スクワランをプラス。お肌をやわらかく保ちながら保護します。
- グリチルリチン酸2K配合により肌荒れを防ぎます。
- 用途にあわせて2サイズからお選びいただけます。

イメージ



150ml

500ml

仕 様

- 入 数：1本

注文コード	品 番	容 量	標準価格	税込価格
730-800-10	WF150	150ml	¥800	¥880
730-800-11	WF500	500ml	¥1,300	¥1,430

■MMI® ストーマヘルニアベルト(装具固定用ベルト)

ストーマ旁ヘルニアの方へ。

特 長

- 豊富なサイズバリエーション
開口径はφ68、78、90mmの3種類に、それぞれM、L、XL、XXLの4サイズあり、合計12タイプをご用意しました。
また、開口なしタイプもL、XLの2タイプをご用意しました。
- しっかりやさしく固定
ベルト幅が13cmと幅広いので、ストーマ旁ヘルニアをやさしく固定し装具もしっかり固定します。
- 安心装着
体にフィットするデザインのため快適な装着感です。

仕 様


- 材 質：ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、コットン他
※適応サイズが境界値になった場合は、大きい方のサイズをお選びください。



開口ありタイプ




開口なしタイプ

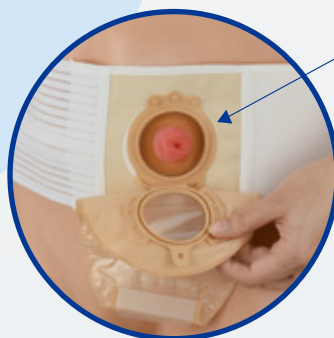

ツープース装具を使用の場合はベルトを付けたまま、ストーマ袋を交換でき、便利です。
(この場合、開口部からリング部分を出しておいてください)

開口部分は、バイアステープでパイピング加工しているためほつれません。

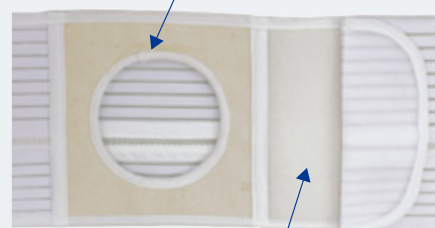


面ファスナーでしっかり固定します。



注意

- 本製品を使用の際は必ず**医師・認定看護師(ET、WOCN)**にご相談ください。
- 仰臥位(あお向け)になると、ヘルニアは自然と平坦に近くなります。その状態で、ヘルニアが突出しないようベルトを装着してください。
- 手洗いもしくはネットに入れての洗濯をお勧めします。洗濯後は形を整えて陰干してください。

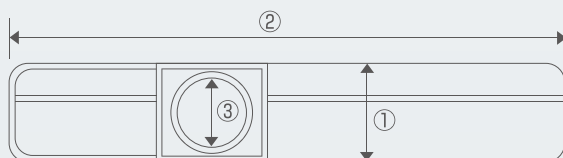

- ①幅………13cmの1種類
- ②全長…… (M) 83cm、(L) 92cm、
(XL) 107cm、(XXL) 122cmの4種類
- ③開口径…φ68mm、φ78mm、φ90mmの3種類

注文コード	品 番	開口径 (mm)	サイズ	ストーマ部位 胴回り (cm)	全長 (cm)	標準価格	税込価格
730-600-01	1068	φ68	M	60~75	83	¥7,500	¥8,250
730-600-02	2068		L	75~90	92		
730-600-03	3068		XL	90~105	107		
730-600-04	4068		XXL	105~120	122		
730-600-11	1078	φ78	M	60~75	83		
730-600-12	2078		L	75~90	92		
730-600-13	3078		XL	90~105	107		
730-600-14	4078		XXL	105~120	122		
730-600-21	1090	φ90	M	60~75	83		
730-600-22	2090		L	75~90	92		
730-600-23	3090		XL	90~105	107		
730-600-24	4090		XXL	105~120	122		
730-600-52	2000	開口なし	L	75~90	92		
730-600-53	3000		XL	90~105	107		

■MMI®伸縮チューブ(腹帯チューブ)



使用例

ストーマ装具の固定に。


特 長

- 装具の固定とストーマの保護に適しています。
- 吸湿効果があり、肌触りが良く体にやさしくフィットします。
- 1mのチューブ状になっているので、好みの長さにカットできます。
- 洗濯しても縮みにくい、またカットしてもほつれにくい素材です。


仕 様

- 材 質：コットン96%、ポリウレタン4%

全長の1/3または1/2ぐらいでのカットがおすすめです。

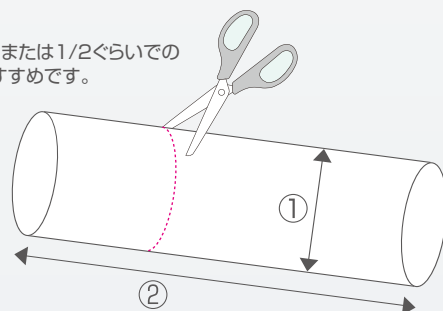

- ①幅……(S) 24cm、(M) 27cm、
(L) 30cm、(LL) 32cmの4種類
- ②全長…1mの1種類

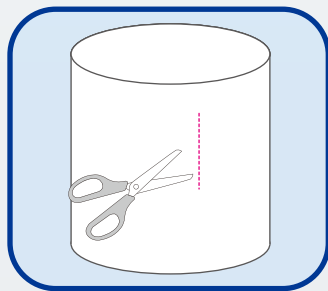

- ①ストーマ袋を出すために縦に切れ目を入れます。面板の大きさにより切れ目の長さは変わります。



- ②切れ目から袋部のみを出して装着します。



- ③裾を折り曲げて装具を固定させると便利です。



注意

手洗いもしくはネットに入れての洗濯をお勧めします。
洗濯後は形を整えて陰干ししてください。

注文コード	サイズ	胸回り (cm)	規 格	標準価格	税込価格
730-600-35	S	55～ 75	幅24cm、長さ1m	¥2,300	¥2,530
730-600-36	M	70～ 90	幅27cm、長さ1m	¥2,500	¥2,750
730-600-37	L	80～100	幅30cm、長さ1m	¥2,800	¥3,080
730-600-38	LL	90～120	幅32cm、長さ1m	¥3,200	¥3,520

■ シェルターゲル(顆粒状高分子吸収凝固剤)



スプーン一杯の効果



付属のスプーン1杯分(約2g)を
ストーマ袋に入れるだけ！

水様便でお困りの方へ。

特 長

- スプーン1杯(約2g)で水様性の便がゲル状の固体となり、漏れを防止し、臭いの拡散を抑えます。
- フィルターが目詰まりを防止するため、フィルターの効果が持続します。
- ストーマ袋内での跳ね返りを防止するため、保護剤の溶解を遅らせることができます。

仕 様

- 成 分：アクリル酸ポリマー
- 容 量：30g(1個あたり)
- 入 数：1箱(4個入)
- 付属品：スプーン1本




注意

- 排泄物の状態により凝固状態が変化するので、適宜使用量を調節してください。
- トイレで処理する場合は、処理ごとに流してください。つまりの原因になる恐れがあるため、一度にゲル状の固体となった排泄物を大量に流さないでください。

注文コード	品 番	標準価格	税込価格
730-003-22	610	¥3,200	¥3,520

■ 入浴パッド

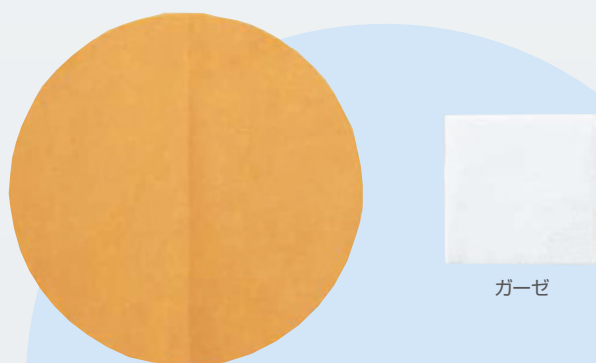

ガーゼ

粘着テープ(丸形)

使用例

公衆浴場、温泉、自宅の入浴用に…

特 長

- 旅行用としても便利な5枚入の袋が1箱に5袋入です。(計25枚)
- 装着方法はガーゼをストーマにあてて、その上からパッドを貼ります。

仕 様

- サイズ：(粘着テープ)φ120mm
(ガーゼ)50×50mm(4つ折状態)
- 入 数：1箱(25セット入)

注文コード	品 番	標準価格	税込価格
730-007-03	F00800	¥1,500	¥1,650

■ リムーバーパッド(粘着剥離剤)



使用後は石鹸とお湯で洗ってください。

皮膚に残った接着剤や皮膚保護剤の除去に。

特 長

- 柑橘系の香りの天然オイルと肌にやさしいラノリン・アロエベラ配合です。
- ノンアルコールのため低刺激です。
- 携帯用にとても便利な個別包装です。
- 装具、粘着テープなどをやさしくはがします。

仕 様

- サイズ：67×32mm(不織布シート)
- 成 分：天然オイル、有機湿潤剤、ラノリン・アロエベラ配合
- 入 数：1箱(50枚入)

注文コード	品 番	標準価格	税込価格
730-003-82	005600	¥2,600	¥2,860

■ ウロプレップ(皮膚被膜剤)



粘着剤を併用する際は、本品を塗布後よく乾燥させた上で、貼付してください。

皮膚のデリケートな方へ。

特 長

- 皮膚の上に薄い特殊ポリマーの膜を作り、敏感肌を保護します。
- ストーマ用装具、絆創膏などによる機械的刺激から皮膚を保護し、粘着剤をはがす時の痛みを和らげます。
- 腸液、尿などによる肌荒れを防止します。ストーマ周囲や排泄物の付着するところに塗布してください。


仕 様

- サイズ：67×32mm
- 成 分：低アルコール(イソプロパノール極少量)
- 入 数：1箱(50枚入)

注文コード	品 番	標準価格	税込価格
730-003-72	005500	¥3,000	¥3,300

■ BONIMED ストーマケア剪刀(ストーマケア専用ハサミ)

3250R(1P、2P兼用)

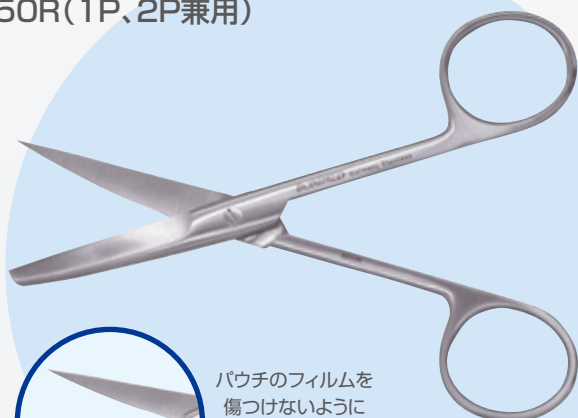

パウチのフィルムを
傷つけないように
先端下部の刃を
丸くしています

1250R(2P用)



保護剤をカットしやすい
ように先端下部の
刃がとがっています

丸くカットしやすいように刃先が弯曲しています。

特 長

- 使いやすい小型サイズです。
- 1P、2P兼用(3250R)と2P用(1250R)をご用意しました。
- テープ類、ウondケアドレッシング剤のカットにも使用できます。

仕 様

- 全 長：125mm
- 材 質：ステンレス
- 片側鋭
- 弯 曲



注意

3250Rと1250Rはどちらも**右利き用**です。

注文コード	品 番	規 格	標準価格	税込価格
730-500-02	3250R	1P、2P兼用	¥3,800	¥4,180
730-500-01	1250R	2P用		

■ BONIMED オイレンブルヒ知覚計



特 長

- ストーマサイズの計測に。
- 軽くて使いやすいデザインです。
- 100mmまで計測可能です。


仕 様

- 全 長：135mm
- 材 質：(本体)ステンレス鋼
(ジョウ先端部)ポリテトラフルオロエチレン

注文コード	標準価格	税込価格
669-762-01	¥2,300	¥2,530

一般医療機器
届出番号：27B1X00024000404
販 売 名：BONIMED オイレンブルヒ知覚計

■ MMT® ストーママーキングディスク

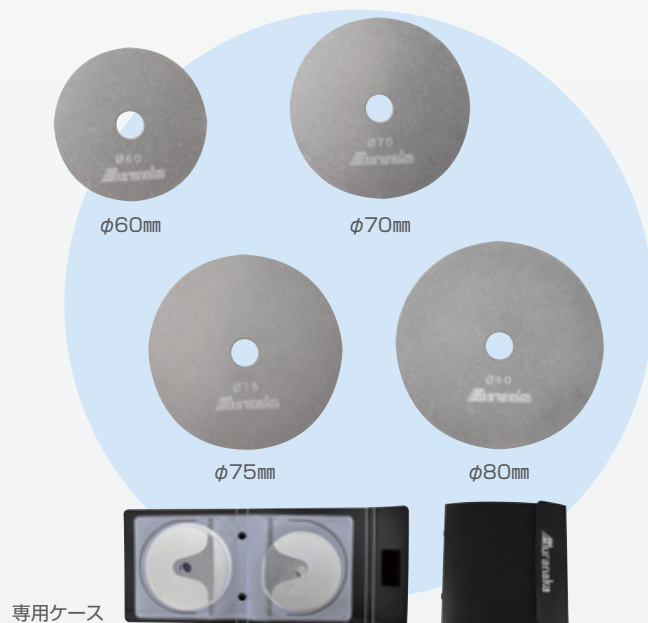

適切なストーマサイトマーキングの必需品!!
～術後のQOL向上のために～

特 長

- サイズはφ60、70、75、80mmの4サイズをご用意しました。
- 適切なストーマ造設位置の決定に使用してください。
- 保管に便利な専用ケース付です。

仕 様

- サイズ：φ60、70、75、80mm
- 材 質：ステンレス
- 入 数：1セット(ディスク4種類・専用ケース)
- ※ストーマサイトマーキングの際は、ディスクと一緒にサージカルスキンマーカーの使用をお薦めします。




ストーママーキングディスクは医師、認定看護師(ET、WOCN)など**医療従事者用**です。

注文コード	品 番	標準価格	税込価格
730-600-42	MD2	¥3,800	¥4,180

■ BONIMED サージカルスキンマーカー



ペン先の当て方を変えることで
2種類のラインを引き分けことができます

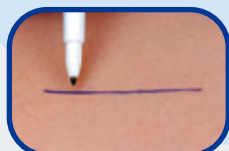

垂直 ▶ 細いライン



寝かせる ▶ 太いライン

手術後のマーキングや術前の
ストーマサイトマーキングに！

特 長

- 1本で細字と太字のラインを引くことができます。
- γ線滅菌済ですぐに使用することができます。
- スキンマークはイソプロピルアルコール(IPA)で消せます。
- 体にフィットする柔軟なメジャー(150mm)が付いています。

仕 様

- サイズ：φ10×135mm(キャップ除く)
- 重 量：約10g(1本あたり)
- 入 数：1箱(10本入)
- インク成分：ゲンチアナバイオレット
- 付属品：メジャー(150mm)、ラベル(W13×D50mm)×6
- ラテックスフリー

※γ線滅菌済
※皮膚専用



メジャー使用例

注文コード	品 番	標準価格	税込価格
030-147-01	2730PBX	¥2,500	¥2,750

■ レッグバッグ



シリコンバルブ採用。

特 長

- 逆流を防止するため、導入口にシリコンバルブを採用しました。
- 体にしっかりと固定するラテックスフリーのベルト付です。
- 指でキャップをねじって開閉するツイストキャップタイプの排出口を採用しています。

仕 様

- サイズ：W123×L252mm
- ベルト長：56cm
- 材 質：ポリ塩化ビニル
- 容 量：500ml
- ※EOG滅菌済

注文コード	品 番	標準価格	税込価格
730-004-02	07718T	¥1,400	¥1,540

■ 接続延長チューブ



レッグバッグとの使用に便利な接続延長チューブ。

特 長

- レッグバッグ(注文コード：730-004-02、品番：07718T)に接続して使用してください。
- レッグバッグ交換時にチューブ内からの漏れを防止するノズルキャップ付。
- 十分な長さがあり、必要に応じて好みの長さにカットできます。

仕 様

- 長 さ：45cm
- コネクター外径：φ8～11mm
- コネクター内径：φ7mm
- 材 質：ポリ塩化ビニル
- 付属品：ノズルキャップ

注文コード	品 番	標準価格	税込価格
730-003-90	6086	¥1,150	¥1,265

■ ウリナリードレナージバッグ



ウロパウチ、尿管カテーテル用の蓄尿バッグとして2000mlの大容量で夜間も安心。

特 長

- スライド式クランプを使用したドレナージバッグ。
- 滴下筒、逆流防止バルブによる尿路感染を防止。
- 多機能なベッド用フックや衛生的な排出口を採用。
- サンプルポート、エアーベント式。
- 目盛付。

仕 様

- 容 量：2000ml
- ※EOG滅菌済

注文コード	品 番	標準価格	税込価格
730-002-92	4200/1	¥870	¥957

■MMI®カテーテルホルダー



メタルフリー


ラテックスフリー




特 長

- カテーテルを迅速かつ簡便に固定します。
- 腰部でのカテーテル固定に適しており、PTCDのカテーテルや肥満の方の足にも使用できます。
- ハグロックシステムにより、カテーテルを確実に固定します。
- 体の動きに合わせてチューブが動くように固定されるため、患者さんへの負担が軽減されます。
- ストーマやコンチネンスケアにおけるレッグバッグ(畜尿バッグ)などのチューブ固定にも使用できます。
- 背中側のカテーテルにも簡単に装着できます。
- バンドは伸縮性があるため、装着部からズレることなくフィットします。
- ワンサイズで成人から小児まで幅広い範囲の患者さんに使用できます。


ハグロックシステム

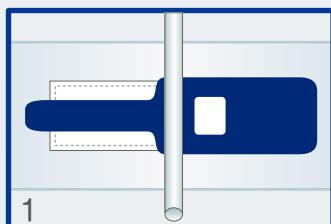


1
ブルータブの白い縫目の上にカテーテルを置きます

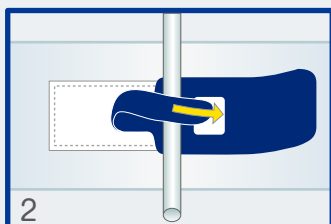

2
ブルータブ(細い側)を四角窓へ挿入します

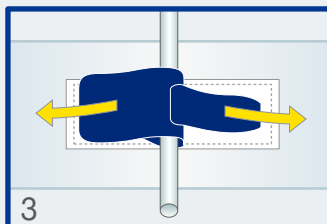

3
ブルータブ両側を引っ張り、カテーテルを固定します
固定し直す時には、タブの一方を外します

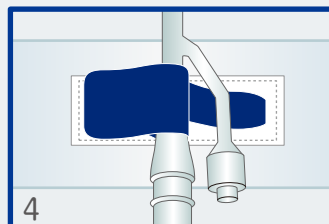

4
カテーテルのY字部分を図のように固定するとより確実な固定ができます

	足 用	腰 用
注文コード	N02-040-01	N02-040-02
品 番	CH4001	CH5001
サイズ	W50 × L590mm	W50 × L1100mm
固定範囲	約70cmまで	約150cmまで
材 質	(伸縮バンド)合成ゴム	(面ファスナー)ナイロン
重 量	約20g	約40g
洗濯条件	洗濯○(40℃以下)／乾燥機○	
標準価格	¥1,600	¥2,600
税込価格	¥1,760	¥2,860

※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。

※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。



村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360

総合センター ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641

札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122

埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501

名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116

北大阪営業所 ☎ 06-6386-0003 (代) FAX06-6386-0006

広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818

東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217

仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448

金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490

村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121

米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930

福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363

お問い合わせ／サンプル・カタログのご用命



0120-28-1228

受付：9：00～17：30（土・日・祝日を除く）

RS2202.2000