
# 患者さんの安楽のために。

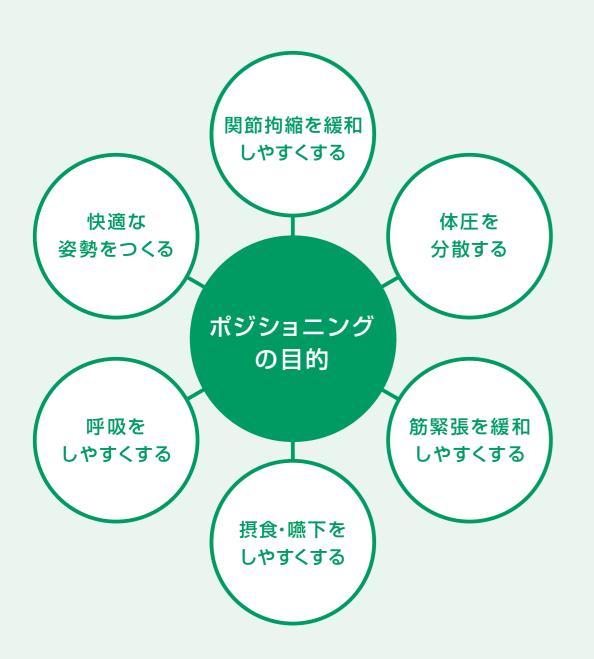

ポジショニングの目的は、体圧分散、摂食・嚥下や呼吸など身体機能 の活性化、ストレス軽減などのために、体位変換や良肢位保持を行う ことです。患者さんの安楽のためのポジショニングを、アルケアは商品と サービスを通じてサポートしていきます。



#### 《コンフィット》には、 $\alpha$ PLAの技術・ノウハウが 活かされています。





αPLA (アルファプラ) は株式会社タイカの床ずれ防止の 総合ブランドです。

# コンフィット Comfit

種類	商品コードNo.	規格		1袋入数	メーカー希望
		サイズ	重量	I衣八奴	小売価格(税抜き)
ジャンボ	19661	約83cm×83cm	約2.5kg	1⊐	¥22,600
ピロー	19671	約40cm×90cm	約1.0kg	1□	¥11,700
ウェーブ	19681	約65cm×75cm	約1.0kg	1⊐	¥14,600
ブーメラン(大)	19691	約50cm×90cm	約1.1kg	1⊐	¥13,800
ブーメラン(小)	19692	約44cm×74cm	約0.7kg	1⊐	¥11,700
スティック(大)	19701	約20cm×60cm	約0.4kg	1⊐	¥6,500
スティック(小)	19702	約20cm×40cm	約0.25kg	1⊐	¥5,500
==	19711	約30cm×50cm	約0.3kg	1⊐	¥5,500

#### 【別売】コンフィット専用 撥水カバー Comfit Water Proof Cover

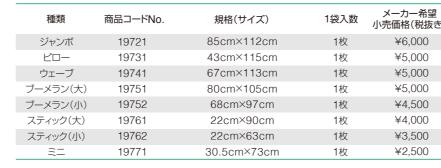

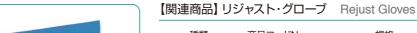

		,
種類	商品コードNo.	規格
_	20371	50cm×24.5cm

### ポジショニング 院内勉強会のご案内

「コンフィット」や「リジャスト・グローブ」を 用いたポジショニング院内勉強会を 貴院にて開催させていただきます。

このような ご要望を

- ●ポジショニングに興味があり、正しい知識を身につけたい
- ●適切なポジショニングスキルを院内で共有したい お持ちの方に ●使用シーンに応じて適切なポジショニングピローを使い分けたい

お問い合わせ コール センター 0120-770-863 生・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:00

# Χ̈́LCΛRE

### アルケア株式会社

介助補助手袋

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013 TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 www.alcare.co.jp

●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ:コールセンター





50枚

¥5,000



# for Best Care ALCARE

# コンフィット Comfit



なポジショニングを のために。

ポジショニングピロー Positioning Pillow

www.alcare.co.jp

# 適切なポジショニングをサポートする《コンフィット》

ポジショニングの目的に応じた姿勢保持を実現する 多様な形状と、患者さんの快適性を追求した 素材の組み合わせにより、適切な ポジショニングをサポートします。

### 中材 フィット性と保持性を両立

中材には、流動性に優れた「極小ビース」と復元性に優れた 「わた」を適正なバランスで配合しています。異なる2つの

素材を配合することで、体のラインにしっかり 着するフィット性と適切な形状を保ち続 ける保持性を両立。長時間使用における 患者さんの姿勢保持をサポートします。




フィット性()保持性

## 側地快適な使用感で適切な姿勢をキープ

表地には、ポリエステルとナイロンを3D構造にしたメッ シュ素材「フュージョン®」を使用しています。通気性・放湿性

に優れているため、長時間の継続使用でも蒸 れにくく、熱ごもりなどによる患者さんの 不快感を軽減します。また、裏地には、滑 りにくい編み構造のポリエステル素材を 使用し、使用中のズレや抜けを低減します。

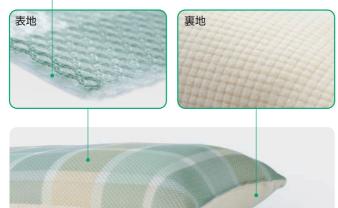

※フュージョンは旭化成せんい株式会社の登録商標です。

#### コンフィット専用 撥水カバー【別売】

撥水性に優れた《コンフィット専用 撥水カバー》を使用することで、 嘔吐物や排泄物などによる本体の汚染を軽減します。

※繊維製品品質表示規定に則った試験方法で、洗濯100回後も撥水性を維持することを

### 多様な形状で、様々な目的に対応が可能です。

### ジャンボ









円背のある方の座位の頭部と背部を支えます。




側臥位の上体を支えます。

#### ピロー





30°側臥位の背部を支えます。

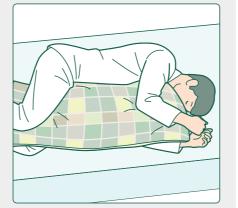

側臥位の上体を支えます。



ウェーブ



拘縮のある方の仰臥位の下肢を支えます。



側臥位の下肢を支えます。

### ブーメラン(大/小)





仰臥位の上肢を支えます。



仰臥位の頭部と胸郭を支えます。




座位の上肢を支えます。

### スティック(大/小)





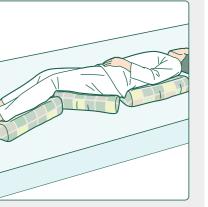

30°側臥位の背部と下肢を支えます。



仰臥位の足底を支えます。



車椅子の座位の背部を支えます。



高さ調整をします。



拘縮のある方の局所圧を緩衝します。