

ハイブリッドシーネ ニー

伸展タイプ



屈曲タイプ



	品番	種類	適用範囲(大腿周囲)	適用参考値(大腿長)	製品丈	ギプスシーネの種類 (ニールスプリントF)
伸展 タイプ	198001	S	35cm ～ 41cm	26cm以上	48cm	4号
	198002	M・L	41cm ～ 53cm	26cm以上	48cm	4号
	198004	LL	53cm ～ 65cm	26cm以上	48cm	5号
屈曲 タイプ	198101	S	35cm ～ 41cm	26cm以上	48cm	4号
	198102	M・L	41cm ～ 53cm	26cm以上	48cm	4号
	198104	LL	53cm ～ 65cm	26cm以上	48cm	5号

■大腿周囲に合わせて選んでください。大腿周囲は膝蓋骨の中心から10cm上を計測してください。計測値が2サイズのさかいになった場合は、大きい方のサイズを選んでください。
※股下の大腿長は参考値です。股下の大腿長は膝蓋骨中心から股のつけ根までの長さを計測してください。

販売名:ハイブリッドシーネ ニー
一般的名称:ギプス包帯(JMDNコード:33056000)
医療機器分類:一般医療機器
医療機器届出番号:13B2X00187000045

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止。
2. 使用する水の温度を、25℃より高くしないこと[化学反応による発熱から低温熱傷を引き起こすおそれがあるため。]
3. 創傷に直接当てないこと。

製造販売業者
日本シグマックス株式会社

本社:〒163-6033 東京都新宿区西新宿6-8-1
お客様窓口 TEL.0800-222-6122(通話料無料)
受付時間:9時～17時(平日)※土日、祝日、年末年始を除く

※本製品に関するお問い合わせはお客様窓口までお願いいたします。



インターネットで日本シグマックスの情報をご覧いただけます。
日本シグマックスのホームページ <https://www.sigmax-med.jp/>

- 予告なく製品の仕様が変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。その点をご了承ください。
- 各製品は、付属の使用説明書・添付文書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 各製品は、医師の指示に従って適切に使用してください。誤った使い方は怪我の原因となります。

ギプスシーネ
＋
膝関節用シーネホルダー

ギプス包帯
**ハイブリッド
シーネ ニー**



固定力

快適性

ギプスシーネと
膝関節固定帯の機能を合体。
膝関節専用のギプス包帯

ハイブリッドシーネ ニー

固定力①

スピーディーに固定できる 膝関節専用のギプス包帯。

ギプスシーネと膝関節用のシーネホルダーをセット。ギプスの固定力と着脱の簡便性を両立した膝関節専用のギプス包帯です。ギプスシーネをシーネホルダーにセットし、サポーターのように巻くだけで、スピーディーに膝関節のギプス処置ができます。



固定力②

患部の形状に合わせてホールド。

セットされているギプスシーネを膝裏部に挿入し固定します。
グラスファイバー製のギプスシーネのため、患部に合わせてしっかりホールドできます。



※ギプスシーネは、Sサイズ、M・Lサイズ：4号、LLサイズ：5号になります。

固定力③


伸展タイプと屈曲タイプの 2種類を用意。



固定力④

両サイドに軽量で強度の高い アルミステーを装備。

伸展タイプ、屈曲タイプとも両サイドに1本ずつアルミ製のステーを配置しました。また、M・Lサイズ、LLサイズではステーの挿入口を本体両サイドに2か所並列させ、ステーの位置を前後に微調整できます。

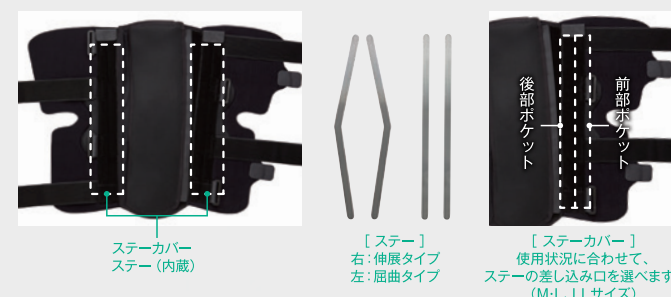

快適性①

シーネホルダーはクッション性や フィット性に優れた快適な装着感。



シーネホルダーにはクッション性のある素材を使用。特に本体背面の膝裏部にクッション材を追加して、フィット性を向上。ギプス固定時の過度な圧迫や局所的な圧迫を避ける形状にしました。また、大腿部の固定ストラップ付着部には伸縮素材を配置してフィット性を高めるなど、装着感を考慮した設計です。

快適性②

シーネホルダーのポケット部には 吸水拡散性の高い生地を使用。

ギプスシーネ硬化時に使用する水が肌およびベッドなどにしみこまないように、ギプスシーネを挿入するポケットの内側に吸水拡散性の高い生地を使用しています。

