

# フーローン・エクセル BLUE

非侵襲式DVT予防システム



# シンプルで効果的なDVT予防システム

異常発生時、ディスプレイ表示に合わせてアラーム音と本体上部の赤色LEDが点滅してお知らせします。



シングルレッグボタンを押すことで片肢のみの使用が可能です。  
※チューブは1本のみ接続してください。

LEDディスプレイには下肢にかかる圧力が表示されます。また使用中に異常が発生した場合はディスプレイに異常原因が点滅表示※1されるため原因の特定が容易で迅速な対応が行えます。

静音設計により患者の不快感を軽減します。



ポンプは、カフを約12秒間加圧し、続いて約48秒間加圧を休止する60秒周期に自動設定されています。


接続チューブはシンプルなスナップロック機構により、簡単にロックされます。



固定フックを標準装備しており、ベッド、手術台、ストレッチャーなどへの取付けが容易です。



本体に持ち手がついているので持ち運びやすい設計です。また、固定フックは収納できます。

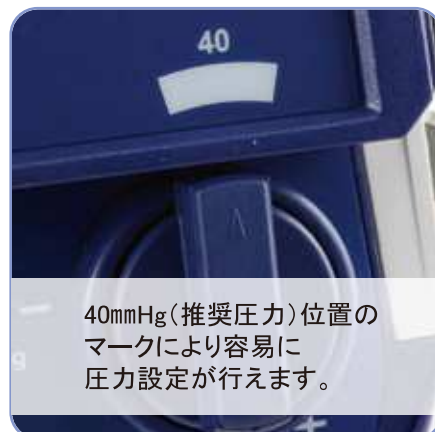

40mmHg(推奨圧力)位置のマークにより容易に圧力設定が行えます。

※1 異常発生時の表示：3種類／Lo(カフのチューブが外れている・カフから空気が漏れている)

Hi(チューブの捻じれによるキンク・ポンプ本体から接続チューブが外れている・シングルレッグモードのボタンが押されていない)  
F(故障：fault)

(注)接続チューブとポンプ本体が接続されていないと加圧中[Hi]が表示されます。


また接続チューブを本体に接続していてもカフのチューブが外れていると加圧中[Lo]が表示されます。

## 専用カフ ❖ cuff



用途に合わせてカフを選択でき、  
間欠的空気圧迫法を行うことが可能です。

- 面ファスナーにより簡単に装着でき、  
下肢にしっかりと心地よくフィットします。
- カフに縁取り加工を施したショートカフ、ロングカフと  
シンプルカフ(標準サイズのみ)をご用意しました。
- 通気性に優れています。

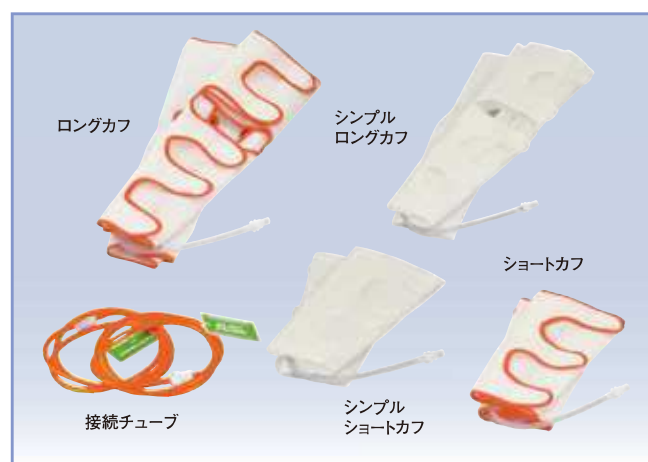

## ◆フロートロン・エクセル BLUE

### ■ 本 体

| 注文コード             | 品 番    | 規 格    | 標準価格              |
|-------------------|--------|--------|-------------------|
| <b>N43-001-15</b> | 247016 | 50Hz仕様 | <b>¥130,000</b> * |
| <b>N43-001-16</b> | 247026 | 60Hz仕様 | <b>¥130,000</b> * |

●フロートロン・エクセル BLUE 本体は50Hzと60Hz仕様の2種類があります。使用する地域の交流電源の周波数に合致する機種を使用してください。

### ■ 補充品：接続チューブ 1本

| 注文コード             | 品 番   | サイズ     | 標準価格           |
|-------------------|-------|---------|----------------|
| <b>N43-001-17</b> | SP057 | L1500mm | <b>¥9,000</b>  |
| <b>N43-001-18</b> | SP061 | L3000mm | <b>¥12,000</b> |

### ■ 別売品：専用カフ(シングルユース) 1組(2枚入)

| 注文コード             | 品 番       | 規 格                     | サイズ   | 適応サイズ       | 標準価格              |
|-------------------|-----------|-------------------------|-------|-------------|-------------------|
| <b>N43-001-19</b> | DVT5-JP   | DVT5ショートカフ(下腿用)         | Sサイズ  | 最大36cm(14") | <b>¥6,000</b> **  |
| <b>N43-001-01</b> | DVT10-JP  | DVT10ショートカフ(下腿用)        | 標準サイズ | 最大43cm(17") | <b>¥7,000</b> **  |
| <b>N43-001-02</b> | DVT20-JP  | DVT20ショートカフ(下腿用)        | Lサイズ  | 最大58cm(23") | <b>¥8,700</b> **  |
| <b>N43-001-03</b> | DVT30-JP  | DVT30ロングカフ(大腿・下腿用)      | 標準サイズ | 最大71cm(28") | <b>¥13,000</b> ** |
| <b>N43-001-04</b> | DVT40-JP  | DVT40ロングカフ(大腿・下腿用)      | Lサイズ  | 最大89cm(35") | <b>¥16,000</b> ** |
| <b>N43-001-07</b> | L501-M-JP | L501-Mシンプルショートカフ(下腿用)   | 標準サイズ | 最大43cm(17") | <b>¥5,000</b> **  |
| <b>726-210-13</b> | L503-M    | L503-Mシンプルロングカフ(大腿・下腿用) | 標準サイズ | 最大71cm(28") | <b>¥9,500</b> **  |

●専用カフは同一患者使用ですので、他の患者には再使用しないでください。

#### 《本体仕様》

- サイズ：W130×D275×H115mm(突起部および固定フックを除く)
- 重 量：2.7kg
- 電 源：AC100V 50Hzまたは60Hz
- 空気圧設定範囲：30～60mmHg(4.0～8.0kPa)
- 推奨圧力設定値：40mmHg(5.3kPa)
- 加圧／休止サイクル：約12秒間加圧、約48秒間休止
- 付属品：1500mm接続チューブ×2

\* 管理医療機器  
特定保守管理医療機器  
認証番号：221ACBZ100064Z00  
販 売 名：フロートロン・エクセル

\*\* 管理医療機器  
認証番号：228ADBZX00013000  
販 売 名：フロートロン ACS900

# arjo

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。  
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。  
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

**Muranaka**  
MEDICAL INSTRUMENTS Co., Ltd.

## 村中医療器 株式会社

<http://www.muranaka.co.jp/>

本社 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町 2-3-6 ☎ 06-6943-1221 (大代) FAX06-6947-5360  
総合センター 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野 2-8-2 ☎ 0725-53-5541 (代) FAX0725-53-5641  
東京支店 ☎ 03-3813-9211 (代) FAX03-3813-9217 札幌営業所 ☎ 011-737-9121 (代) FAX011-737-9122  
仙台営業所 ☎ 022-274-7780 (代) FAX022-271-8448 埼玉営業所 ☎ 048-844-3500 (代) FAX048-844-3501  
金沢営業所 ☎ 076-286-4531 (代) FAX076-286-0490 名古屋営業所 ☎ 052-709-7111 (代) FAX052-709-7116  
村中船越ビル ☎ 06-6943-1431 (代) FAX06-6941-7121 米子営業所 ☎ 0859-33-6231 (代) FAX0859-33-7930  
広島営業所 ☎ 082-532-1800 (代) FAX082-233-8818 福岡営業所 ☎ 092-473-0123 (代) FAX092-474-1363

P2001.2000