

コストダウンと自然環境に

10本単位で購入できる

ニプロ輸液セット eco を
ご存知ですか？

この形でお届けします。

PE
(ポリエチレン)

10本入



従来品
(50本入・箱入) の場合



置くスペースが
なくて困るわ

ゴミもあまり
出したくないし

できれば
必要な分だけ
購入したいわ

そんな悩みを
解決!!

10本入だと



置くスペース

省

廃棄物の処理

少

余剰在庫

少

医院・病室ごとに
ご利用しやすい単位で購入できます。



これが 地球環境 と 経済的 にも やさしい

ニプロ輸液セット eco です!



さらにこの輸液セットには
安全翼付針が一体型になったタイプもご用意しています。

セーフティシリーズ

メリット
1

接続の
手間いらず

メリット
2

清潔操作が
可能

しかも

針刺し事故が
防止できます!

詳しくは裏面へ

医療機器認証番号：219AABZX00039000 医療機器クラス分類：クラスⅡ(管理医療機器)

商 品 コード	JANコード	品番・規格	形 状	付 属 品		先端形状 セーフタッチ PSV	注射針の 太さ (G)	全長 (cm)	滴数
				びん針	クランプ及び チューブ径				
03-000	4987458030000	ISE-200Z			内径2.28 外径3.62			155	20滴 ≒ 1mL
03-500	4987458035005	ISE-200ST22 Z			内径2.28 外径3.62		22	187	
03-300	4987458033001	ISE-200ST23 Z			内径2.28 外径3.62		23	187	
03-600	4987458036002	ISE-200P			内径2.28 外径3.62			155	60滴 ≒ 1mL

10本入/袋



医療従事者の針刺し事故を防止します!

セーフティシリーズ®

針刺し事故対策製品
医療従事者の針刺し事故を防止します。
※安全翼付針一体型タイプ



ニプロが自信をもってお勧めする
セーフタッチ®PSV (安全機構付翼付針) について
ご説明します。

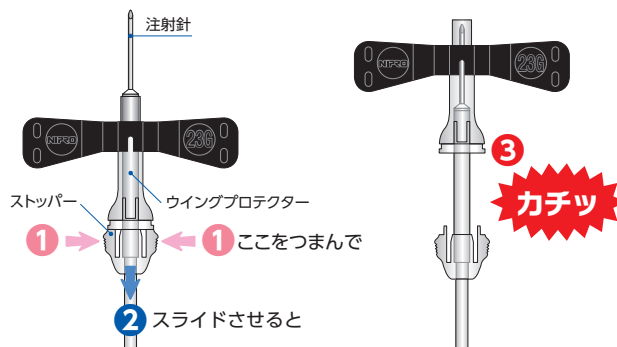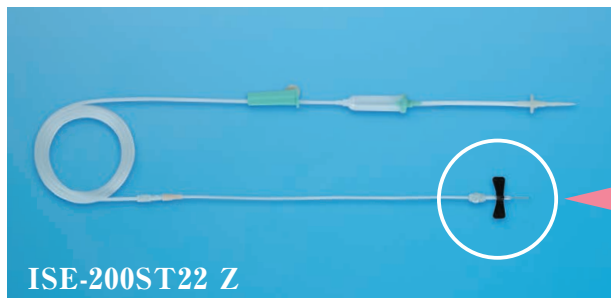


3つの
安心・安全

- 『カチッ』という音と手の感触で、針を確実に収納。
- 抜針と同時に針が収納固定される安全機構。
- 針が確実に収納されることで安全に廃棄できる。

ニプロ輸液セット eco (セーフタッチ®PSV付) の使用方法


留置中

穿刺するときは、従来の翼付針と同じように穿刺し、翼をテープで固定します。

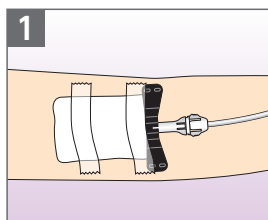


抜針開始

抜針するときは翼をテープ固定したままで行います。
刺入部を中指で、ウイング部を人差し指で押さえます。

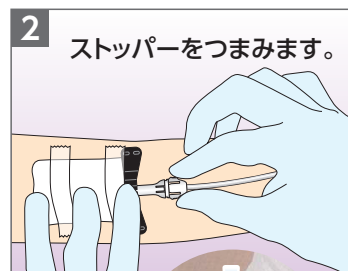

抜針後


刺入部の止血処置をおこない、翼の固定テープを外して廃棄します。

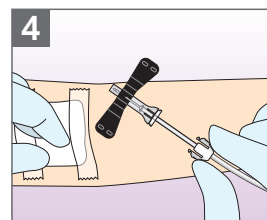

これは
安心だわ!

一度収納された針は戻らないので、
確実に針刺し事故を防止できます。

悪い例

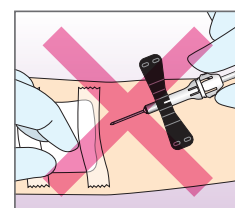

抜針後に針を収納しないですでに針がむき出しになり、針刺し事故の原因となります。