

イリゲーションセット

関節鏡・内視鏡用洗浄チューブ



1-201-000-01



1-201-000-02


1-201-000-03

1-201-000-10



株式会社 イソメディカルシステムズ

特 長

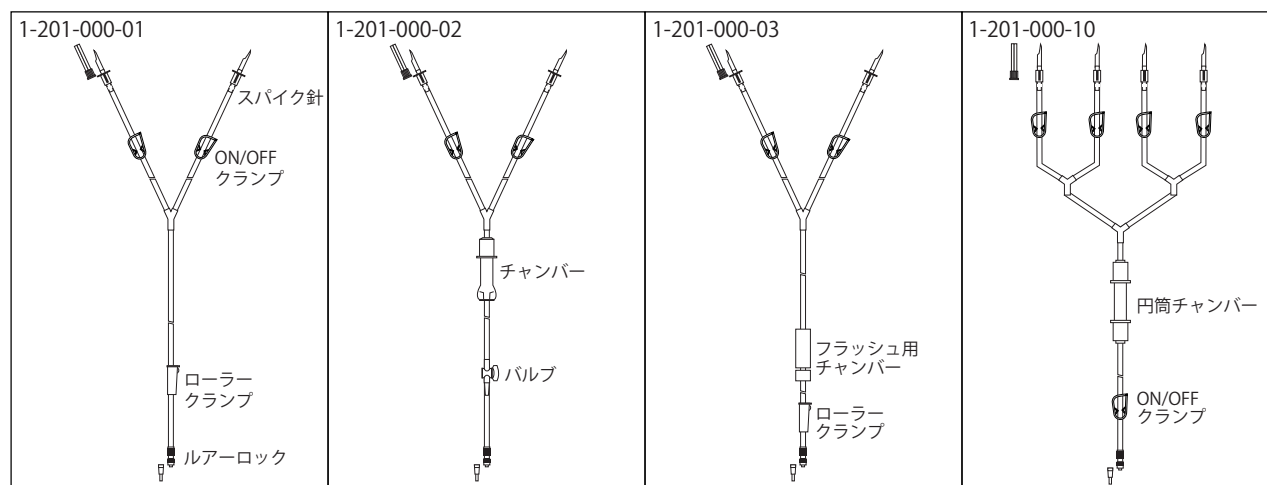

- ・チューブ、スパイク針の内径を大きくすることで、灌流洗浄液の大流量の供給を可能にします。
- ・クランプ/バルブで最適流量をコントロールすることができます。
- ・関節鏡、内視鏡の外套管への接続部分にルアーロックを使用しておりますので、ワンタッチで着脱できます。
- ・フラッシュ用チャンバー付タイプ(1-201-000-03)は、術者が意図的に患部のフラッシュ洗浄をおこなえます。
- ・Y Yチャンバー付タイプ(1-201-000-10)は、大流量を必要とする前立腺肥大症療法の「HoLEP(ホーレップ)」に適しています。

仕 様

品 番	商 品 名	チューブ内径	チューブ外径	全 長	チャンバー	流量調節機能	入数/箱
1-201-000-01	イリゲーションセット スタANDARD	4.7mm	7.0mm	2,900mm	なし	あり:ローラークランプ	25本
1-201-000-02	イリゲーションセット バルブ・チャンバー付	7.0mm	9.5mm	2,900mm	あり	あり:バルブ	25本
1-201-000-03	イリゲーションセット フラッシュ用チャンバー付	4.7mm	7.0mm	2,900mm	あり	あり:ローラークランプ	25本
1-201-000-10	イリゲーションセット YYチャンバー付	7.0mm	9.5mm	2,900mm	あり	あり:ON/OFF クランプ	15本

使用方法

- 灌流洗浄液のセッティング
 - ・灌流洗浄液をイリガートル台にセットしてください。
 - ・流量がより多く必要な場合は、灌流洗浄液を高くセットしてください。
- チューブの開封
 - ・チューブは滅菌済になっています。
 - ・開封後、チューブについている全てのクランプ/バルブを閉じた状態にしてください。
- 灌流洗浄液への接続
 - ・全てのクランプ/バルブが閉じていることを確認し、スパイク針のキャップを外し、スパイク針を灌流洗浄液の差し込み口に差し込んでください。
- 関節鏡、内視鏡への接続
 - ・ルアーロックのキャップを取り外し、ルアーロックを関節鏡/内視鏡の外套管に取り付けてください。
 - ・外套管のコックは閉じた状態にしておいてください。
- 灌流洗浄開始
 - ・クランプ、バルブ、外套管のコックを開き使用を開始してください。
 - ・流量の調節は外套管のコック、もしくはチューブの流量調節機能でおこなってください。

使用上の注意

- ・灌流洗浄液の交換は、スパイク針側のON/OFFクランプを閉じた状態でおこなってください。
- ・スパイク針を灌流洗浄液に差し込む場合、差し込み口及びスパイク針の清潔な部分に触れずに、無菌的操作をおこなってください。
- ・一度に過大な灌流洗浄液を流したり、灌流洗浄液の容器に過大な加圧をしますと、術後患部に悪影響がおきることがあります。また、過大な水圧をかけますと、チューブの破損等を起こすことがあります。

製造販売元

三矢メディカル株式会社

〒581-0053 大阪府八尾市竹湊東4-17

TEL 06 (6707) 9105

品目届出番号: 27B1X00051000011



発売元
株式
会社

イソメディカルシステムズ

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14

TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <https://www.isomed.co.jp/>