

製品情報

Ordering Information

イントロカン セーフティ 3

商品コード	品 番	カラーコード	規 格	外 径	流 量	包装単位	販売単位	JANコード
09-155	4251127-03		24G × 19mm	0.7mm	22ml／min	50本入／箱	4箱	4987458091551
09-156	4251128-03		22G × 25mm	0.9mm	35ml／min	50本入／箱	4箱	4987458091568
09-157	4251129-03		20G × 25mm	1.1mm	65ml／min	50本入／箱	4箱	4987458091575
09-158	4251130-03		20G × 32mm	1.1mm	60ml／min	50本入／箱	4箱	4987458091582
09-159	4251131-03		18G × 32mm	1.3mm	105ml／min	50本入／箱	4箱	4987458091599
09-160	4251132-03		18G × 45mm	1.3mm	100ml／min	50本入／箱	4箱	4987458091605

販 売 名：イントロカン セーフティ
認証番号：223AABZX00030000
特許第3486169号 特許第3486188号

保 険 請 求
請求名：プラスチックカニューレ型静脈内留置針 (2)針刺し事故防止機構付加型



Vascular Access

Introcan Safety[®] 3

イントロカン セーフティ 3

血液曝露防止弁付き静脈留置針

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。
製品のご使用にあたっては、製品に付属の添付文書を必ずお読み下さい。

NIPRO

発 売
ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

BRAUN

SHARING EXPERTISE
製造販売元
ビー・ブラウンエースクラップ株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

NIPRO

BRAUN
SHARING EXPERTISE

Introcan Safety[®] 3

血液曝露防止弁付き「イントロカン セーフティ 3」

安全性と使いやすさを追求した基本設計。

留置針に50年以上の経験を持つビー・ブラウンのアイデアが結集しています。

ウィング付き

- ・固定力が向上します(自己抜去防止)。
- ・患者様の皮膚トラブルの低減に貢献します。
- ・輸液ライン先端部が皮膚に接触しにくい設計です。

バックカット

- ・組織損傷が少ない加工方法です。

ラウンドエッジハブ

- ・カテーテルハブの内側を円錐状に加工することで、屈曲によるカテーテルの耐キンク(耐閉塞)性を高めました。
- ・キンク(閉塞)による輸液量低下のリスクを低減します。

複数回機能する止血弁


- ・輸液前に採血をする部署(救急・外来等)では有用です。
- ・圧迫止血が不要です。

だから「複数回機能する止血弁」

カテーテルハブ内に内蔵された止血弁により、穿刺後のカテーテルハブからの血液流出を抑制し、医療従事者、患者様の血液曝露防止に貢献します。


ダブルフラッシュバックシステム

カテーテルの血管外留置(誤留置)を防止でき、より安全・確実に血管内に留置できる逆血の確認方法です。

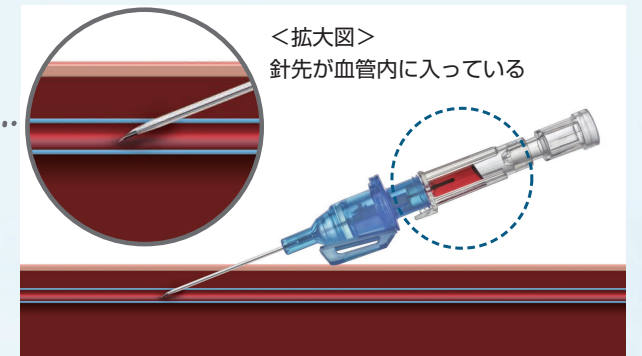

①ファースト(ニードル)フラッシュバック

- ・穿刺後、針先が血管内に入っていれば、チャンバー内(透明部分)が赤くなります。

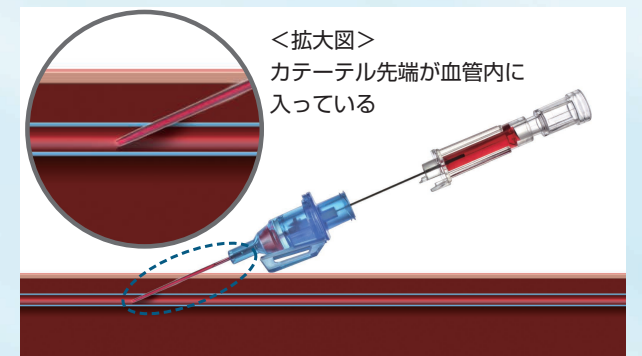

②セカンド(カテーテル)フラッシュバック

- ・カテーテルを進めた時、カテーテル先端が血管内に入っていれば、カテーテルが赤くなります。

プッシュオフプレート

- ・片手でハブ操作(カテーテル挿入)が出来ます。
- ・カテーテルハブへの接触汚染のリスクを低減します。
- ・刃面の向きが容易に確認出来ます。(プレート/上=刃面/上)

パッシブセーフティ

- ・内針を引き抜くだけで自動的に安全機構が作動します。
- ・特別な操作が不要なく安全機構が確実に作動します。
- ・針刺し事故防止に貢献します。