

7.7mm 弾性ハイソックス



一般医療機器

〔使用目的又は効果〕

下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングである。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を有する。

リンパ・血流促進

足首からふくらはぎにかけて漸減的に圧迫し、静脈血、リンパ液の流れを促進することで血栓を予防できます。

20~28
hPa
足 首

10~22
hPa
ふくらはぎ

豊富な5サイズ構成


わかりやすい
サイズ別カラー

かかとマーカ-

かんたんに的確に着用できる
かかとマーカ-採用。

豊富な5サイズ構成

サイズ		SS	S	M	L	LL
測定部位	㊤ ふくらはぎ周囲	24～30cm	28～34cm	32～38cm	36～42cm	40～48cm
	㊦ 足首周囲	15～19cm	17～21cm	19～23cm	21～25cm	24～28cm
注文コード		030-280-01	030-280-02	030-280-03	030-280-04	030-280-05
品番		MB001-SS	MB001-S	MB001-M	MB001-L	MB001-LL
標準価格		¥800	¥800	¥800	¥800	¥800

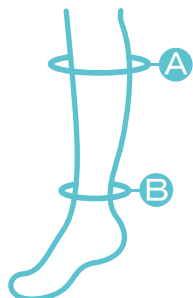

●材 質:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ●入 数:1袋(1足入)

わかりやすいサイズ別カラー



豊富なサイズをひと目でわかるように
サイズ別で色分けをしています。

かかとマーカ



かんたんに的確に着用できるかかとマーカ採用。

使用方法

伸びた爪や指のささくれなどで生地を引っかかないようご注意ください。



① 両手で商品をたぐりよせ、
つま先をモニターホールから
出ないように先まで入れて下さい。



② 足首のところまで引き上げ、
かかとの位置をかかとマーカに
合わせて下さい。



③ 両手の親指を内側に入れて
少しずつ均等に左右交互に
引上げて下さい。

※本カタログの表示価格は、メーカー希望小売価格で消費税は含んでおりません。
※印刷の都合上、質感や色が実際の商品と異なる場合があります。
※本カタログに掲載の仕様・形状・価格などは、改良などの理由により、予告なしに変更することがあります。

一般医療機器
届出番号:27B1X00024000364
販 売 名:ﾌﾗﾑ 弾性ハイソックス