



ニプロ加圧ポンプ・ EN加圧バッグCSの 使用方法

【ニプロ加圧ポンプ】 医療機器届出番号:27B1X00045000130
医療機器クラス分類:クラスⅠ(一般医療機器)
一般的名称:手動式圧注入調節装置


【EN加圧バッグCS】 医療機器届出番号:27B1X00045000163
医療機器クラス分類:クラスⅠ(一般医療機器)
一般的名称:手動式圧注入調節装置

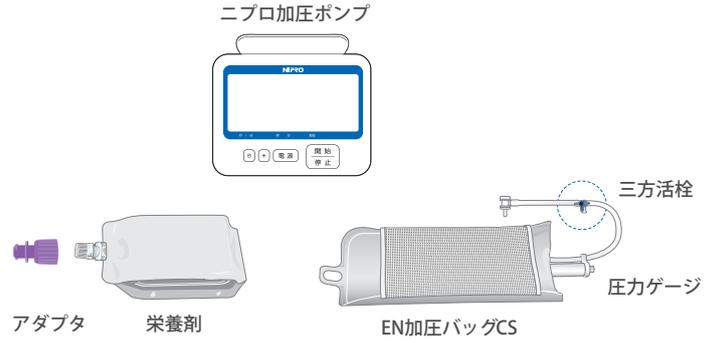


●ご使用の前に、ニプロ加圧ポンプ、EN加圧バッグCSの外観に破損等の異常が無いことを確認してください。

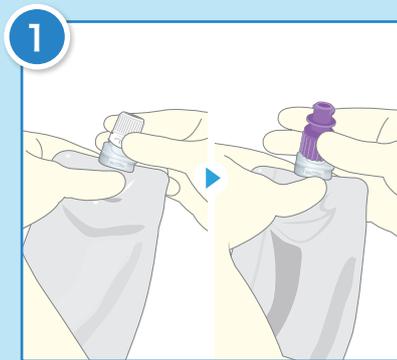

1 栄養剤のふたを開け、アダプタとしっかり接続する。

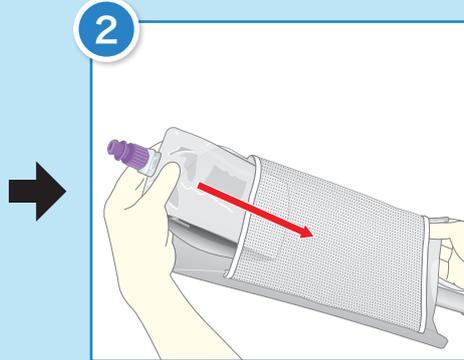


2 栄養剤をバッグにセットする。

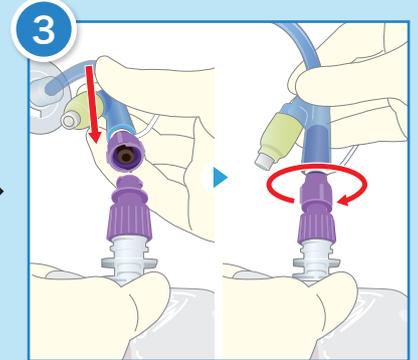

3 アダプタを胃瘻カテーテルにしっかり接続する。




4 EN加圧バッグCSと加圧ポンプを接続し、三方活栓を閉じた後、開始/停止ボタンで加圧を開始する。

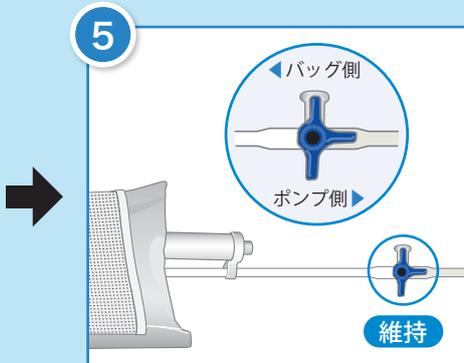


5 加圧ポンプによる加圧完了後、三方活栓を圧力維持側に合わせ投与を開始する。

※約90分間操作されないと、自動で電源OFFになります。

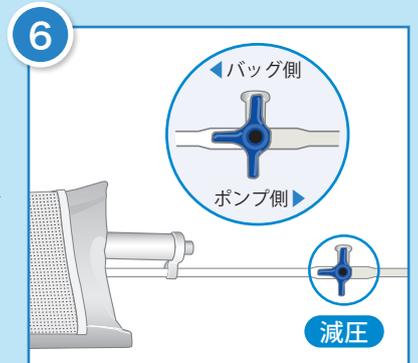

6 投与が終了したら、三方活栓を開きバッグ内の空気を脱気する。

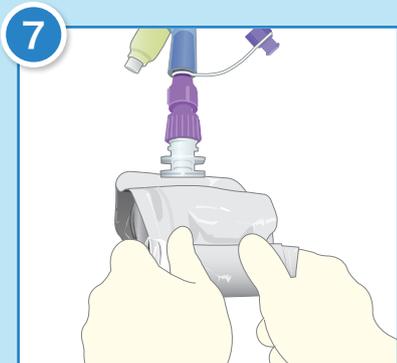

7 バッグから栄養剤の容器を取り出し、残りの栄養剤を投与する。

〈保管方法について〉

- 水ぬれに注意し、直射日光、高温多湿、ホコリの多い場所、腐食性ガスの発生する場所を避けて保管してください。
- 長期間使用しない場合は、本品から電池を外してください。電池からの液漏れにより故障の原因となります。

〈ポンプの保守・点検について〉

- 日常使用時、電源ボタンを押し、待機状態になるか、液晶文字が文字欠けしていないか使用前に確認してください。
- しばらく使用しなかったときは、使用前に動作(電源が入る、加圧する等)を確認してから、使用してください。
- 本品の清掃は、中性洗剤をしみこませた布で汚れを拭き取った後、乾いた布で拭いてください。水をかけたり、アルコール、シンナー、ベンジン等では拭かないでください。
- 本品及び取り出した古い電池を廃棄する場合は、自治体のルールに基づいて正しく処理してください。

よくあるご質問

Q1 ニプロ加圧ポンプの保証期間は？


A1 保証期間はご購入後、1年間です。取扱説明書に従った正常なご使用状態で、万一故障した場合には、無償で交換致します。

Q2 電池はどれくらい使えますか？

A2 約150回です。(乾電池使用)
電池マーク() 又は () 点滅・点灯後、約15回使用可能です。


Q3 栄養剤等を投与する際に必要な物がありますか？

A3 エクステンションチューブ、アダプタ、ENシリンジを使用する投与方法があり、それぞれ必要な製品が異なりますのでご注意ください。

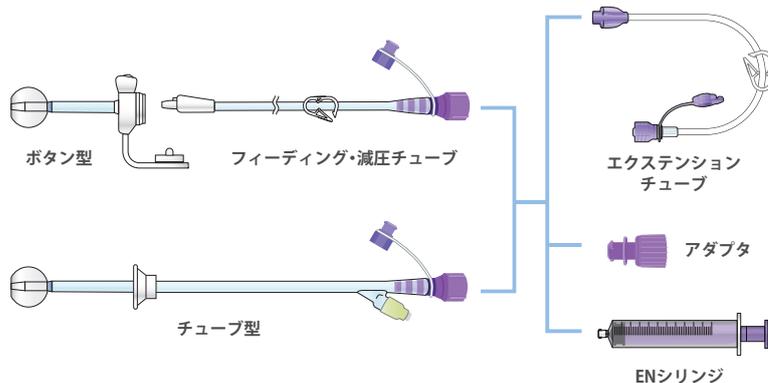


Q4 使用する際に注意する点がありますか？

A4

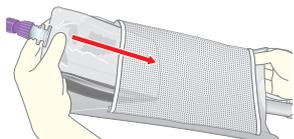


⚠️ メッシュが破損するおそれがありますので、栄養剤等の容器を無理にバッグへ挿入しないでください。

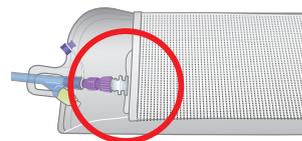

⚠️ 栄養剤容器の接続部がメッシュに被らないようにセットしてください。メッシュが破損するおそれがあります。



バッグを水に漬けないでください。

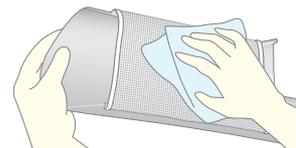

栄養剤等が付着した場合は、水分を含ませた布で清掃してください。



アルコール、消毒剤、液体洗剤等を吹きかけたり、付着した布等で拭かないでください。

Q5 EN加圧バッグCSはいつまで使用できますか？

A5

右記の状態が確認された場合は使用限界になります。修理や部品のみ販売は行っておりませんので新しい製品をご購入ください。

栄養剤を装填するメッシュ部の破損が確認された場合。

加圧したときにバッグ又はエアホースから空気漏れがあり、圧力ゲージがあがらない場合。

排気を行っても、圧力ゲージが戻らない場合。



製造販売

ニプロ株式会社
大阪市北区本庄西3丁目9番3号

製品に関するお問い合わせは

医療機器情報室  0120-226-410

受付時間：9時～17時15分(土・日・祝日・弊社休業日を除く)