

trio Elisse[®] エリーゼ皮膚被膜剤スプレー

取扱説明書



本品を皮膚表面に噴霧することで、粘着剤等によるダメージから皮膚を保護します。

1. 安全上の注意

[警告]

- 1) 高温（40℃以上）及び直射日光の当たる場所に置かないでください。ガスの膨張により破裂する可能性があります。例：風呂場、自動車の車内、ストーブ等の暖房器具の近傍。
- 2) 本品は引火性の蒸気を発生して燃焼を強めるおそれのある引火性の液体です。使用中に喫煙したり、喫煙者、ストーブ等火気の近くで絶対に使用しないでください。
- 3) 子供の手の届かないところで保管してください。

[禁止事項]

- 1) 本品に過敏症のある患者又は過敏症の疑われる患者は使用しないでください。使用に先立ち、皮膚の一部でパッチテストを行ってください。
- 2) 本品を直接吸入しないでください。偶発的に吸入した場合は、新鮮な空気のもとで深呼吸してください。不快感が認められる場合は、医師にご相談ください。
- 3) 皮膚の粘膜等（目、口、耳、鼻、膣の各部）の繊細で敏感な部位には使用しないでください。
- 4) 本品を創傷部に使用しないでください。創傷部の近くで使用する場合は、創傷部を必ず保護してください。
- 5) 皮膚に炎症等の異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

[注意]

- 1) 換気の良い場所でご使用ください。
- 2) 本品が目に入った場合は、ただちに大量の水で洗眼し、医師にご相談ください。
- 3) 本品が誤って口に入った場合は、口を水でゆすぎ、医師にご相談ください。

2. 使用方法とその注意事項

- 1) 本品を適用する皮膚表面を清拭し、よく乾燥させてください。
- 2) 適用する部位から約 10cm 離して、ムラが生じないように噴霧してください。
- 3) 粘着剤をご使用になる場合は、保護被膜が完全に乾いてから貼付してください。
※どの角度でも噴霧することが可能です。

⚠ 注意

- ① 粘着剤を交換するごとに、本品を噴霧してください。
- ② 通常、本品を除去する必要はありませんが、エリート粘着剥離剤と併用することで簡単に除去できます。
- ③ 使用期限は本品の底部に表示されています。使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- ④ 本品を廃棄する際は、完全に使い切ったことを確認し、処理する自治体等の規制に従って廃棄してください。使い切った後でも、缶に穴をあけたり、燃やしたりしないでください。

trio Elisse[®] エリーゼ皮膚被膜剤シート

取扱説明書



本品を皮膚表面に塗布することで、粘着剤等によるダメージから皮膚を保護します。

1. 安全上の注意

[禁止事項]

- 1) 本品に過敏症のある患者又は過敏症の疑われる患者は使用しないでください。使用に先立ち、皮膚の一部でパッチテストを行ってください。
- 2) 本品は引火性の蒸気を発生して燃焼を強めるおそれのある引火性の液体です。使用中に喫煙したり、喫煙者、ストーブ等火気の近くで絶対に使用しないでください。
- 3) 皮膚の粘膜等（目、口、耳、鼻、膣の各部）の繊細で敏感な部位には使用しないでください。
- 4) 本品を創傷部に使用しないでください。創傷部の近くで使用する場合は、創傷部を必ず保護してください。
- 5) 皮膚に炎症等の異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し、医師にご相談ください。

[注意]

- 1) 換気の良い場所でご使用ください。
- 2) 本品が目に入った場合は、ただちに大量の水で洗眼し、医師にご相談ください。
- 3) 本品が誤って口に入った場合は、口を水でゆすぎ、医師にご相談ください。
- 4) 子供の手の届かないところで保管してください。
- 5) 50℃以下のなるべく低温かつ清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。

2. 使用方法とその注意事項

塗布部を石鹼で洗い、よくすすいでください。その後水気をふき取って完全に乾かします。粘着剤のあたる部分や排泄物が付着する部分に、エリーゼ皮膚被膜剤シートを大きめに薄く延ばして塗り、乾かしてください。

⚠ 注意

- ① 使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- ② 再使用しないでください。