

DELTA-CAST® CONFORMABLE

デルタキャスト® コンフォーマブル (ポリエステル)

デルタキャスト® コンフォーマブルの素材には特許取得の弾性ポリエステル繊維と3Dニット技術を使用し、多方向にストレッチ(3Dストレッチ)が可能です。この特長により、シワや折り目を気にすることなく装着ができます。

利点：

- ・3Dストレッチにより高いフィット性を実現
- ・水硬性樹脂と弾性ポリエステルの基布による層の密着性と安定した硬化時間を実現
- ・高いX線透過性により、装着したままレントゲン撮影が可能
- ・ギプス用ハサミにて、取り外し及びふちを滑らかにするためのカットが可能 ※1
- ・デルタドライ®ソフトライナー下巻きチューブ包帯と併用することで、患者はシャワーを浴びることが可能
- ・独自のFRCテクノロジー※2により、固く固定したい箇所とその必要がない箇所を自在に調整可能
- ・シワになりにくく、一点に圧力が掛かることもなく、また追加でキャストを取り換える必要なし

※1. 3～4層以上をカットする際はギプスカッターをご使用ください。


FRC (FOCUSED RIGIDITY CASTING)

※2. Focused Rigidity Casting : 剛性調節テクノロジー

2～3層エリア：
やや固さを抑えた固定箇所

4～5層エリア：
しっかりと固定した箇所

2～3層エリア：
やや固さを抑えた固定箇所

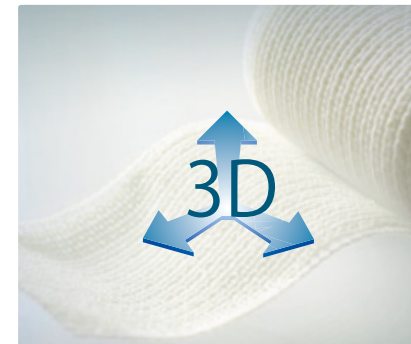

ファイバーグラス VS. ポリエステル

X線撮影画像



ファイバーグラストタイプ装着時



ポリエステルタイプ装着時

前腕への装着：

- 必要な長さのデルタドライ®ソフトライナー(パッド付下巻きチューブ包帯)をカットします。
- 親指用に小さく切り込みを入れシワなく装着します。
- 両方向に袋を引っ張り開封します。
- デルタキャストコンフォーマブルを常温の水に浸し、取り出したら軽く絞り、余分な水分を除きます。
- 患部をデルタキャストコンフォーマブルで巻き、親指周辺を巻きつけられるようカットします。
- デルタドライ®ソフトライナーのふちを折り返します。
- デルタキャストコンフォーマブルをさらに巻きつけます。
(固定箇所の荷重がかかる部分には5～8層のキャストテープを巻き、かからない部分には2～4層のキャストテープを巻きます。)
- モールドリングを行い、層を馴染ませます
キャストは約3～5分で硬化します。
硬化完了は約20分後です。
- 必要な場合はハサミでカットしてください。



品番	製品規格 (幅 × 長さ)	種類	1 箱入数
DELTA-CAST® CONFORMABLE - デルタキャスト® コンフォーマブル			
7228031	5.0 cm x 3.6 m	2号	10 巻
7228032	7.5 cm x 3.6 m	3号	10 巻
7228033	10.0 cm x 3.6 m	4号	10 巻
7228034	12.5 cm x 3.6 m	5号	10 巻
医療機器届出番号: 13B2X10405000021			