

アークレイはより良い糖尿病療養のための測定器をご提案します。

血糖値をよく見よう



自己検査用グルコース測定器

GLUCOCARD PlusCare

グルコカード プラスケア

GT-1840

医療機器 認証番号 229AABZX00030000
分類 クラスIII(高度管理医療機器)
特定保守管理医療機器

変わらない簡単操作

これまでと変わらず、センサーを差し込むだけで測定が可能です。面倒なボタン操作等も必要ありません。

見やすい画面表示を追求

カラー液晶を搭載し、さらに測定結果は黒背景の白抜き文字で表示することで視認性を向上しました。測定結果の表示も、当社従来機種と比較し1.5倍の大きさになりました。

音声で測定操作をアシスト

測定結果はもちろん測定操作も音声でサポートします。測定エラー時も音声で対処方法をお知らせするので安心です。

アークレイは糖尿病ケア製品を通じて、公益社団法人日本糖尿病協会の賛助会員として、ブルーサークル運動（啓発運動）に協賛しています。

11月14日は「世界糖尿病デー」。1991年に国際糖尿病連合(IDF)と世界保健機関(WHO)が制定した、糖尿病の疾患啓発の日です。「ブルーサークル」は、どこまでも続く空を表す「ブルー」と団結を表す「輪」からデザインされた世界糖尿病デーのシンボルマークです。

アークレイは糖尿病検査のパイオニアメーカーとして、この「ブルーサークル」と共に、これからも糖尿病診療の発展に貢献していきます。



シンプル、さらに使いやすい・・・ そんな血糖測定器を目指しました。

シンプルな操作と、見やすい画面

センサーを差すだけで、電源が入り測定が開始できます。画面はカラー液晶を搭載しており、カラーイラスト表示や視認性のよいフォントを採用しました。測定操作やエラー時の対応方法は文字とイラスト表示でサポートします。



オープニング画面



測定結果



操作説明



エラー表示




音声で測定操作をアシスト

測定操作から結果記録まで音声でサポートします。操作に慣れたら、音声アシストをオフにすることもできます。

音声ブザー設定スイッチ



音声のガイドの例

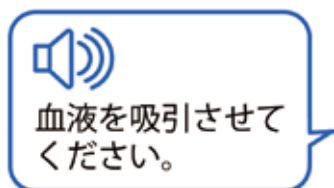

音声ブザーの設定

設定	音声ガイド	ブザー音
設定	なし	あり
0	なし	なし
1	あり	あり



自己検査用グルコースキット

G Sensor
Gセンサー

体外診断用医薬品 承認番号 21400AMZ00483000



単回使用自動ランセット

naturalet
plus

ナチュラレット plus

管理医療機器(クラスII) 認証番号 302AFBZX00048000

採血用穿刺器具

ナチュラレット plus デバイス

一般医療機器(クラスI) 届出番号 33B2X00002000008



【仕様】自己検査用グルコース測定器 グルコカード プラスケア

測定項目：血液中のグルコース
測定範囲：10～600mg/dL
必要検体量：0.6μL(全血)
使用センサー：自己検査用グルコースキット G センサー
(アルミバック包装/ボトル包装)
測定時間：点着検知後5.5秒
記憶データ数：800測定
外部入出力：UART 通信端子、NFC
使用環境：温度：10～40℃、湿度：20～80%(非結露)
外形寸法：48.5(横)×101(縦)×20.5(高さ)mm
重量：82g
電池：単4形アルカリ乾電池2本
電池寿命：約1000回以上
(使用方法によって使用可能回数が少なくなることがあります)
消費電力：0.6W

グルコカード プラスケアは電池を装填して出荷しておりますので、すぐに測定を開始していただけます。ただし、出荷時に装填された電池はサンプル用のため、記載の電池寿命は保証できません。

発売元 アークレイ株式会社
製造販売元 株式会社アークレイ ファクトリー
販売元 アークレイ マーケティング株式会社
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-20-20大雅ビル5F
TEL 050-5527-7700(代)
URL <http://www.arkray.co.jp/>

※外観および仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先

担当

アークレイ コールセンター 6:00～22:00
(年中無休)
0120-81-1955

G170222-01D