

《アンシルク・プロJ キープケア》は弾性ストッキングの適切なフィッティングをサポートします。



履かせ方ガイド

履かせ方と脱ぎ方は、
動画をご覧ください。

<http://www.alcare.co.jp/s/apk>



ストッキングの中に手を入れ、内側からかかと部分をつまみます。



かかと部分を内側でつまんだまま、手を引き抜く。かかと部分まで裏返します。



履き込み口を広げ、つま先からかかとまでを履き込みます。



かかとの位置を合わせたら、裏返した部分を足首の位置で表向きになるように反転させます。



両手の親指をストッキングと足の間に差し込み、半円を描くように動かしながら少しずつ均一に引き上げていきます。



上まで引き上げたら、かかとの位置が合っているか、モニターホール（足）の位置が合っているか、シワやたるみがないか、ねじれていないかなどを確認してください。


※「アンシルク・プロJ キープケア ハイソックス Mサイズ」を使用しています。



種類	商品コードNo.	足首周囲	規格	サイズ表示	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
LL	20301	23~27cm	40~46cm	グリーン	1足	¥2,000
L	20302	21~25cm	36~42cm	ブルー		
M	20303	19~23cm	32~38cm	ピンク		
S	20304	17~21cm	28~34cm	イエロー		
SS	20305	15~19cm	24~30cm	オレンジ		

種類	商品コードNo.	足首周囲	規格	サイズ表示	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
LL	10足入り	23~27cm	40~46cm	グリーン	10足	¥20,000
L	10足入り	21~25cm	36~42cm	ブルー		
M	10足入り	19~23cm	32~38cm	ピンク		
S	10足入り	17~21cm	28~34cm	イエロー		
SS	10足入り	15~19cm	24~30cm	オレンジ		

※2つのサイズに該当する場合は、足首周囲が両足の間の中央に近いサイズをお選びください。

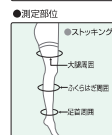

種類	商品コードNo.	足首周囲	規格	サイズ表示	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
LL	20311	23~27cm	40~46cm	グリーン	1足	¥2,600
L	20312	21~25cm	36~42cm	ブルー		
M	20313	19~23cm	32~38cm	ピンク		
S	20314	17~21cm	28~34cm	イエロー		
SS	20315	15~19cm	24~30cm	オレンジ		

種類	商品コードNo.	足首周囲	規格	サイズ表示	1箱入数	メーカー希望小売価格(税別)
LL	10足入り	23~27cm	40~46cm	グリーン	10足	¥26,000
L	10足入り	21~25cm	36~42cm	ブルー		
M	10足入り	19~23cm	32~38cm	ピンク		
S	10足入り	17~21cm	28~34cm	イエロー		
SS	10足入り	15~19cm	24~30cm	オレンジ		

※2つのサイズに該当する場合は、足首周囲が両足の間の中央に近いサイズをお選びください。

サイズ表示カラー



ALCARE

アルケア株式会社

東京都墨田区新富1-2-1 アルカセメントビル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

●本カタログの発行は2019年6月現在のものです。
●本カタログに掲載の情報は、変更や誤脱等の可能性があるため、必ず最新の情報を確認してください。
●本カタログに掲載の情報は、変更や誤脱等の可能性があるため、必ず最新の情報を確認してください。

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル 0120-770-863

土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

VEGETABLE
INK

環境にやさしいインクを使用しています。
詳しくはwww.alcare.co.jpをご覧ください。

461-1217-0819/1

for Best Care **ALCARE**

アンシルク®・プロJ キープケア Ansilk-Pro J Keepcare



正しく履けること、
生地にこだわること、
それが適切なケアを
キープします。

弾性ストッキング
Elastic Stockings

www.alcare.co.jp

《アンシルク®・プロJ キープケア》適切なフィッティングをサポートする弾性ストッキング

高い視認性のポジションマーカで適切な装着がわかり、動きに追従する生地が局所への過度の圧迫リスクを低減します。

日本人体型データの分析と研究により開発されたアンシルク・プロJが、よりケアをキープするのに適したカタチに進化しました。




あるある **1** 履かせる作業が難しい。

どこまで引き上げるのかしら？

見ればわかる
ポジションマーカで
わかりやすく適切な装着ができます。

高い視認性のポジションマーカ


つま先、かかと、ひざ、ロゴムに色や文字で明確なポジションマーカをつけることにより、適切な装着を誘導します。

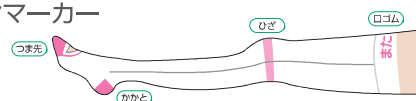

適切な装着を誘導します。

サイズごとの色がわかりやすい

SS、S、M、L、LLの5種類のサイズバリエーション。サイズごとの色が明確です。

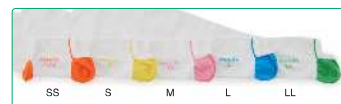

裏返した状態でも色で位置がわかる

色がついているため、かかと部分の位置がすぐわかり、裏返ししやすく、色を目印にかかとの位置を合わせることができます。




色が目印となるので部位合わせが簡単

つま先、かかとがすっぽり取まっていることが見てわかります。ひざの位置が合わせやすくなっています。



適切な
位置がわかる

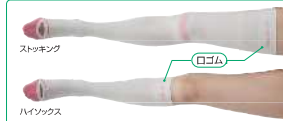


あるある **2** 動いているうちにずれてしまう。

正しく履かせたのにずれている...

動きに追従する生地が
シワやずれを抑え
局所への過度の圧迫リスクを低減します。

弾性糸で縦横に高い伸縮性

ベース糸に弾性糸を用い伸縮性をもたせることで、縦横に伸び、しっかり戻るので、脚にフィットし動きに追従します。

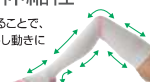

密に入れたインレイ糸で面で圧迫

圧迫を出すための横に編みこむインレイ糸を密に入れることにより、面で圧迫。局所に過度の圧迫がかかりにくい編み構造です。

動きに追従してぴったりフィットします。

シワができにくい

動きに追従するから、シワが発生しにくい。



ロゴムで締めつけない

脚全体にぴったりフィットするから、ロゴムで締めつける必要がありません。



過度の圧迫がかからない

面で圧迫するから、骨突出部(足趾付け根、くるぶしなど)に過度の圧迫がかかりません。



アンシルク®・プロJ

日本人体型データに基づくサイズ設計で、よりの確な圧迫圧を実現。周術期および長期臥床など、安静時の静脈還流をサポートする弾性ストッキングです。

日本人体型に基づく設計

日本人の体型データの分析と研究により開発されたアンシルク・プロJは日本人の脚の各部位を的確に圧迫し、下肢血流を確保します。



■日本人と欧米人の脚部周径の比較

体型データによると、日本人の脚は欧米人よりも太く、足首の太さは欧米人よりも太い。そのため、欧米人よりも太い脚にフィットする必要がある。



安静時に適した圧迫設計

脚の形状に合わせた立体構造とSigel理論¹⁾による至適圧迫(安静時の血流が38%増大)に基づいた圧迫設計により、臥床期間中最適な圧迫が一定に保持されます。

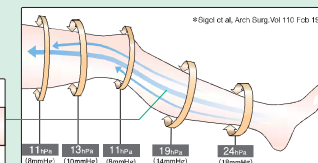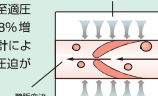

¹⁾ Sigel et al, Arch Surg, Vol 110 Feb 1975