

経鼻内視鏡用 前処置スプレー

ルネミツシュ

経鼻内視鏡用前処置スプレーの新ラインアップ登場。



●ドーム形状の噴霧口直下部


外鼻孔を塞ぐような形状を採用。過挿入を防止できるので安心して薬液投与ができます。

●噴霧状態の安定化を実現

従来品と比べ噴霧口までの距離が短いため、安定した噴霧状態を得ることができます。

●経鼻投与剤に最適な細かい霧粒

粘膜を広範囲に覆います。また、狭角噴霧により、鼻腔内の深部まで薬液を到達させることができます。

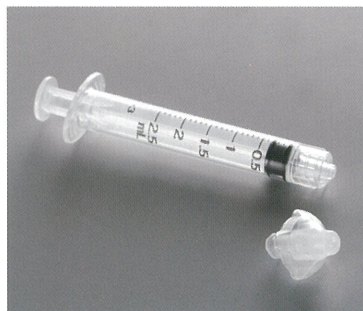

使用方法

1. 薬液をシリンジに充填する
2. スプレーノズルをシリンジに接続する。
3. 半座位、または仰臥位の患者の外鼻孔にノズルを押し当て、薬液を噴霧する。



販売名	入数	税抜価格	備考	JAN
ルネミツシュ	25本	9,000円	スプレーノズルと2.5mlロック付シリンジセット	4996404352011

製造販売業者 株式会社トップ 一般的名称:耳鼻咽喉科用薬液噴霧器 届出番号:13B1X00085000127

●外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。 ●ご使用に関しては、製品添付の取扱説明書をお読みください。

販売業者・お問い合わせ先 **富士フイルム メディカル株式会社**

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目26番30号 富士フイルム西麻布ビル
TEL:03-6419-8045

URL: <http://fms.fujifilm.co.jp>



富士フイルムメディカル株式会社は、
個人情報の保護に全社をあげて
取り組んでいます