



MOGU®
FEEL CONSCIOUS

活動
補助

脳の活性

癒しの触感クッション

本体(カバー付・1個) 本体価格

1,900円

[税込2,090円(10%)]

替カバー(1個) 本体価格

1,000円

[税込1,100円(10%)]



パウダービーズ®の流動性と
伸縮性で手にフィット。
脳梗塞などによる
手指の拘縮症状の方の介護に。



MOGU® 癒しの触感クッション(カバー付・1個)

[約横15cm×縦9cm×奥行6cm]

JANコード	赤	4540323015979	緑	4540323015986	青	4540323015993
--------	---	---------------	---	---------------	---	---------------

MOGU® 癒しの触感クッション替カバー(1個)

[約横15cm×縦9cm]

JANコード	赤	4540323016419	緑	4540323016426	青	4540323016433
--------	---	---------------	---	---------------	---	---------------

●組成 / ナイロン85%、ポリウレタン15% / 中材 / パウダービーズ®(発泡ポリスチレン) ●重量 / 本体+カバー:約20g / カバー:約5g ●日本製

伸縮性と反発力が
握る動作を促します。
洗濯して、くりかえし使えるカバー付き。




本製品はカバー付きですので、こまめにカバーを洗濯し清潔に保ってください。
なお、中身(中材)の洗濯後は十分に脱水を行ってください。

反発力のあるクッションを握ると…

「クッションの反発力」が「握り返す動作」につながり、
脳に刺激が伝わりと同時に、**関節の動きが広がる**と言われています。

脳梗塞や認知症などの後遺症で手を握りしめたままになった人に、高い反発力を持つクッションでできたグリップを約一か月握らせたところ、指がほぐれ、発語するなどの症状の改善が見られたという報告があります。*

※ 2013年 日本神経科学学会など

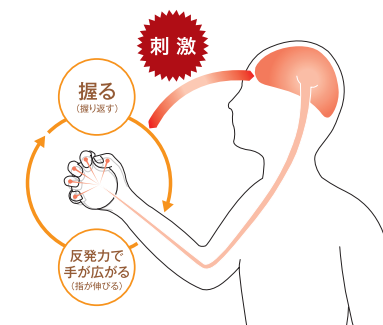

使い方は簡単!

- 1 人差し指と小指に紐を通す
- 2 そのまま握る



介護者が介助する基本の指の開き方

手首を曲げた状態を保ったまま、ゆっくりと指を開きます。洗う場合は、そのまま下から手を入れて開いた手を洗ってあげてください。

⚠ 拘縮により、手を握りしめたままになった人の手を急に開くのは危険が伴います。可能であれば、作業療法士等の専門家に診てもらい、指導を受ける事が安全です。