


ひえ子[®]A シリーズ

- 発熱時の熱さましや打撲、捻挫等の応急処置に。
- ひえ子Aは冷凍庫や冷蔵庫で2時間以上冷やしてください。

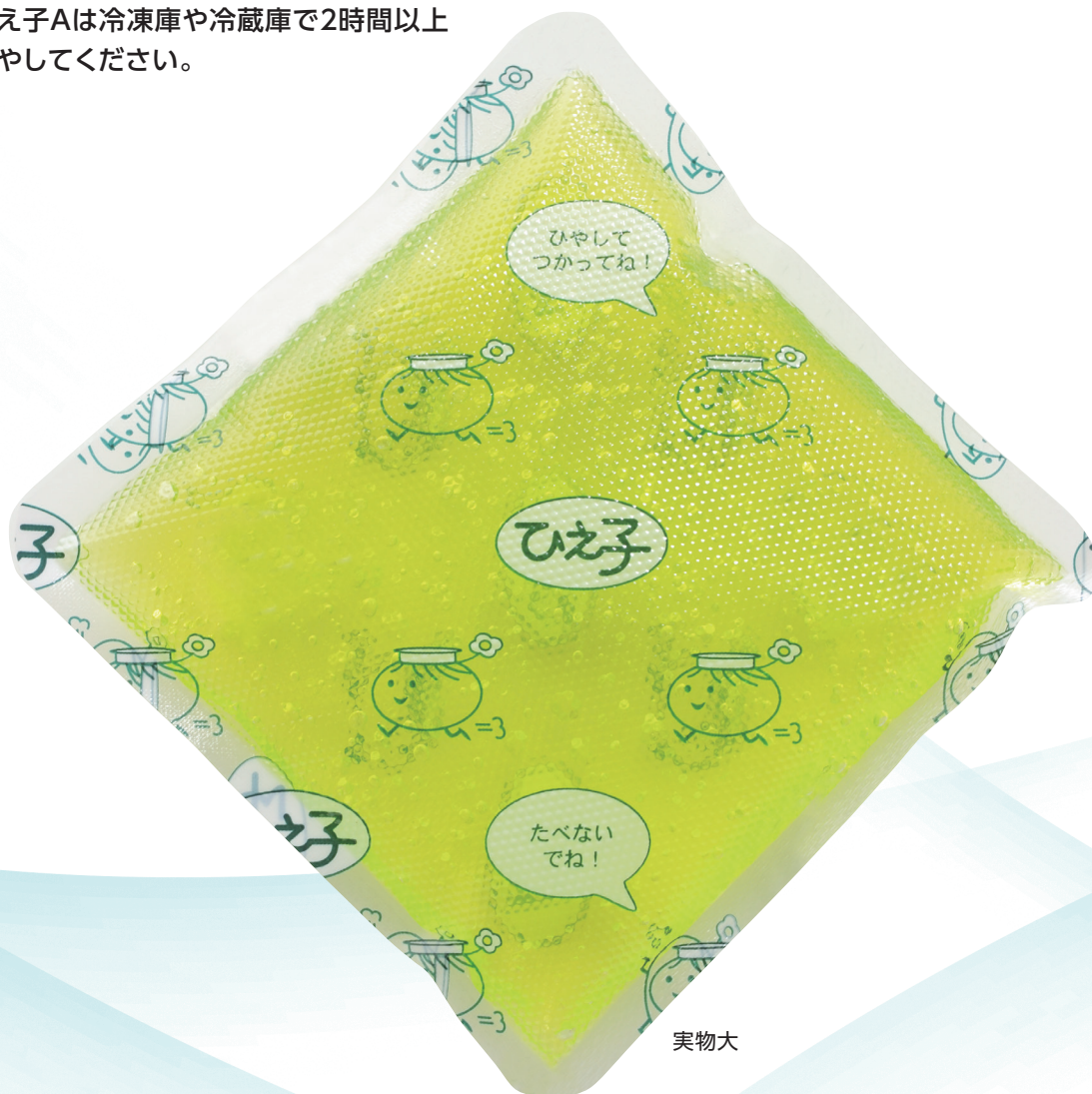

実物大



ひえ子カバーAをそのまま…
ひえ子Aを2個使って…




ひえ子カバーAを真ん中で切って…
ひえ子Aを1個使って…


材 質：《ジェル》水、増粘剤(CMC)、不凍液(PG)、調整剤、食用色素、防腐剤
《シート》ナイロンポリエチレン
《カバー》レーヨン、ポリエチレン
サ イ ズ：横105mm×縦105mm
重 さ：100g

ひえ子®カバーA

- 内側に防水ラミを使用。ひえ子Aからの結露を防ぎます。

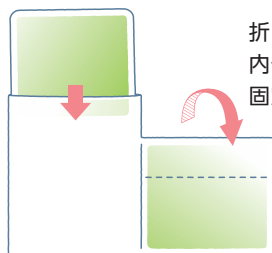

折り返し部分を
内側に折り込むことで
固定できます。

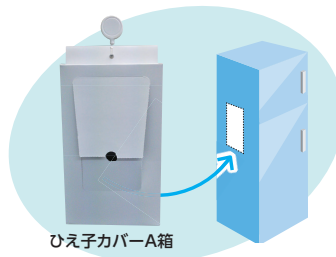

ひえ子カバーAの箱は、使いたい時にすぐに使えるように、冷蔵庫や冷凍庫に磁石のフックを取り付け吊り下げておきます。

※ひえ子カバーA専用フックにつきましては、弊社営業にお問い合わせください。

特 徴

ひえ子A

- 冷凍庫に入れても凍らず、ソフトな使用感があります。
- 繰り返し使用が可能です。(破損した場合は、使用できません。)
- コンパクトで、使い方はいろいろ。

ひえ子カバーA(使い捨てカバー)


- 防水素材を使用しているので、結露を抑えられます。
- ひえ子Aを2個入れることができ、折り返し部分を内側に折り込むことで固定することができます。
- ひえ子Aを1個でご使用の際は、カバーの真ん中を切ってください。

【注意点】 ●電子レンジ加熱等のホットでのご使用はおやめください。 ●安全性の高いジェルを使用していますが、絶対に食べないでください。

ひえ子カバーAの方が本体の冷たさをダイレクトに伝えます。


※冷た過ぎると感じた際には、タオル等を使い、調整してご使用ください。

保冷データ[ひえ子カバーA]

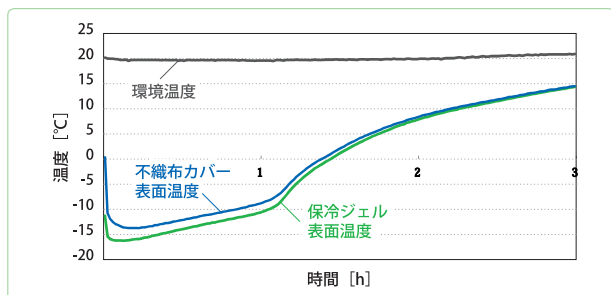


試験条件:

冷凍庫(約-20℃)で十分に冷やした保冷ジェルを不織布カバーに入れ、約20℃環境下に静置させた時の温度変化を測定した。

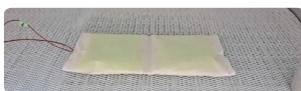


保冷データ[タオル]

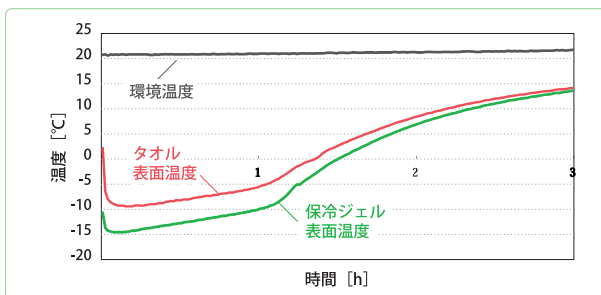

試験条件:

冷凍庫(約-20℃)で十分に冷やした保冷ジェルをタオルにくるみ、約21℃環境下に静置させた時の温度変化を測定した。

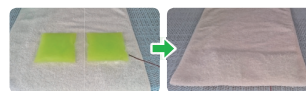

商品名	品番	入数	単位	定価	JANコード
 冷却剤 ひえ子A	C8220	ひえ子A 本体 2個 ひえ子カバーA 1枚	袋	780円(税別)	4517850001256
 ひえ子A	N8220	ひえ子A 本体 12個 ひえ子カバーA 6枚	箱	4,300円(税別)	4517850001171
 ひえ子カバーA	N8230	ひえ子カバーA 50枚	箱	6,500円(税別)	4517850001188

あしかメディ工業株式会社

本社: 〒113-0034 東京都文京区湯島4-9-12 TEL 03-3811-0234 FAX 03-3812-9284
 綾瀬事業所: 〒120-0003 東京都足立区東和3-5-4 TEL 03-3620-0234 FAX 03-3620-0877
 白井事業所: 〒270-1403 千葉県白井市河原240-17 TEL 047-492-4056 FAX 047-491-5517
 yes@asicamedia.co.jp



ISO9001:2015 認証取得