

防水 水仕事に強い!

一般医療機器 救急絆創膏

カットパッド®

★ W A T E R P R O O F ★

防水 保護

キズにつかない特殊パッド



水仕事に強い!

- ・水仕事から傷をしっかり守ります。
- ・塩化ビニル製で、コシのあるやわらかな支持体を採用しており、透明なので目立ちません。
- ・低刺激のアクリル系粘着剤を採用しています。
- ・傷につかない特殊パッドを採用しています。



用途で選べる 2 サイズ!!


ノーマルサイズ




ジャンボサイズ



パッドの周りの幅を広くとり、水の浸入をしっかりと防ぎます。

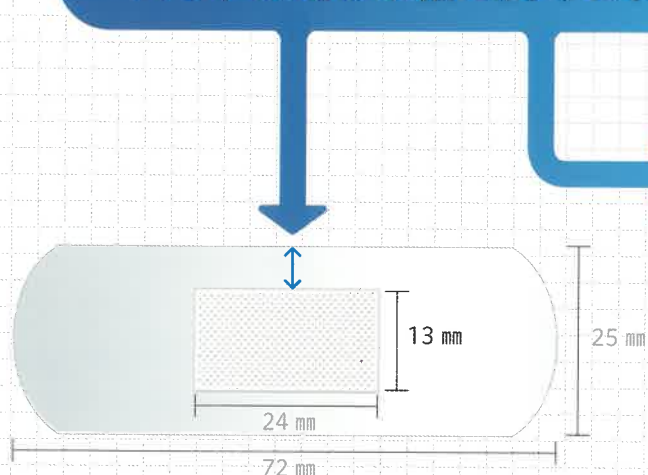

実物大

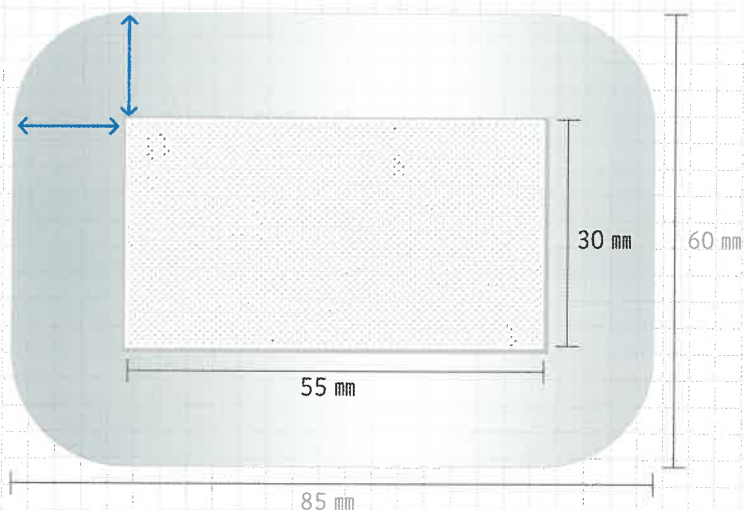

- 傷につかない特殊パッドを採用。
- パッドの周りの幅を広くとる事により水から傷口をしっかり保護!
- 指などに使いやすいノーマルサイズ。

- コシのある透明でやわらかい塩化ビニル製の支持体により、ひざや肘などの屈曲部位にも適したジャンボサイズ!


特長 1 高い防水性。傷口を水からしっかり守る。



高い防水性でしっかりと水を防ぎ、水仕事や入浴時でも傷を守ります。

〔従来品との防水性の違い〕

(防水タイプでない自社従来品との比較)

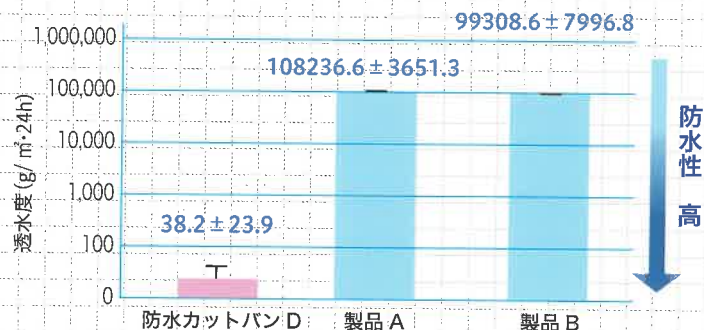

祐徳薬品工業株式会社内資料

特長 2 高い粘着性。途中ではがれる事なくしっかり保護。

コシのあるやわらかい塩化ビニル製の支持体で、指や肘を曲げ伸ばしても高い粘着性によりはがれにくい。



貼り方豆知識

より快適にご使用いただくために

指先への貼り方



強く巻きつけて貼ると血流を止めてしまいがちです。たすぎがけの様にナナメに貼ると、血流も妨げにくく、しっかりと保護できます。

屈曲部位への貼り方



ひざや肘、指の関節などの屈曲する部位は、軽く曲げた状態で絆創膏を貼るとはがれにくくなります。



日本製
MADE IN JAPAN

DRUG INFORMATION

名 称	防水カットバンド	届 出 番 号	41B2X00001000013
区 分	一般医療機器	一 般 的 名 称	救急絆創膏
JMDNコード	34864000		
禁 忌 ・ 禁 止	一度使ったものは再使用しないでください。		
形 状 ・ 構 造 及 び 原 理 等	本品は、アクリル系粘着剤を塗布した塩化ビニル粘着テープとベンザルコニウム塩化物薬液で消毒したポリオレフィンネット付き不織布パッドからなる救急絆創膏です。		
使 用 目 的, 効 能 又 は 効 果	創傷面の保護		
操 作 方 法 又 は 使 用 方 法 等	患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。 防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。		
使 用 上 の 注 意	1. 重要な基本的注意 本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。 2. その他の注意 1)パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、はり替えてください。 2)患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。 3)粘着面を患部にはらないでください。		
貯 蔵 ・ 保 管 方 法 及 び 使 用 期 間 等	1. 貯蔵・保管方法 1)直射日光のあたらない涼しい所に保管してください。 2)小児の手のとどかない所に保管してください。 2. 使用期限 使用期限は外箱に記載(自己認証(当社データ)による)		
包 装	25mm×72mm(パッド13mm×24mm) 30枚,50枚入 60mm×85mm(パッド30mm×55mm) 8枚入		

防水カットバンド

円

ノーマルサイズ
30枚

4 987235 020989

防水カットバンド

円

ノーマルサイズ
50枚

4 987235 020996

防水カットバンド

円

ジャンボサイズ
8枚

4 987235 021009

品番	規格	希望小売価格 (本体価格)		詰数	サイズ(幅×奥×高)・重量 ITFコード
WPC30	ノーマル サイズ 30枚	556円	パッケージ		68×23×100mm・29g
			内装	10個	68×233×100mm・290g
			梱包	200個	430×365×265mm・6.4kg 14987235020986
WPC50	ノーマル サイズ 50枚	741円	パッケージ		68×33×100mm・45g
			内装	10個	68×166×200mm・450g
			梱包	200個	430×365×353mm・9.7kg 14987235020993
WPCJ8	ジャンボ サイズ 8枚	556円	パッケージ		94×20×134mm・33g
			内装	10個	94×203×134mm・330g
			梱包	100個	508×293×224mm・3.8kg 14987235021006

製造販売元



祐徳薬品工業株式会社

本 社：佐賀県鹿島市大字納富分2596番地1 ☎0954(63)1231代
 北 海 道 支 店：札幌市中央区北五条西六丁目2番2号札幌センタービル ☎011(233)0007代
 東 北 支 店：仙台市青葉区本町二丁目15番1号ルナール仙台9F ☎022(263)7277代
 東 京 支 店：東京都大田区東横谷一丁目1番21号 ☎03(3745)6151代
 名 古 屋 支 店：名古屋市中北区植田東一丁目701番地 ☎052(805)3039代
 大 阪 支 店：大阪府吹田市南吹田五丁目1番1号 ☎06(6380)1451代
 中 四 国 支 店：広島市中区本通6番11号明治安田生命広島本通ビル ☎082(504)6060代
 福 岡 支 店：福岡市博多区冷泉町5番32号オーシャン博多ビル7F ☎092(271)7701代

<http://www.yutokuyakuhi.co.jp/>

お客様相談窓口
TEL.0954-63-1320
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日は除く)